

Bandeja Rifton Stander



La bandeja tiene un único punto de montaje en el lateral del bipedestador.

Su posición se puede ajustar fácilmente aflojando las tres perillas que miran hacia abajo y moviendo la bandeja a la posición deseada antes de volver a apretar las perillas. El ángulo de la bandeja se puede ajustar con la perilla que se encuentra debajo de su centro. Para ajustar la altura de la bandeja, utilice la perilla que mira hacia adelante.

La bandeja puede girar para facilitar las transferencias. Se puede utilizar tanto en posición prona como supina.

Modelos y tallas

- SC4501110 Bandeja - Talla única