

Ankle Huggers

ART NO. FT240



Estas instrucciones ofrecen información importante sobre el uso y mantenimiento seguros de los Bodypoint Ankle Huggers. Entregue estas instrucciones al usuario familiar a su cargo y revíselas para asegurarse de que se comprenden.

⚠ ¡ADVERTENCIA! El producto debe ser instalado y colocado por un técnico de rehabilitación cualificado.

ANTES DE COMENZAR: Sólo deben utilizar Ankle Huggers las personas que lleven un cinturón lumbar correctamente ajustado. Aunque los Ankle Huggers pueden instalarse en cualquier tipo de soporte de pie, tenga en cuenta las necesidades de posición del usuario antes de instalarlos en plataformas basculantes. Los Ankle Huggers deben encajarse y llevarse en el calzado diario. Los zapatos con demasiado acolchado y los dispositivos ortopédicos pueden impedir que se ajusten correctamente.

USO PREVISTO

⚠ ¡ADVERTENCIA! Este producto sólo deberá usarse para colocar a una persona en la silla de ruedas. NO debe usarse como dispositivo de seguridad para transporte, ni como dispositivo de restricción personal o en cualquier otra aplicación en la que su mal funcionamiento podría causarle lesiones a la persona. El uso inapropiado de este producto no está autorizado y además es inseguro.

⚠ ¡ADVERTENCIA! De igual forma que con cualquier nuevo soporte para asientos, este producto puede cambiar la forma de sentarse del paciente. Los pacientes deben continuar con sus actividades normales de alivio de presión y comprobación de integridad cutánea, no sólo en los lugares de contacto del producto, sino también en las zonas de presión principales como el sacro, las piernas y las nalgas. Si se produce un mayor enrojecimiento o irritación de la piel, no continúe usando el producto y consulte con su médico o especialista postural. De no hacerlo pueden producirse lesiones graves, como por ejemplo las úlceras de presión.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Si se produce un incidente grave relacionado con el uso de este producto, debe informarse al fabricante (Bodypoint, Inc.) y a la autoridad local competente.

COMPROBACIONES PERIÓDICAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO: Para garantizar la seguridad del usuario, este producto debe revisarse periódicamente para determinar su correcto funcionamiento y los signos de desgaste. Si el producto no funciona correctamente o si se encuentra un desgaste significativo en las hebillas, los puntos de montaje, la cincha, las almohadillas o las costuras, deje de usarlo y contáctese con su proveedor para que sea reemplazado o reparado por personal cualificado de Bodypoint. Este producto no debe ser modificado ni reparado por personal no cualificado bajo ninguna circunstancia: la salud y la seguridad dependen de ello.



LIMPIEZA: En lavadora, agua caliente 60° C (140° F). No usar lejía. Secado en secadora a baja temperatura, o tendida. No planchar. (Si coloca el producto dentro de una bolsa de tela durante el lavado ayudará a evitar arañazos al producto y a la propia lavadora).

RESTOS/DESECHOS: El producto está fabricado con materiales que pueden desecharse de forma segura sin tomar precauciones especiales al final de su vida útil.

GARANTÍA: Este producto tiene una garantía limitada para toda la vida contra defectos de mano de obra y materiales derivados de un uso normal por el paciente original. Póngase en contacto con su suministrador o con Bodypoint si desea realizar reclamaciones bajo garantía.

Si desea obtener más información sobre productos de Bodypoint y una lista de distribuidores fuera de EE.UU., visite la página www.bodypoint.com



Bodypoint Europe BV
Kerkstraat 29
7336 PD Tenwolde
The Netherlands



Producto sanitario



CONTENIDO DEL PAQUETE

Ankle Huggers (par)
Kit de montaje





ORIENTACIÓN

Ankle Huggers debe usarse firme sobre el tobillo (en el maléolo), encima del pie, para dar más comodidad y control de la parte inferior de las piernas. Las hebillas pueden llevarse hacia el interior o el exterior de cada pie, para acceder a ellas fácilmente.


POSICIONAMIENTO

La colocación de la correa permite varios grados de movimiento.

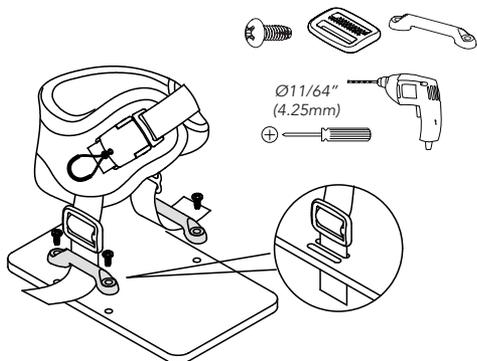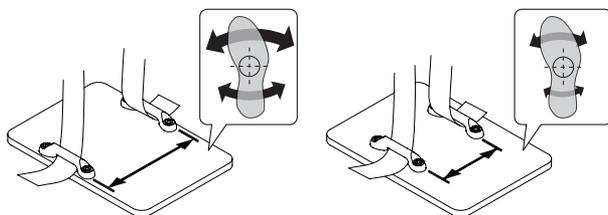

Ø11/64"
(4.25mm)

+

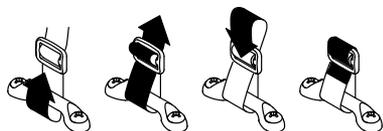

MONTAJE

Ajuste la longitud de las correas inferiores para apretarlas contra el pie, según el control que desee. La mayoría de los usuarios no necesita apretarlas. Fije el extremo de cada correa inferior pasando cada una a través de la guía deslizante de tres barras para fijarla en su lugar.

AJUSTE

Para uso diario, la hebilla permite pequeños ajustes de adaptación para adecuarla a los cambios de calcetines o calzado. No es necesario cerrar totalmente la hebilla en cada uso. La correa con gancho y bucle permite ajustes posteriores, si fueran necesarios.

