
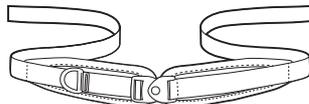


Cinturón de soporte pélvico

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y PARA EL USUARIO

ART NOS. GB2, HB2, HB4, LB2, LB4, & NB2

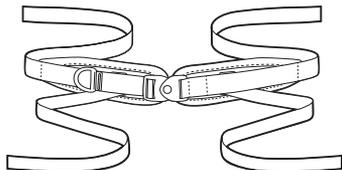

Estas instrucciones ofrecen importante información sobre el uso y mantenimiento seguros de todos los cinturones de soporte pélvicos Bodypoint. Entregue estas instrucciones al usuario o a la persona que le atienda y revíselas para asegurarse de que se comprendan.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! El producto debe ser instalado y colocado por un técnico de rehabilitación cualificado.

Para su instalación, este producto debe montarse con uno de los siguientes artículos:

- Acoples terminales Flat-Mount
- Acoples terminales Cinch-Mount
- Hebillas de leva (2,5 cm [1 in] adecuadas para usuarios de hasta 75 kg; 3,8 cm [1-1/2 in] y 5,08 cm [2 in] adecuadas para todos los usuarios)

El herraje de montaje opcional del cinturón Bodypoint también puede utilizarse para sillas de ruedas y sistemas de asiento.

USO PREVISTO:

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Este producto solo debe usarse para colocar a una persona en la silla de ruedas o de trabajo. NO debe usarse como dispositivo de seguridad para transporte, ni como dispositivo de restricción personal o en cualquier otra aplicación en la que su mal funcionamiento podría causar lesiones a la persona. El uso inapropiado de este producto no está autorizado y además es inseguro.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Este cinturón de soporte pélvico debe usarse ajustado en la zona pélvica o caderas en todo momento. Pídale a su especialista postural que le muestra la forma correcta de ajuste y uso.

- Un cinturón flojo podría permitir que el usuario se deslice y crear un riesgo de estrangulamiento.
- La liberación accidental del cinturón de soporte pélvico podría permitir el deslizamiento o caída del usuario de la silla de ruedas.
- La incapacidad de un usuario para soltarse por sí mismo puede ser peligrosa si se desliza hacia abajo o queda atrapado en la silla durante una emergencia.

Si las habilidades físicas o cognitivas del usuario le impiden utilizar este cinturón de manera segura, un cuidador debe estar presente en todo momento durante su uso. Asegúrese de que todos los cuidadores sepan ajustar y desabrochar el producto de manera correcta.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! De igual forma que con cualquier nuevo soporte para asientos, este producto puede cambiar la forma de sentarse del usuario. Los usuarios

deben continuar con sus actividades normales de alivio de presión y controles de integridad cutánea, no solo en los lugares de contacto del producto, sino también en las zonas de presión principales, como el sacro, las piernas y las nalgas. Si se produce un mayor enrojecimiento o irritación de la piel, no continúe usando el producto y consulte con su médico o especialista postural. De no hacerlo pueden producirse lesiones graves, como las escaras de decúbito.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Si se produce un incidente grave relacionado con el uso de este producto, debe informarse al fabricante (Bodypoint, Inc.) y a la autoridad local competente.

COMPROBACIONES PERIÓDICAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO:

Para garantizar la seguridad del usuario, este producto debe revisarse periódicamente para determinar su correcto funcionamiento y los signos de desgaste. Si el producto no funciona correctamente o si se encuentra un desgaste significativo en las hebillas, los puntos de montaje, la cincha, las almohadillas o las costuras, deje de usarlo y contáctese con su proveedor para que sea reemplazado o reparado por personal cualificado de Bodypoint. Este producto no debe ser modificado ni reparado por personal no cualificado bajo ninguna circunstancia: la salud y la seguridad dependen de ello.



LIMPIEZA: Lavar a máquina con agua caliente a 60 °C (140 °F). No usar lejía. Secar en secadora a baja temperatura o escurrir. No planchar. (Si coloca el producto dentro de una bolsa de tela durante el lavado ayudará a evitar rasgaduras al producto y a la propia lavadora).

RESTOS/DESECHOS: el producto está fabricado con materiales que pueden desecharse de forma segura sin tomar precauciones especiales al final de su vida útil.

GARANTÍA: Este producto tiene una garantía limitada para toda la vida por defectos de mano de obra y materiales derivados de un uso normal por el usuario original. Contáctese con su proveedor o con Bodypoint si desea realizar reclamaciones bajo garantía.


Si desea obtener más información sobre productos de Bodypoint y una lista de distribuidores fuera de EE. UU., visite la página www.bodypoint.com.



Bodypoint Europe BV
Kerkstraat, 29
7396 PD Tenwolde
The Netherlands




Producto sanitario

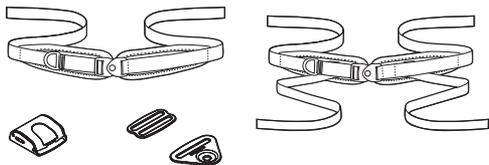


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Cinturón de soporte pélvico de dos puntos o cuatro puntos
- Juego de acoples terminales Cinch-Mount™ o Flat-Mount™ (opcionales)
- Abrazaderas FrameSaver™ (opcionales)

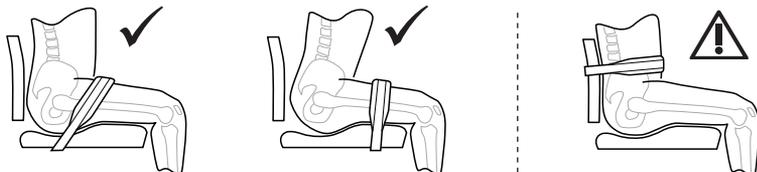


INSTALACIÓN: CINTURONES DE SOPORTE PÉLVICO DE DOS PUNTOS

1. Determine la posición y el ángulo más eficaces para el cinturón según los objetivos clínicos. Determine si es mejor para el usuario colocar la correa de tracción en el lado izquierdo o derecho.
2. Ubique los puntos de montaje deseados en el sistema de asiento o el chasis de la silla de ruedas.
3. Sujete los acoples terminales a la base rígida del asiento o al chasis de la silla de ruedas usando el herraje de montaje opcional del cinturón Bodypoint, si es necesario.
4. Centre el cinturón en el usuario, pase los extremos de la correa a través de los acoples terminales y ajuste a la longitud deseada.
5. Ajuste el cinturón hasta que quede firme.

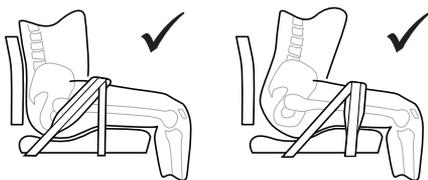

INSTALACIÓN: CINTURONES DE SOPORTE PÉLVICO DE CUATRO PUNTOS

1. Siga las instrucciones de instalación anteriores para colocar e instalar el cinturón a fin de estabilizar y posicionar al usuario.
2. Sujete las correas secundarias a la silla de ruedas para evitar que el cinturón se mueva.

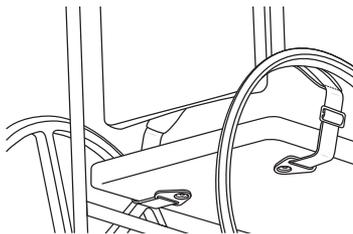

OPCIÓN DE MONTAJE DIRECTO


Los acoples terminales se pueden sujetar directamente a superficies que sean sólidas. Los tornillos de montaje deben tener una resistencia a la extracción mínima de 90 kg (200 lb). (No se incluyen en el paquete).



AJUSTE

Cuando el cinturón esté debidamente ajustado y apretado, debe quedar bien firme, sin ningún punto flojo, para que el usuario esté seguro.

Utilice la correa de tracción para los ajustes diarios, como tener en cuenta los cambios de ropa. Si se deben realizar ajustes adicionales a la longitud para conseguir que el cinturón encaje correctamente o se debe sacar el cinturón para limpiarlo, es posible hacerlo utilizando los acoples terminales del cinturón.

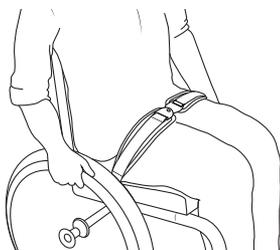

COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD

Cuando el usuario esté correctamente sentado en la silla de ruedas, pídale que se incline hacia delante y a los lados para comprobar el ajuste del cinturón. Compruebe:

1. El funcionamiento normal de la hebilla y las correas de ajuste.
2. Comodidad: busque zonas de irritación.
3. Posición: si está demasiado alto o demasiado bajo, ajuste los puntos de montaje.
4. Compruebe los movimientos de la silla en todas las direcciones, incluidos la inclinación, el plegado y el giro. Compruebe si hay interferencias y vuelva a ubicar los puntos de montaje, según sea necesario.