


Kits de montaje de joystick medio

ART NOS. PC202, PC205, PC206 & PC207

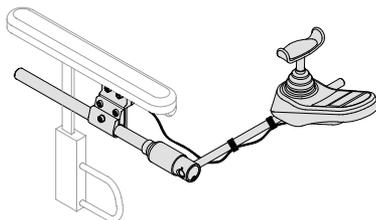

Estas instrucciones proporcionan información importante para el uso seguro y el mantenimiento de todos los kits de montaje de joystick medio de Bodypoint. Facilite estas instrucciones al usuario o a su cuidador y revíselas con ellos para garantizar su comprensión.

⚠ ¡ATENCIÓN! Apague el sistema eléctrico de la silla de ruedas antes de la instalación.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Si se produce un incidente grave relacionado con el uso de este producto, debe informarse al fabricante (Bodypoint, Inc.) y a la autoridad local competente.

MANTENIMIENTO: Para garantizar una rotación suave, el eje giratorio PC024 debe comprobarse anualmente para comprobar su lubricación deslizando hacia atrás la funda protectora de goma (manguito), como se muestra en estas instrucciones. Aplique una pequeña cantidad de grasa para rodamientos de PTFE (teflón) de viscosidad media en la ranura y deslice la funda protectora de goma de nuevo en su lugar. No es necesario realizar ningún tipo de mantenimiento en otros componentes.

COMPROBACIONES PERIÓDICAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO:

Para garantizar la seguridad del usuario, este producto debe revisarse periódicamente para determinar su correcto funcionamiento y los signos de desgaste. Si el producto no funciona correctamente o si se encuentra un desgaste significativo, deje de usarlo y contáctese con su proveedor para que sea reemplazado o reparado por personal cualificado de Bodypoint. Este producto no debe ser modificado ni reparado por personal no cualificado bajo ninguna circunstancia: la salud y la seguridad dependen de ello.

RESTOS/DESECHOS: El producto está fabricado con materiales que pueden desecharse de forma segura sin tomar precauciones especiales al final de su vida útil.

GARANTÍA: Este producto tiene una garantía limitada para toda la vida contra defectos de mano de obra y materiales derivados de un uso normal por el paciente original. Póngase en contacto con su suministrador o con Bodypoint si desea realizar reclamaciones bajo garantía.

Si desea obtener más información sobre productos de Bodypoint y una lista de distribuidores fuera de EE.UU., visite la página www.bodypoint.com.

CONTENIDO DEL PAQUETE

El paquete puede contener uno o más de los siguientes elementos:

- Abrazadera de montaje del joystick
- Eje giratorio Tri-Lock™
- Brazo medio
- Adaptador de montaje del joystick
- Palanca de liberación rápida (opcional) o un kit de montaje de joystick completo. N.º de art.: PC202-, PC205-, PC206-, PC207-



PC042



PC045




PC046




PC047



PC010

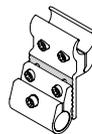

PC011

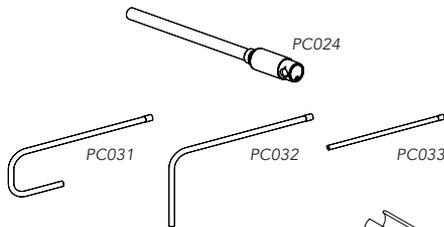

PC024

PC031

PC032

PC033

BP Bodypoint®





Bodypoint Europe BV
Kerkstraat 29
7396 PD Terwoldse
The Netherlands



Producto sanitario




ABRAZADERA DE MONTAJE DEL JOYSTICK

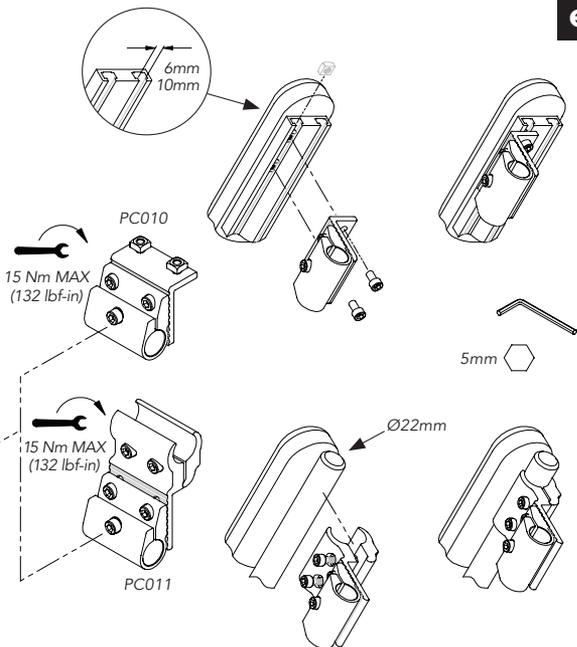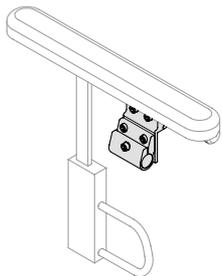

La abrazadera de montaje del joystick se puede instalar en el reposabrazos lateral derecho o izquierdo. Acople la abrazadera al reposabrazos. Coloque la abrazadera lo más adelante posible y apriétela.


Art. No. FA171

EJE GIRATORIO TRI-LOCK™

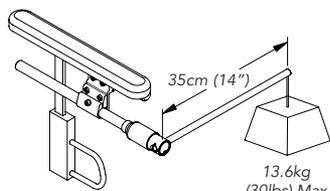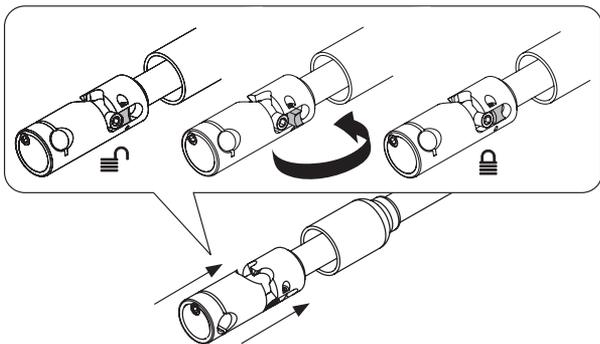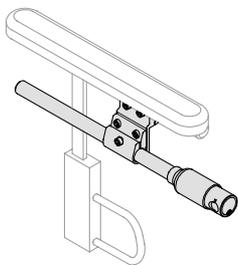

El Eje giratorio Tri-Lock es compatible con el lado derecho o izquierdo de montaje. Gire el eje de la abrazadera de montaje para asegurar la correcta posición de rotación.

El sistema de parada por volteo permite la conversión de no-bloqueado a bloqueado. La posición horizontal 0° se bloquea. Pulse el extremo para desbloquear.

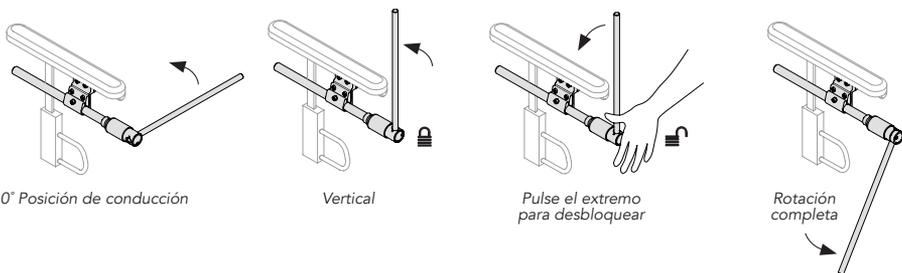



0° Posición de conducción

Vertical


Pulse el extremo para desbloquear

Rotación completa

BRAZOS MEDIOS

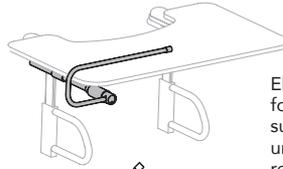
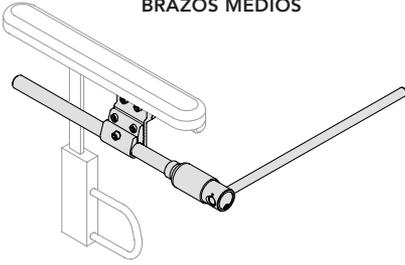


El brazo medio en forma de J permite su utilización sobre una bandeja de regazo.

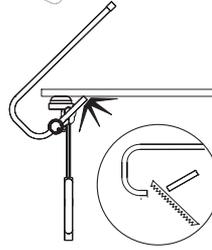

NOTA: El brazo medio se puede cortar hasta la longitud deseada con ayuda de una sierra para metales o un corta tubo.


ADAPTADORES DE MONTAJE DEL JOYSTICK

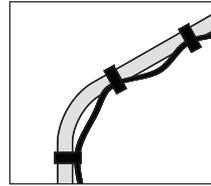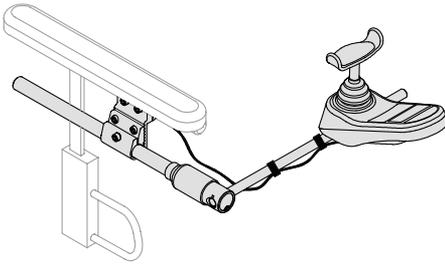

Fije los cables sueltos con los amarres de nylon incluidos.


INVACARE

Art. No. PC042

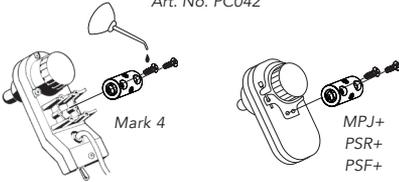



PGDT R-NET & VSI

Art. No. PC046

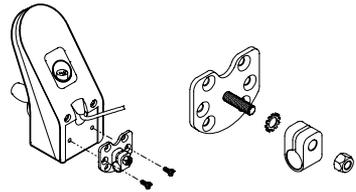

PGDT PILOT PLUS

Art. No. PC045

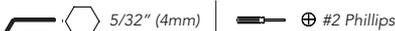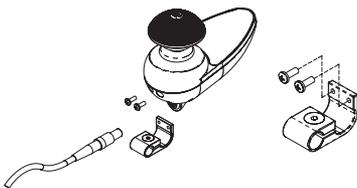

COMPACT JOYSTICKS

Art. No. PC047

