


Mango de Palanca de Control

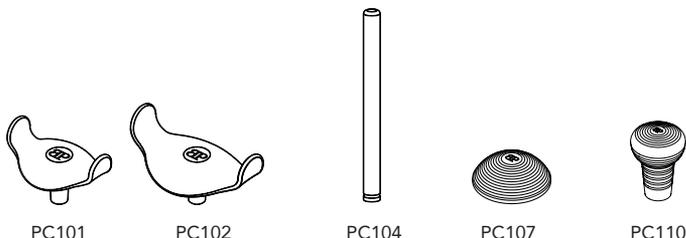

Los mangos de la palanca de control están diseñados con ejes flexibles que encajan firmemente en los vástagos de la palanca de control de 5 mm (3/16") o 6,4 mm (1/4"). Todos los mangos de las palancas de control de Bodypoint con ejes flexibles, debido a su diseño, girarán o se deslizarán hacia afuera del vástago de la palanca de control de acero si se someten a una tracción indebida. Esto está previsto para evitar que se produzcan daños en la caja de la palanca de control. No se recomienda alterar el producto para anular esta función.

⚠️ ¡ADVERTENCIA! Si se produce un incidente grave relacionado con el uso de este producto, debe informarse al fabricante (Bodypoint, Inc.) y a la autoridad local competente.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Limpie el vástago de la palanca de control de metal para eliminar la suciedad o el aceite.
2. Humedezca el vástago de la palanca de control de metal para facilitar el montaje del mango.
3. Agarre el vástago de la palanca de control de metal cerca de la base con alicates para evitar empujarlo e introducirlo en los componentes eléctricos sensibles de la caja de la palanca de control.
4. Presione el mango de la palanca de control en el vástago de metal de ésta con un movimiento de giro.

MANTENIMIENTO: Todas las palancas de mando de eje flexible se pueden limpiar con jabón para vajillas y agua o alcohol. Para una desinfección completa, la palanca de control se puede retirar de la silla de ruedas y limpiarse a 60 °C en una lavadora o lavavajillas (evite los ciclos de secado a mayor temperatura).

COMPROBACIONES PERIÓDICAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO:


Para garantizar la seguridad del usuario, este producto debe revisarse periódicamente para determinar su correcto funcionamiento y los signos de desgaste. Si el producto no funciona correctamente o si se encuentra un desgaste significativo, deje de usarlo y contáctese con su proveedor para que sea reemplazado o reparado por personal cualificado de Bodypoint. Salvo como se indica para el PC110, este producto no debe ser modificado ni reparado por personal no cualificado bajo ninguna circunstancia: la salud y la seguridad dependen de ello.

RESTOS/DESECHOS: El producto está fabricado con materiales que pueden desecharse de forma segura sin tomar precauciones especiales al final de su vida útil.

GARANTÍA: Este producto tiene una garantía limitada para toda la vida contra defectos de mano de obra y materiales derivados de un uso normal por el paciente original. Póngase en contacto con su suministrador o con Bodypoint si desea realizar reclamaciones bajo garantía.



Indicador de tamaño en la parte inferior

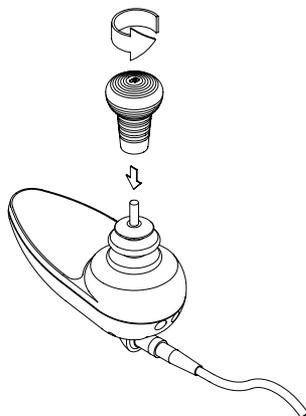

MODIFICACIONES DE PC110

El mango se puede recortar con un cuchillo filoso (gire para cortar para obtener mejores resultados) a una altura mínima de 28 mm (1-1/8").



Bodypoint Europe BV
Kerkstraat 29
7336 PD Tenwolde
The Netherlands



Producto sanitario