


Arnés para hombro Stayflex™

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y PARA EL USUARIO

SH350, SH351, SH360, SH361

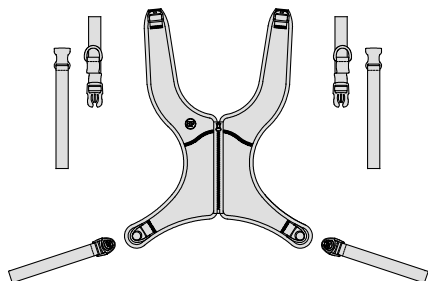

CONTENIDO DEL PAQUETE:

El paquete puede contener uno o más de los siguientes elementos:

- Arnés para hombro Stayflex
- Correas superiores multidireccionales
- Accesorios Cinch-Mount o Flat-Mount
- Hebillas (Opcional. Art. N° F5032-2)



Estas instrucciones proporcionan información importante para el uso seguro y el mantenimiento de todos los soportes para el tronco anterior Stayflex™ de Bodypoint. Facilite estas instrucciones al usuario o a su cuidador y revíselas con ellos para garantizar su comprensión.

⚠ ADVERTENCIA: El producto debe ser instalado y colocado por un técnico de rehabilitación cualificado.

Para su instalación, este producto debe montarse con:

- Acoples terminales Flat-Mount
- Acoples terminales Cinch-Mount
- Hebilla de leva (adecuada para usuarios de hasta 75kg)

El herraje de montaje opcional del cinturón Bodypoint puede utilizarse para sillas de ruedas y sistemas de asiento.

⚠ ADVERTENCIA: Debido al riesgo de estrangulación, es peligroso usar este producto sin estabilizar la pelvis. Utilícelo siempre con un soporte adecuado para la pelvis.

USO PREVISTO:

⚠ ADVERTENCIA: Este producto solo debe usarse para colocar a una persona en la silla de ruedas o de trabajo. NO debe usarse como dispositivo de seguridad para transporte, ni como dispositivo de restricción personal o en cualquier otra aplicación en la que su mal funcionamiento podría causarles lesiones a la persona. El uso inapropiado de este producto no está autorizado y además es inseguro.

⚠ ADVERTENCIA: Este soporte anterior para tronco debe ajustarse correctamente para brindar soporte al tronco y los hombros del usuario sin causar lesiones. Pídale a su especialista postural que le muestre la forma correcta de ajuste y uso.

- Si está demasiado ajustado puede limitar la respiración y aumentar la presión en los hombros y el pecho.
- Si está demasiado flojo podría permitir que el usuario se deslice y crear un riesgo de estrangulamiento.
- El desenganche accidental de este producto puede causar que el usuario se caiga hacia adelante.
- La incapacidad de un usuario para soltarse por sí mismo puede ser peligrosa si se desliza hacia abajo o queda atrapado en la silla de ruedas durante una emergencia.

Si las habilidades físicas o cognitivas del usuario podrían impedirle utilizar este producto de manera segura, un cuidador debe estar presente en todo momento durante su uso. Asegúrese de que todos los cuidadores sepan ajustar y desabrochar el producto de manera correcta.

⚠ ADVERTENCIA: Al igual que cualquier soporte de asiento nuevo, este producto puede cambiar la manera de sentarse de una persona. Los usuarios deben continuar practicando actividades de alivio de presión regulares y comprobaciones de integridad de la piel, no sólo donde este producto esté en contacto con el usuario, sino también en áreas de presión de apoyo principales, tales como el sacro, piernas y nalgas. Si se producen eritemas o irritaciones de la piel, interrumpa el uso y consulte a su médico o fisioterapeuta. En caso de no hacerlo, puede ocasionar lesiones graves tales como úlceras por presión.

⚠ ADVERTENCIA: Si se produce un incidente grave relacionado con el uso de este producto, debe informarse al fabricante (Bodypoint, Inc.) y a la autoridad local competente.

COMPROBACIONES PERIÓDICAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO:

Para garantizar la seguridad del usuario, este producto debe revisarse periódicamente para determinar su correcto funcionamiento y los signos de desgaste. Si el producto no funciona correctamente o si se encuentra un desgaste significativo en las hebillas, los puntos de montaje, la cincha, las almohadillas o las costuras, deje de usarlo y contáctese con su proveedor para que sea reemplazado o reparado por personal cualificado de Bodypoint. Este producto no debe ser modificado ni reparado por personal no cualificado bajo ninguna circunstancia: la salud y la seguridad dependen de ello.



☼ LIMPIEZA: En lavadora, agua caliente 60° C (140° F). No usar lejía. Secado en secadora a baja temperatura, o tendida. No planchar. (Si coloca el producto dentro de una bolsa de tela durante el lavado ayudará a evitar arañazos al producto y a la propia lavadora).

RESTOS/DESECHOS: El producto está fabricado con materiales que pueden desecharse de forma segura sin tomar precauciones especiales al final de su vida útil.

GARANTÍA: Este producto tiene una garantía limitada de por vida contra defectos de mano de obra y materiales derivados de un uso normal del paciente original. Póngase en contacto con su proveedor o con Bodypoint si desea realizar reclamaciones por la garantía.




Si desea obtener más información sobre productos de Bodypoint y una lista de distribuidores fuera de EE.UU., visite www.bodypoint.com.



Bodypoint Europe BV
Kerkstraat 29
7396 PD Tenwolde
The Netherlands



Producto
sanitario

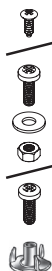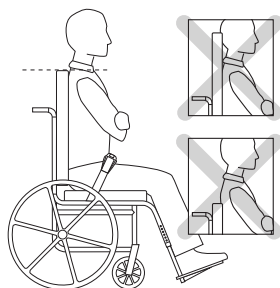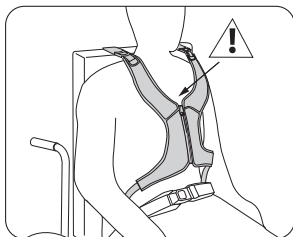

Ø 3/16-1/4"
(5-6mm)




INSTALACIÓN

Siente al usuario en la silla de ruedas y establezca la postura correcta con la correa de soporte de la pelvis. Coloque la almohadilla Stayflex sobre el pecho y las correas superiores sobre el respaldo. Coloque las correas entre el cuello y la articulación del hombro.

⚠ La parte superior de la cremallera no debe sobrepasar el esternón del usuario.





REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN:

1. Silla de ruedas con un respaldo sólido o guías de correa colocadas aproximadamente a la altura del hombro (ajuste hacia arriba/abajo para distribuir la presión)
2. Los tornillos de montaje deben tener una resistencia mínima de 90kg (200lbs). No incluidos en el paquete.

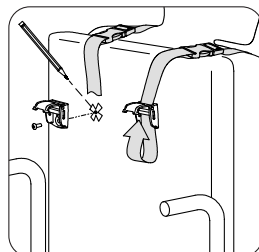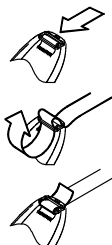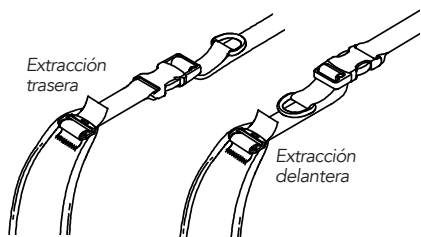

CORREAS SUPERIORES



1. Determine la dirección de tracción deseada y ajuste la correa superior al arnés.
2. Ajuste cada correa del hombro para que quede cómoda, según el ancho de hombro del usuario y su posición de sentado. Marque el respaldo para los tornillos de montaje.
3. Fíjelo al respaldo usando sujetadores y acoples terminales de Bodypoint apropiados.

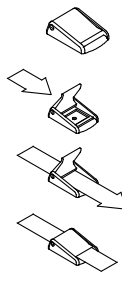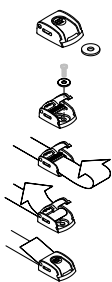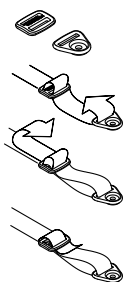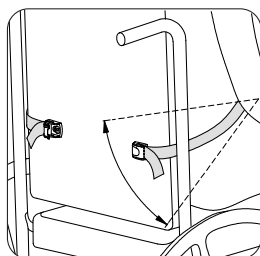

Hebillas
(Opcional)
adecuada para
usuarios de
hasta 75kg.

CORREAS INFERIORES

Enrole las correas inferiores alrededor del respaldo sin obstruir los otros dispositivos de la silla de ruedas. Monte los acoples terminales entre la zona más baja de las costillas y el asiento. Fíjelos usando sujetadores apropiados.

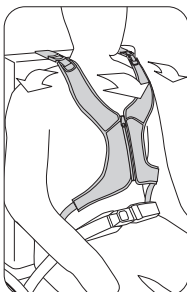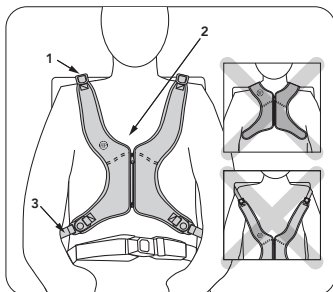

COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD

Haga que el usuario se incline hacia adelante y hacia los lados para comprobar el ajuste. Compruebe:

1. **La comodidad:** en el caso de que roce el cuello, vuelva a colocar las correas superiores.
2. **La posición:** si está demasiado alta o demasiado baja, ajuste las correas inferiores.
3. **La interferencia con otros dispositivos:** cambie la posición de las correas si es necesario para que no interfieran con el mecanismo de inclinación del asiento, de los reposabrazos, de los accesorios almohadillados o los tubos para la alimentación.