



HAMACA DE BAÑO **FOKA™**



MANUAL DE USUARIO





El fabricante se responsabiliza del uso correcto del dispositivo solo cuando el producto ha sido comprado por un especialista calificado en el distribuidor oficial.


REH4MAT Sławomir Wroński se reserva el derecho de introducir cambios técnicos y comerciales en el contenido de las instrucciones sin previo aviso.



El producto marcado con el signo CE es un producto sanitario de Clase I, de la regla 1, de acuerdo con los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 Abril de 2017 sobre los productos sanitarios.



REH4MAT Sławomir Wroński introduce el sistema de gestión de calidad ISO 13485 con respecto a la producción, las ventas y el servicio. El sistema está certificado por Det Norske Veritas.

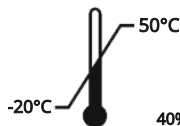

ÍNDICE

1. Propósito del manual.....	5
2. Indicaciones y contrindicaciones de uso.....	5
3. Características generales.....	6
3.1. Equipamiento estándar.....	6
3.2. Accesorios.....	6
4. Tabla de medidas.....	7
5. Descripción detallada de como aplicar la tapicería de tumbona.....	8
6. Cómo usar la silla de baño.....	11
6.1 El ajuste del asiento infantil para niños.....	11
6.2 Ajuste de la profundidad de asiento.....	13
6.3 Tapizar.....	14
7. Accesorios.....	14
7.1 AKS_806 Cinturón pélvico.....	14
7.2 AKS_805 Soporte pélvico.....	15
7.3 AKS_807 Taco abductor.....	15
8. Cómo instalar el cojín BodyMap®.....	16
9. Uso del producto.....	18
10. Reglas de seguridad.....	19
11. Mantenimiento y limpieza.....	21
12. Etiquetado.....	23

INTRODUCCIÓN

La hamaca de baño infantil **FOKA™** es muy útil al cuidar a niños discapacitados. El uso del producto hace que el baño sea más fácil por el hecho de que el niño está asegurado y así no puede sufrir ninguna lesión. Además, los padres pueden realizar todas las actividades de baño por sí solos. El niño se adapta a una posición estable y cómoda gracias a la cual es más fácil bañarse.

La hamaca de baño infantil **FOKA™** está hecha de tubos de aluminio y su construcción es neutral para la influencia nociva del agua. También está equipada con un ajuste del ángulo de inclinación con respecto al reposapiés, el asiento y el respaldo, lo que permite ajustar el producto a las necesidades del niño.

La tapicería está hecha de una red de poliamida que no absorbe la influencia del agua. También está equipada con un soporte ajustable para la cabeza, el tronco y los pies que protege al niño cuando experimenta movimientos involuntarios. La construcción del producto es simple, lo que hace que el producto sea fácil de usar al bañarse. Se adapta fácilmente a la bañera estándar y, además, se ajusta a las necesidades del niño. Es posible ajustar la tapicería con la ayuda de cinturones estabilizadores. Se puede bajar la parte superior de la silla de baño, lo que puede ser útil al lavar el cabello del niño. La hamaca de baño está equipada con fundas de espuma que protegen la bañera contra daños mecánicos.



Antes de utilizar el producto, el usuario debe familiarizarse con el manual de usuario.

Recuerde que el cumplimiento de las directrices es muy importante. Se garantiza la seguridad y se extiende durabilidad, así como la estética del dispositivo.

1. PROPÓSITO DEL MANUAL



Antes de usar el producto, el usuario está obligado a familiarizarse con el manual del usuario.

Este manual contiene la información necesaria para el uso correcto de la hamaca para baño **FOKA™**, la preparación del dispositivo antes del uso, el mantenimiento y la limpieza, así como las condiciones de garantía.

El Manual debe mantenerse en un lugar de fácil acceso. El manual está dirigido a los padres, médicos y fisioterapeutas que atienden directamente a los niños discapacitados.

Recuerde que seguir las reglas del manual permite un uso seguro del producto, su vida útil prolongada y su estética.

2. INDICACIONES Y CONTRINDICACIONES DE USO

Propósito previsto del producto, pensado para:

Personas con discapacidad (niños/adolescentes) con parálisis cerebral, distrofia muscular, espina bífida, lesiones medulares y déficits neurológicos.

Indicaciones:

- Parálisis cerebral (PC);
- Distrofia muscular;
- Espina bífida;
- Otras enfermedades neurológicas con déficit de movimiento en forma de parálisis y paresia de las extremidades y/o tronco.

Contraindicaciones:

- La colocación incorrecta de la persona con el uso de productos de baño puede provocar la deformación de las articulaciones, y mantener a la persona en este producto durante mucho tiempo aumenta significativamente el riesgo de úlceras por presión.
- Máx. peso del usuario: talla 0 - 25 kg, talla 1 - 30 kg, talla 2 - 50 kg, talla 3 - 75 kg.


3. CARACTERÍSTICAS GENERALES

3.1 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

1. Chasis
2. Reposacabezas
3. Soporte de tronco
4. Tapicería que no absorbe el agua
5. Apoyo de pierna



3.2 ACCESORIOS

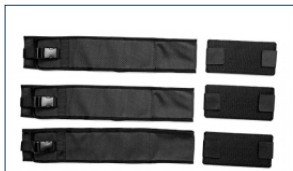

Conjunto de adaptación Base con ruedas utilizado para ensamblar el cojín BodyMap®



Cojín BodyMap® K



Base con ruedas AKVO™



Soporte pélvico




Cinturón pélvico



Taco abductor

4. TABLA DE MEDIDAS

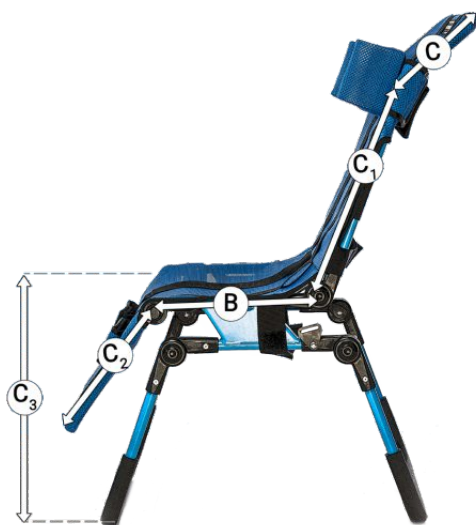

Símbolo	Medición	Unidad	Talla 0	Talla 1	Talla 2	Talla 3
A	Ancho silla	[cm]	37	42	45	50
B	Profundidad silla	[cm]	23 - 28	28 - 33	32 - 40	37 - 50
C	Altura reposacabezas	[cm]	16	16	19	23
C ₁	Altura respaldo	[cm]	31	40	44	50
C ₂	Altura reposapiernas	[cm]	26	31	36	41
C ₃	Altura de suelo a asiento	[cm]	11 - 44	11 - 44	13 - 49	15 - 54
	Ángulo del reposapiés (respecto al asiento)	[°]	90 - 180	90 - 180	90 - 180	90 - 180
	Ángulo de inclinación del respaldo (respecto al asiento)	[°]	90 - 180	90 - 180	90 - 180	90 - 180
	Ángulo del reposacabezas (respecto al respaldo)	[°]	205	205	205	205
	Peso máximo usuario	[kg]	25	30	50	75
	Altura aproximada del usuario*	[cm]	< 100	100 - 120	120 - 140	130 - 170

PESO Y DIMENSIONES DEL DISPOSITIVO

Medición	Unidad	Talla 0	Talla 1	Talla 2	Talla 3
Ancho producto	[cm]	42	42	45	50
Ancho con hamaca plegada	[cm]	42	42	45	50
Largada del producto	[cm]	70	75	91	97
Longitud con hamaca plegada	[cm]	64	67	76	88
Altura producto	[cm]	80	85	96	113
Altura con hamaca plegada	[cm]	28	28	29	31
Peso del producto	[kg]	4	4,5	5	8

Nota: La tolerancia dimensional en la tabla es +/- 1 cm.

Nota: valores aproximados, en función de la configuración del producto.

* El valor no puede ser el factor principal para la selección del tamaño del producto.

5. DESCRIPCION DETALLADA DE COMO APLICAR LA TAPICERIA DE TUMBONA

MARCO DE LA TUMBONA DE BANO



REPOSACABEZAS




TAPICERÍA



Para poner la tapicería en el chasis primero debes:

- presionar las juntas (G y F) al mismo tiempo, ajustar el ángulo entre el respaldo y el reposapiés (de acuerdo con la figura 1),
- insertar la parte superior de la tapicería en el marco del soporte de la espalda (figuras 2, 3),
- empuje la parte inferior de la tapicería sobre estructura del reposapiés (figura 4),

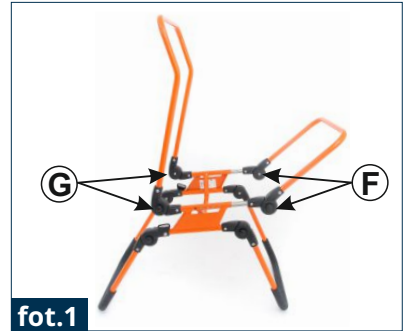

fot.1



fot.2



fot.3



fot.4

- sujete todas las correas con cierres de velcro desde la parte inferior de la tumbona (figuras 5, 6). Tenga en cuenta que las correas deben cubrir la estructura del asiento.



fot.5



fot.6

Para montar el estabilizador de cabeza debe:

- elija la altura adecuada del estabilizador en el respaldo de la tumbona,
- a continuación, usando correas con cierres de velcro, sujete el estabilizador en la parte posterior de la tumbona (fig. 7, 8),



fot.7



fot.8

- tumbona con tapicería ajustada a la posición utilizable (fig.9).



fot.9



Se recomienda utilizar el producto bajo la ducha.

No haga ajustes mientras la silla de baño esté mojada.

No realice ajustes mientras haya un usuario en la silla, ya que podría dañar los reguladores.

6. CÓMO USAR LA SILLA DE BAÑO

6.1 EL AJUSTE DEL ASIENTO INFANTIL PARA NIÑOS

Es necesario usar juntas especiales para ajustar el asiento infantil para baño **FOKA™**. Es posible ajustar las siguientes partes del asiento infantil para baño **FOKA™**:

REPOSACABEZAS



REPOSAPIÉS



EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL ASIENTO



Todos los asientos infantiles de baño **FOKA™** estandar estan equipados con soporte para la cabeza, cinturon estabilizador de tronco y cinturones de estabilizacion de pies. Todas estas partes aseguran al paciente mientras usa el producto. Siga estos pasos mencionados a continuacion para usar el producto:

PASO 1. Fije la correa con los pelottes de estabilización de la cabeza a la altura elegida. La correa debe sujetarse en la parte posterior

La distancia de pelottes se puede ajustar.



PASO 2. Fije la correa estabilizadora del tronco. La correa se sujeta con la ayuda de cintas de velcro y se puede fijar a cualquier altura. Es necesario enhebrar la correa a través de arandelas que se encuentran en el respaldo o en el asiento. A continuación, abroche el cinturón.



PASO 3. Fije los cinturones de estabilización de los pies. Los cinturones se sujetan con la ayuda de cintas de velcro y se pueden fijar a cualquier altura. Es necesario enhebrar las correas a través de arandelas que se encuentran en el reposapiés. A continuación, sujete los cinturones.



6.2 AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE ASIENTO

Para ajustar la profundidad del asiento, es necesario presionar los botones en ambos lados al mismo tiempo.



6.3 TAPIZAR

La tensión de la tapicería se puede ajustar fácilmente mediante correas con Velcros que se encuentran debajo de la silla.

7. ACCESORIOS

7.1 AKS_806 CINTURÓN PÉLVICO

El cinturón garantiza un nivel adecuado de estabilidad y seguridad mientras está sentado en el asiento. Para colocar el cinturón, la correa inferior con hebillas debe colocarse debajo del asiento y luego abrocharse.



correa inferior con hebillas



Inserte las dos correas laterales en los reguladores como se explica abajo. El cinturón correctamente conectado se muestra en la última imagen.




correas laterales con reguladores





7.2 AKS_805 SOPORTE PÉLVICO

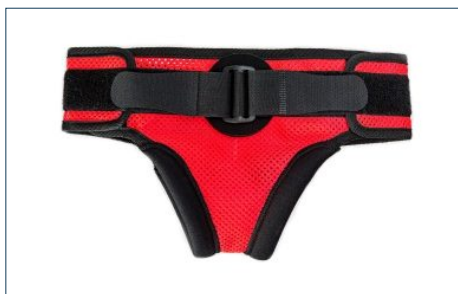

Monte el soporte pélvico en el **FOKA™** de la misma manera que las correas laterales con reguladores que forman parte del cinturón pélvico (fotos de arriba).

7.3 AKS_807 TACO ABDUCTOR




8. CÓMO INSTALAR EL COJÍN BODYMAP®

Todos los cojines BodyMap® son impermeables y altamente recomendados, por lo que se recomienda utilizarlos junto con la hamaaca infantil para baño **FOKA™** para mejorar la posición vertical y asegurar al paciente mientras realiza actividades de enfermería.

Por favor, siga los pasos mencionados a continuación para instalar el cojín BodyMap®:

PASO 1. Desmontar el soporte de la cabeza, la correa estabilizadora del tronco y los cinturones de estabilización de los pies.

PASO 2. Fije los cojines BodyMap® con la ayuda del juego de fijación que se incluye en el equipamiento opcional. Cada conjunto está equipado con cinturón pelvico-muslo, dos cinturones anchos que estabilizan al paciente y tres cintas de Velcro que se utilizan para colocar el cojín BodyMap en el asiento.

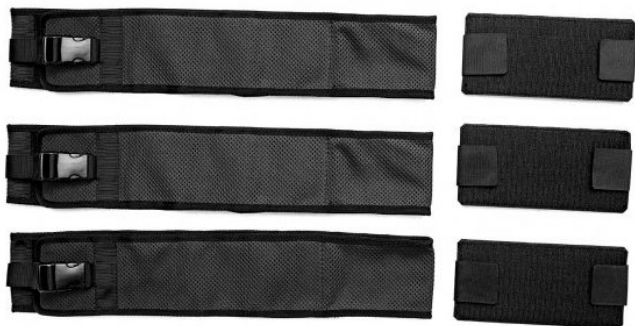

Antes de fijar el cojín BodyMap® en ambos asientos, es necesario ensamblar Velcros especiales en la parte inferior, media y superior del asiento. La superficie autoadhesiva del cojín BodyMap® permite fijarlo rápidamente en el asiento del baño.



PASO 3. Luego arregle los cinturones estabilizando al paciente. Los cinturones se sujetan con cintas de Velcro y hebillas. A continuación, puede ver el proceso de ensamblaje.



PASO 4. Para arreglar el cojin BodyMap®, es necesario desabrochar las correas estabilizadoras. Coloque el cojin sobre la hamaca de forma que su superficie autoadhesiva toque la tapiceria del asiento del baño. A continuación, coloque al paciente sobre el cojin y ajuste los cinturones estabilizadores. Recuerde que el cojin BodyMap® debe estar configurado de acuerdo con el cuerpo del paciente porque solo entonces el cojin estabiliza correctamente al paciente al sentarse. Familiarícese con las directrices sobre la configuración de los cojines que se incluyen en el Manual del usuario para los cojines.



9. USO DEL PRODUCTO



El producto debe ser utilizado de conformidad con las pautas incluidas en este manual de usuario y con personal capacitado.

¡Antes de cada uso, no es necesario preparar al paciente y al dispositivo!

Siga estos pasos antes de utilizar el producto:

- despliegue el dispositivo,
- coloque el dispositivo en una superficie plana, sin pendientes,
- asegúrese de que todas las piezas estén en buen estado, montadas correctamente y sean estables,
- ajuste el asiento del baño y el reposacabezas a las medidas del paciente,
- desate la correa de estabilización del tronco y los cinturones de estabilización de los pies,
- coloque al paciente en la hamaca y sujételo con un juego de correas del equipo estándar.

Si el producto se usa junto con el cojín BodyMap; primero fije el cojín en la silla de baño con el conjunto de fijación y luego dele forma según el cuerpo del paciente.



Se recomienda utilizar el producto bajo la ducha.

No haga ajustes mientras la silla de baño esté mojada.

No realice ajustes mientras haya un usuario en la silla, ya que podría dañar los reguladores.

Antes de usar, recuerde asegurarse de que todas las correas y el bloqueo estén correctamente ajustados y sujetos.

Nuestro dispositivo funciona correctamente solo cuando el producto se ajusta de acuerdo con la altura y el peso del paciente. Recuerde tener en cuenta todas estas medidas al comprar el producto.

El ajuste correcto de la hamaca es muy importante para que el producto se utilice de forma seguro.

Está prohibido obligar al niño a mantener una posición específica porque se sentirá incómodo y puede llevar a una postura incorrecta.

10. REGLAS DE SEGURIDAD



El asiento infantil para baño **FOKA™** debe usarse de acuerdo con las pautas descritas en el manual de instrucciones.

Es muy importante consultar a un médico o fisioterapeuta para tomar una decisión correcta sobre la elección la hamaca infantil de baño **FOKA™** y su tamaño. Es esencial familiarizarse con las pautas descritas en el manual de instrucciones antes de usar el dispositivo.

1. Antes de usar el producto, es esencial asegurarse de que:
 - asegúrese de que no haya daños que puedan poner en peligro la vida del paciente. Asegúrese de que todas las piezas funcionen correctamente y estén montadas correctamente. Además, asegúrese de que no haya grietas ni deformidades,
 - asegúrese de que todos los tornillos, tuercas y otras partes roscadas, pegadas y cosidas, estén bien apretadas,
 - asegurarse de que las hebillas funcionen correctamente,
 - utilice cinturones estabilizadores siempre: las cintas de velcro de estos cinturones deben superponerse min. 8cm,
 - ajustar el producto a las medidas del paciente, así como a las necesidades,
 - asegure al paciente con la ayuda del reposacabezas, la correa estabilizadora del tronco y los cinturones de estabilización de los pies. Es necesario debido a que protege al paciente contra caídas del dispositivo.
2. Está prohibido usar una hamaca de baño para fines diferentes a los previstos.
3. Está prohibido usar una hamaca de baño si se destruye o si falta alguna pieza.
4. Está prohibido dejar al paciente desatendido.
5. Está prohibido usar el producto sin personal capacitado o personal médico.
6. Es necesario doblar y asegurar la hamaca durante el transporte, para evitar posibles daños. El fabricante no se hace responsable de los daños que puedan aparecer debido a una preparación inadecuada del dispositivo durante el transporte.

7. El producto, así como la tapicería, están fabricados con materiales de propagación de llamas limitados, sin embargo, está prohibido colocar el producto cerca del fuego o a altas temperaturas. La hamaca no puede almacenarse ni utilizarse en habitaciones con mucha humedad.



Un ajuste incorrecto del producto puede provocar efectos secundarios como desmayos, deformidades corporales, sobrecarga de las articulaciones, etc. Si se presentan los síntomas antes mencionados, deje de usar el producto inmediatamente, saque al usuario del producto y recuéstelo. Si los síntomas indeseables persisten, comuníquese con un médico de inmediato. Si los síntomas han desaparecido, informe al médico tratante sobre este hecho para tomar una decisión sobre el proceso de rehabilitación posterior.

Los incidentes graves relacionados con este dispositivo deben informarse tanto al fabricante como a la autoridad competente de su país.

Se recomienda utilizar el producto bajo la ducha.

No haga ajustes mientras la silla de baño esté mojada.

No realice ajustes mientras haya un usuario en la silla, ya que podría dañar los reguladores.

El producto contiene piezas pequeñas que los niños pueden tragarse.

Esta prohibido realizar cambios en la estructura del asiento, debido a que es peligroso y ocasiona la pérdida de la garantía.

Esta prohibido exceder la carga de peso permitida durante el uso del producto. Toda la información relacionada con la carga de peso se describe en la placa de identificación. Además, puede familiarizarse con la tabla que puede encontrar en este Manual de usuario en la página 7.

El asiento infantil para baño **FOKA™** debe usarse de acuerdo con las pautas descritas en el manual de instrucciones.

11. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La hamaca infantil para baño **FOKA™** debe mantenerse limpia y usarse cumpliendo con las recomendaciones del fabricante. El dispositivo debe mantenerse en una habitación limpia, seca y ventilada. El mantenimiento y la limpieza deben realizarse al menos una vez al mes. La limpieza regular y el mantenimiento de la hamaca de baño para niños son indispensables para mantener su correcta funcionalidad y seguridad.

Es muy recomendable realizar un mantenimiento adecuado para conservar bien el producto a nivel estético. Para hacer eso, es esencial cumplir con estas pautas:

- es posible limpiar la tapicería con una lavadora. La temperatura máxima es de 60 grados,
- esta prohibido limpiar el tapizado por medio de solventes y productos químicos causticos,
- en caso de desinfección de la tapicería, use productos que estén destinados a ella,
- no echarle cloro,
- no planchar,
- seque lejos del fuego.



El fabricante no se responsabiliza por los daños causados por el uso de un producto químico incorrecto.

El fabricante solo se responsabiliza por defectos latentes o daños que aparecieron a pesar de que el usuario cumplió con las pautas.

Si aparece algún daño, es necesario contactar al vendedor autorizado que le vendió el producto.



INSPECCIÓN TÉCNICA

Las inspecciones técnicas deben realizarse con regularidad. Antes de realizar el mantenimiento, el producto debe limpiarse a fondo para revelar cualquier daño oculto.

Frecuencia	¿Qué debería comprobarse?	¿Qué debería realizarse?	Observaciones
Antes de cada uso.	Estado general del producto.	Comprobar: <ul style="list-style-type: none"> todo el producto en busca de cualquier daño visible, grietas o defectos mecánicos, si el producto está completo, si todos los pernos, tornillos, palometas, tuercas y otros elementos de la construcción están completos y apretados. 	En caso de cualquier daño o defecto, suspenda el uso del producto y comuníquese con su Proveedor / Distribuidor o el Fabricante.
	Fijación de los elementos constructivos.	Verifique todos los mecanismos del producto y sus partes móviles. Compruebe en particular: <ul style="list-style-type: none"> si el asiento está correctamente montado (si es el caso), si las ruedas están montadas correctamente (si es el caso), si los elementos que aseguran al usuario están correctamente montados y si funcionan bien (si es el caso), si todas las partes móviles están completas, funcionan correctamente, no se atascan, si los mecanismos de ajuste de los siguientes elementos funcionan correctamente (si es el caso): reposacabezas, respaldo, asiento, taco abductor, reposabrazos, reposapiés. 	En caso de cualquier daño o defecto, suspenda el uso del producto y comuníquese con su Proveedor / Distribuidor o el Fabricante.
	Elementos de tapicería.	Comprobar: <ul style="list-style-type: none"> si hay daños, roturas, rasgaduras, costuras deshechas o deformaciones en los elementos de tapicería, si las correas estabilizadoras, los chalecos o los cinturones de seguridad no están deshilachados o torcidos y si las hebillas funcionan correctamente, si las correas estabilizadoras, chalecos o cinturones de seguridad funcionan correctamente y no se desabrochan bajo presión o al tirar de ellos. 	En caso de cualquier daño o defecto, suspenda el uso del producto y comuníquese con su Proveedor / Distribuidor o el Fabricante.
Una vez por semana.	Limpieza del producto.	Si el chasis y la tapicería se ensucian (polvo, barro, etc.) durante el uso diario, límpielos con un paño húmedo sin detergentes. Elimine la suciedad (p. ej., pelo, restos de comida, etc.) de las partes móviles del producto.	El producto debe limpiarse cuando sea necesario, pero al menos una vez a la semana. No utilice limpiadores a base de cloro ni alcohol metilado. Antes de usar el producto, verifique que la tapicería esté seca.
Una vez al mes.	Conectores de construcción de productos (soldadura, roscado).	Comprobar: <ul style="list-style-type: none"> el estado del chasis del producto en los sitios de unión (soldaduras, hilos). 	En caso de cualquier daño o defecto, suspenda el uso del producto y comuníquese con su Proveedor / Distribuidor o el Fabricante.

Frecuencia	¿Qué debería comprobarse?	¿Qué debería realizarse?	Observaciones
Una vez cada 6 meses.	Piezas móviles de construcción.	Comprobar: • si las partes móviles de la construcción no han sido dañadas. Manténgalos utilizando un producto de limpieza adecuado.	En caso de cualquier daño o defecto, suspenda el uso del producto y comuníquese con su Proveedor / Distribuidor o el Fabricante.
	Etiquetado de productos.	Comprobar: • si el marcado y las etiquetas son legibles.	En caso de cualquier daño o defecto, suspenda el uso del producto y comuníquese con su Proveedor / Distribuidor o el Fabricante.

La lista de todas las piezas de repuesto está disponible para descargar en www.reh4mat.com, una vez seleccionado el producto.

12. ETIQUETADO

	Declaración de que el producto cumple con los
	Número de catálogo
	Número de serie
	Lea las instrucciones del manual antes de usar
	Debe tomar precauciones especiales
	Fabricante
	Fecha de producción
	El producto no contiene látex
	Guardar en lugar seco
	Producto médico

	Secar verticalmente
	No clorar
	No planchar
	No secar en secadora de tambor
	No usa blanqueador
	¡Cuidado! Contenido delicado
	Proteger de la luz solar
	Limitación de la temperatura de almacenamiento
	Almacenamiento de humedad relativa



FABRICANTE DE DISPOSITIVOS ORTOPÉDICOS



36-060 Głogów Małopolski, ul. Piaski 47, POLAND

ul. Truskawkowa 17, Widna Góra, 37-500 Jarosław, POLAND

tel. +48 (016) 621 42 20

tel. +48 (016) 621 41 35, fax.: +48 (016) 621 42 13

E-mail address:

biuro@reh4mat.com

www.reh4mat.com

Fecha de emisión: 13.04.2015

Última actualización: 11.05.2022



REH4MAT se reserva el derecho de introducir cambios técnicos y comerciales en el contenido de las instrucciones sin previo aviso.