

Dando forma a una vida mejor

xeds

Kit de Sistema de Forma Tesselada

1250-3959-000



Instrucciones en el reverso

Spex Ltd
fasterrresults@spexseating.com
32 Detroit Drive, Rolleston 7675, New Zealand
Call +643 307 9790 Fax +643 307 2820
www.spexseating.com
Manual: TSS20220208_ES

Manual de Instalación y Uso

1. Si un tablero base se ha ordenado con tu Kit de posicionamiento teselado, colocar este detrás del cojín de respaldo (delante de la armazón del asiento).

2. Apila y configura las formas según las necesidades del usuario.

3. Diferentes densidades de gomaespuma son codificadas por colores para una fácil aplicación.

(A) Azul = Densidad Firme

(B) Blanco = Densidad Media

(C) Gris = Densidad Blanda

4. Una vez que las formas están en la posición deseada, las tiras de fijación Velcro **(D)**, se pueden utilizar para mantener formas juntas y parejas sobre el contorneado.

5. Reemplazar la tapicería y funda de la gomaespuma del respaldo y verificar la postura general del cliente una vez sentado(a) y completado el posicionamiento.

6. Cuando se guarden las formas no utilizadas asegúrese de que las superficies blandas de las formas sean colocadas juntas para permitir una separación fácil de nuevo.

