


Guías de Correas Del Arnés Para Hombro

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y PARA EL USUARIO

ART NOS. HW100-150, HW100-200, HW105S, HW105L

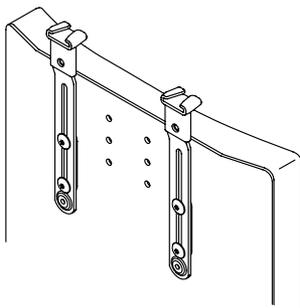

Estas instrucciones proporcionan información importante para el uso seguro y el mantenimiento de todas las guías de correas del arnés para hombro de Bodypoint. Entregue estas instrucciones al usuario o a la persona que le atiende y revíselas para asegurarse de que se comprenden.

⚠ ¡ADVERTENCIA! El producto debe ser instalado y colocado por un técnico de rehabilitación cualificado.

Este producto está diseñado para montar arneses de posicionamiento. NO está indicado para su uso como dispositivo de seguridad en transporte.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Este producto solo debe usarse para colocar a una persona en la silla de ruedas o de trabajo. NO debe usarse como dispositivo de seguridad para transporte, ni como dispositivo de restricción personal o en cualquier otra aplicación en la que su mal funcionamiento

podría causarle lesiones a la persona. El uso inapropiado de este producto no está autorizado y además es inseguro.


GARANTÍA: Este producto tiene una garantía limitada para toda la vida contra defectos de mano de obra y materiales derivados de un uso normal por el paciente original. Póngase en contacto con su suministrador o con Bodypoint si desea realizar reclamaciones bajo garantía.

Si desea obtener más información sobre productos de Bodypoint y una lista de distribuidores fuera de EE.UU., visite la página www.bodypoint.com

CONTENIDO DEL PAQUETE

El paquete puede contener uno o más de los siguientes elementos:

- Guías de correas, 150 mm o 200 mm de longitud, con cierres
- Adaptador de montaje con cierres
- Adaptador de montaje, pequeño (185 mm) o grande (270 mm de ancho), con sujetadores

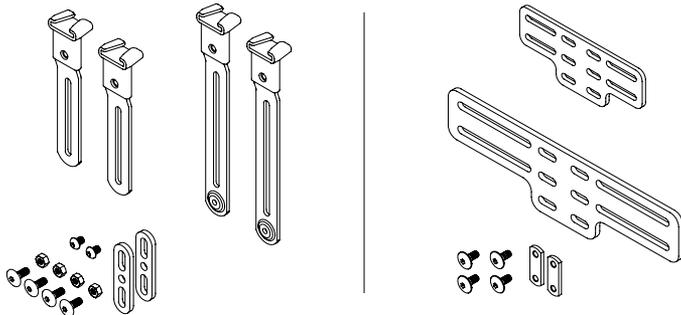

BP Bodypoint®

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

CE


558 First Ave. S., Suite 300 | Seattle, WA 98104 | 206.405.4555 | 800.547.5716 | www.bodypoint.com

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN

Silla de ruedas con un respaldo firme de metal o plástico, de un grosor de hasta 4 mm (5/32"). Respaldos más gruesos requieren tornillos de montaje más largos con una mínima fuerza de tiro de 90 kg (200 lbs) (no se incluyen en el paquete).


POSICIONAMIENTO

Siente al usuario en la silla de ruedas y establezca la postura correcta con la correa de soporte de la pelvis. Coloque las guías de la correa entre el cuello y la articulación del hombro, aproximadamente a la altura del hombro (ajuste hacia arriba/abajo para distribuir la presión) Determine la mejor orientación de la guía de correa en función de las necesidades del usuario.

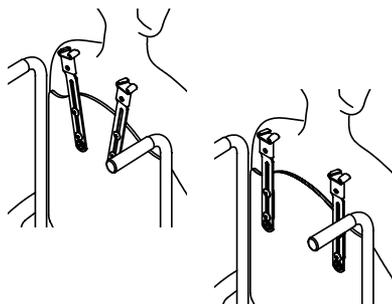

INSTALACIÓN


Solo guía de correa

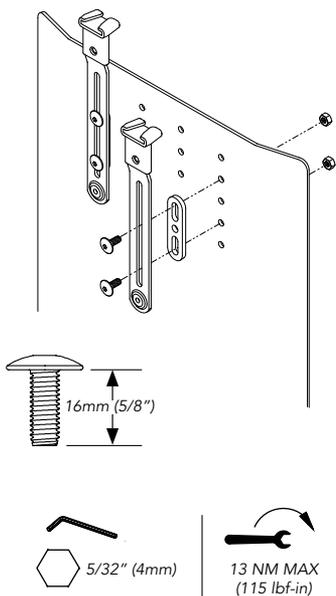

INSTALACIÓN

Con el adaptador de montaje

1. Fije las guías de correas al adaptador de montaje utilizando tornillos de 12mm (1/2") y placas de anclaje.
2. Fije el adaptador de montaje al respaldo utilizando el receptor del reposacabezas y sus tornillos, u otro accesorio de montaje apropiado. (No se incluye en el paquete).

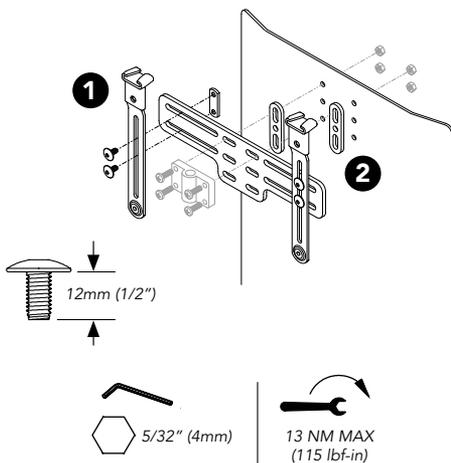

FIJE EL ARNÉS PARA HOMBRO

