

# DESCANSO 24 HORAS DE POSICIONAMIENTO



REHAGIRONA



# 24HORAS DE POSICIONAMIENTO

Desde hace tiempo se sabe que el posicionamiento nocturno debe ser de la misma calidad que el posicionamiento diurno. Después de todo, probablemente pasamos más tiempo en posición de dormir que en cualquier otra. La importancia de posicionar las 24 horas se ha reconocido en los últimos años como la continuación de un buen posicionamiento durante el día.

La noche promueve la mejora del desarrollo del esqueleto y una mejor calidad de vida. Actualmente se sabe que descuidar un posicionamiento adecuado por la noche restará los beneficios de cualquier apoyo postural durante la vigilia.

El buen posicionamiento nocturno contribuye a la recuperación de períodos de más descanso, que a su vez contribuye a una reducción positiva al riesgo de deformidad esquelética muscular.

Es importante utilizar un sistema de posicionamiento nocturno tanto como sistema preventivo como para reducir el riesgo de un mayor deterioro postural, por tanto, es recomendable a cualquier edad.

Con un buen sistema de posicionamiento nocturno, permitimos que el usuario experimente un descanso de mejor calidad mediante la reducción de la acción no deseada de los reflejos posturales y el tono muscular asimétrico. Cada postura estirada afectará al nivel de relajación y el potencial para el movimiento de la persona. Sabemos que tener una buena postura durante toda la noche es parte integral para una persona con necesidades posturales ya que continúa con los beneficios del posicionamiento que reciben durante todo el día. Pero, sin un buen soporte de noche pueden realmente revertir los logros que se han conseguido durante el día.

## **BENEFICIOS POSICIONAMIENTO 24 HORAS**

- Alineación postural.
- Reducción y reparto de presiones.
- Relajación de los músculos.
- Evita y frena deformaciones a la vez que acomoda.
- Más facilidad de manejar y posicionar al usuario durante el día.
- Proporciona confort.
- Menos medicación.
- Mejor calidad de sueño que repercute en:
  - Mejor aprendizaje.
  - Mejor concentración.
  - Mejor sistema nervioso.
  - Mejor sistema inmunitario.
  - Mejora la función del metabolismo.
  - Mejor humor.



***Los beneficios del sueño tienen impacto en casi todas las áreas de la vida cotidiana.***

***El cuerpo necesita el sueño, de la misma forma en que se regula la necesidad de comer, beber o respirar.***

***Los estudios demuestran que el sueño juega un papel vital en la salud física, la longevidad y el bienestar emocional.***

# DREAMA

24 HORAS DE POSICIONAMIENTO



## CARACTERÍSTICAS

- Colchón postural
- Promueve la alineación de la postura
- Reducción y reparto de la presión
- Múltiples accesorios de soportes posturales
- Reduce el riesgo de deformación esquelética muscular
- Acomoda deformidades
- Posicionamiento adaptable y configurable
- Montaje rápido y sencillo
- Fundas extraíbles y lavables

## CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- Base de aluminio flexible
- Set de colchones (15 simples y 2 dobles)
- Set de fundas para colchones
- Cincha para sujeción a cama

## ACCESORIOS

- Soportes de posicionamiento
- Soporte de posicionamiento delgado
- Taco abductor
- Soporte de rodillas
- T-Roll, soporte de rodillas ajustable en altura
- Arco de posicionamiento
- Sistema de lateralización
- Bloqueadores




# ESPECIFICACIONES



## Perfiles personalizados

La base de aluminio permite crear una superficie de reposo a la elección de cada usuario, ya sea con una cama articulada o con cuñas y rollos.

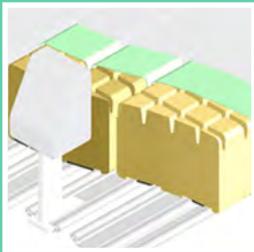

## Cojines Modulares

Cada cojín de colchón modular es de 15 cms de profundidad, tapizado ignífugo, resistente al agua, tejido antibacteriano y transpirable. Los espacios entre cojines permiten el paso del aire, así ayuda a mantener una temperatura confortable. Los cojines individuales permiten limpiar fácilmente áreas específicas durante la noche con la mínima perturbación del usuario.



## Fundas individuales

Las fundas individuales significan que pueden ser retiradas y reemplazadas sin necesidad de sacar al usuario de su cama, lo que minimiza la interrupción del sueño y la necesidad de transferencias asistidas.



## Posicionamiento adaptable y configurable

Se pueden configurar cientos de especificaciones individuales para la necesidad de cada usuario. Los soportes se deslizan fácilmente en los canales entre los cojines individuales de colchón. Hay 16 canales disponibles para los soportes, eso significa que se puede lograr con exactitud la posición deseada. Los soportes son de plástico y PU. Las almohadillas giran 360 ° para poder personalizar aún más el apoyo.

## Sistema Glide-lock™



El sistema único Glide-lock™ hace que el posicionamiento sea muy simple. La base del soporte se inserta en el canal y se empuja suavemente hasta su lugar. Para quitar la almohadilla, sólo tiene que mantener y deslizar con cuidado hacia fuera. También hay bloqueadores que se puede atornillar dentro de los canales (desmontables y reutilizables), ya sea para marcar el lugar donde una almohadilla debe ir o para poner detrás de la almohadilla y

evitar que los usuarios con fuertes movimientos repetitivos desplacen el control de forma gradual durante la noche.

## Montaje rápido y sencillo



Dreama se monta en pocos minutos, los cojines del colchón se colocan en su lugar a través de clips integrales. Las configuraciones se pueden cambiar fácilmente sin molestar al usuario. Los controles se pueden ajustar o cambiar por completo con el usuario en la cama. Esto significa que no es necesario despertar al usuario cuando hacemos los cambios durante la noche

## ACCESORIOS



Soportes de Posicionamiento



Soportes de Posicionamiento delgado



Taco Abductor




Soporte de Rodillas



T-Roll



Arco de Posicionamiento

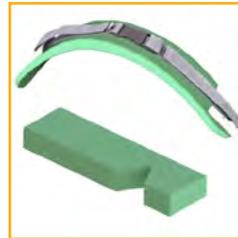


Sistema de Lateralización



Bloqueadores

# ALINEACIÓN CON DREAMA

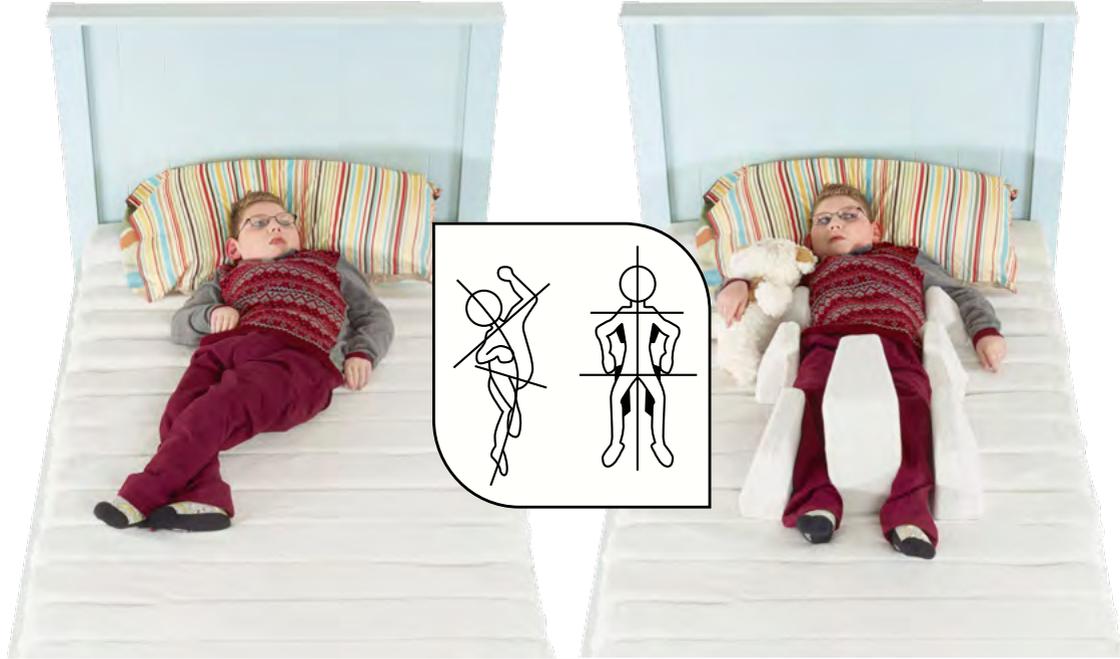

# VENTAJAS

- Transpirable gracias a la buena ventilación entre el cuerpo y el colchón, lo que reduce los espasmos por calor.
- Silencioso al ajustar posiciones gracias a los soportes Glide-lock™
- Flexibilidad excepcional de apoyo las 24 horas con numerosos accesorios individuales.
- Muy fácil de limpiar e higienizar.
- Confortable
- Versátil gracias a su amplia gama de oportunidades de posicionamiento: Prono, supino o de lado. Fácilmente, rápidamente y silencio.
- Rápida y simple puesta a punto: Dreama™ puede ser montado en pocos minutos.
- Manejo: Dreama™ se puede configurar con el usuario en la cama sin necesidad de levantarlo.



REHAGIRONA, SLU

CARRETERA DE CARTELLÀ, KM. 0,5  
SANT GREGORI PARC INDUSTRIAL-EDIFICI A  
17150 SANT GREGORI (GIRONA)  
T +34 902 48 72 72 / F +34 972 40 50 54  
INFO@REHAGIRONA.COM  
WWW.REHAGIRONA.COM

