




RehaGirona, sl
Trens Petits 1
Pol. Ind. Mas Xirgu
17005 Girona

T +34 902 48 72 72
F +34 972 40 50 54
www.rehagirona.com
rehagirona@rehagirona.com

BEN 4X COUNTRY BEN 4X COUNTRY MINI BEN 4X COUNTRY MAXI

MANUAL DE INSTRUCCIONES

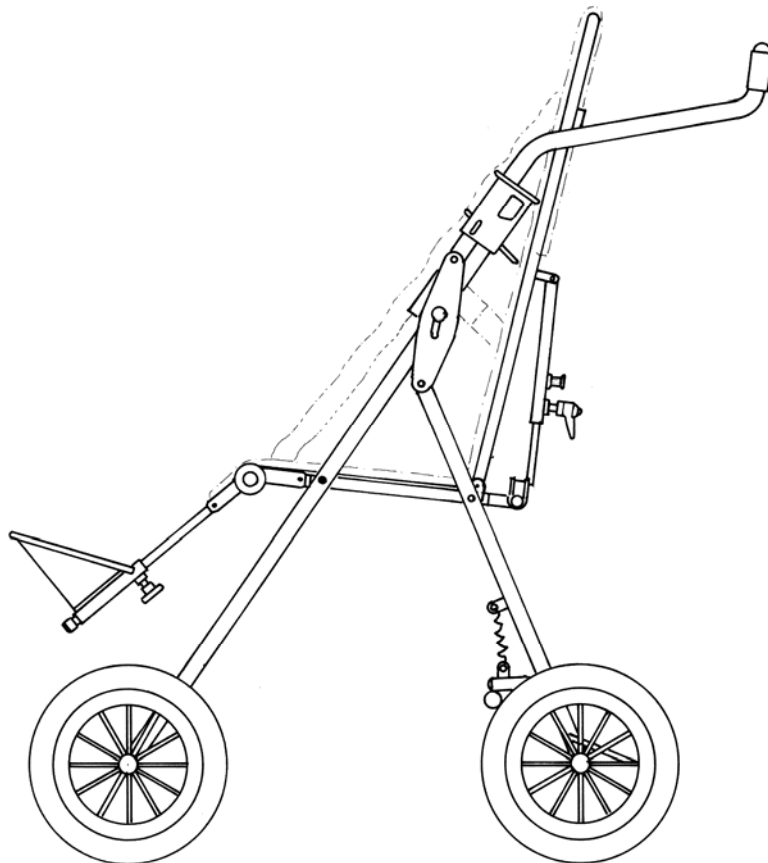

CE



1. GENERALIDADES

Información importante


- Lea con atención las instrucciones antes de utilizar el cochecito.
- Guarde las instrucciones de uso para futuras consultas.

Nota

- Asegúrese, antes de usar el cochecito, que la parte trasera del respaldo esta firmemente fijada.
- Antes de poner el niño en el cochecito, asegurarse de que no lleve ningún tipo de ropa o manta que pueda cogerse a las ruedas
- Nunca usar la silla del cochecito en ningún tipo de vehículo motor.
- Usar siempre los frenos del cochecito cuando éste esté estacionado y al poner y sacar el niño.
- No deje nunca a su hijo sin vigilancia.
- Asegurarse que el niño está en la posición adecuada antes de hacer los ajustes correspondientes.
- Asegúrese de que el niño siempre lleve puesto correctamente el cinturón de seguridad.
- No sobrecargar el cochecito en peso o con otros accesorios que no sean los propios.
- No permanecer nunca de pie en el reposapiés.

2. ESQUEMA GENERAL. COMPONENTES BASICOS.

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1 empuñadura | 9 freno |
| 2 respaldo | 10 rueda trasera |
| 3 mecanismo de seguridad de cierre | 11 rueda delantera |
| 4 clip seguridad cierre de plegado | 12 ajuste altura reposapiés |
| 5 cinturón | 13 reposapiés |
| 6 pin de seguridad de reclinación | 14 Ajuste ángulo reposapiés |
| 7 reclinación de respaldo | 15 tapicería |
| 8 asiento | |

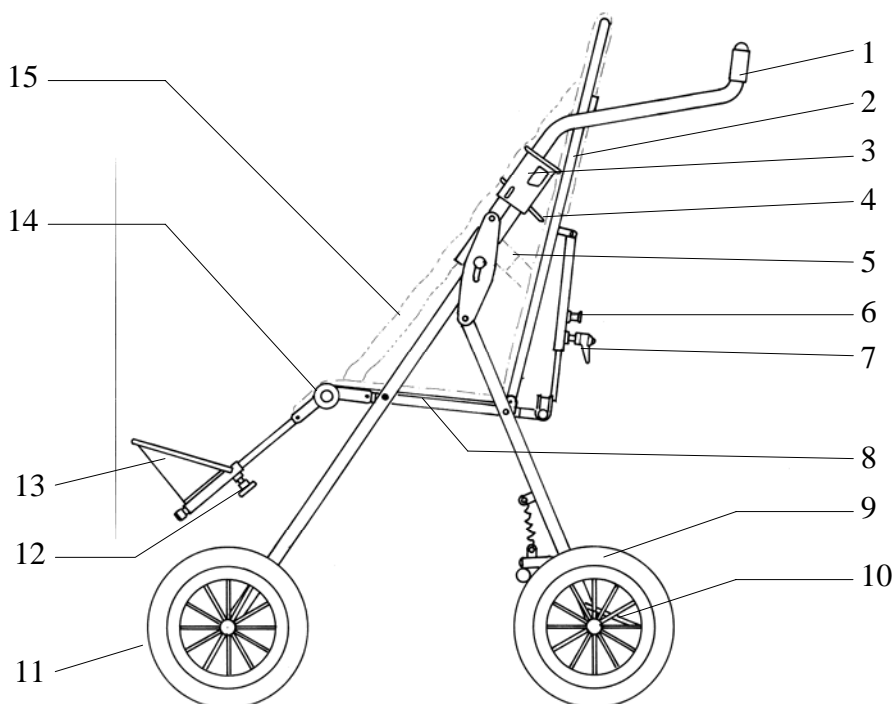


3. INSTRUCCIONES DE USO

3.1 Montaje y desmontaje básico

Para desplegar el chasis, colocarse entre las ruedas traseras, sujetar fuerte la empuñadura y tirar hacia arriba. Mover la empuñadura unas cuantas veces, con el fin de asegurarse que el cierre de plegado queda firmemente sujeto y en su correcta posición.

Estos movimientos deben realizarse con cuidado para evitar dañar los dedos.

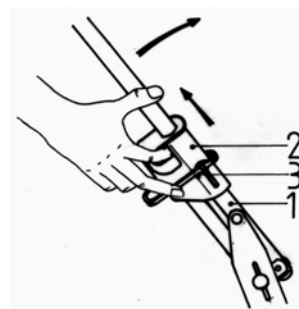

Para plegar el cochecito, colocar el reposapiés en posición horizontal y cerrarlo. Presionar el respaldo hacia el asiento. Levantar el cierre de plegado de la empuñadura y el mecanismo de seguridad. Presionar la empuñadura hacia las ruedas delanteras.

Es recomendable quitar todos los accesorios para que una vez el cochecito esté plegado, ocupe menos espacio.

3.2 Ajustes

3.2.1 Graduar la inclinación del respaldo


Sujete firmemente el respaldo. Libere la palanca de sujeción para graduar la inclinación. Sitúe el respaldo en la posición deseada. Vuelva a fijar la palanca.

3.2.1 Graduar la altura y la reclinación del reposapiés

Sujetar el reposapiés. Liberar los sistemas de sujeción para graduar la altura. Situar en la posición deseada, moviéndolo hacia arriba o hacia abajo, y volver a poner las palomillas, fijándolas firmemente.


Presionar los dos botones que se encuentran a los lados del reposapiés simultáneamente y ajustar al ángulo deseado. Suelte los botones y ajuste la posición para que los ejes del reposapiés queden fijos.

Para recoger la plataforma del reposapiés, sola tiene que tirar de ella hacia arriba.

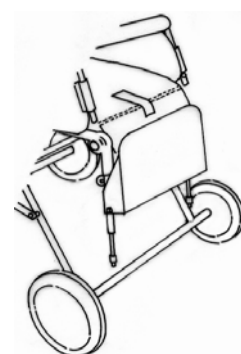

3.3 Frenos

Colóquese detrás del cochecito. Para accionar el freno de estacionamiento sólo tiene que presionar el pedal de freno hacia abajo. Para desbloquear el freno de estacionamiento, sólo tiene que apretar la barra que lleva el mismo freno.

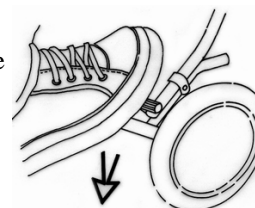

3.4 Sorteando los bordillos

Hacia abajo : Coloque las ruedas delanteras contra el bordillo, sujete firmemente las empuñaduras y empuje de ellas hacia atrás presionando sobre las ruedas traseras. Acerque las ruedas traseras al extremo del bordillo. Baje el cochecito siempre apoyando el mismo sobre las ruedas traseras. Nunca incline el cochecito hacia delante mientras baja un bordillo.

Hacia arriba: Acerque las ruedas delanteras al bordillo. Sujete firmemente las empuñaduras mientras tira de ellas hacia las ruedas traseras. Coloque las ruedas delanteras encima del bordillo. Ahora tire de las empuñaduras hacia arriba hasta colocar las ruedas trasera encima del bordillo.

3.5 Sorteando escalones

- use las rampas de subida siempre que le sea posible.
- siempre que sea posible, evitar los escalones. Si no hay otra alternativa, asegúrese que al menos otra persona pueda ayudarlo.
- No intente subir o bajar escaleras cargando con el cochecito y su ocupante, a menos que haya otra persona y que estén seguros de contralar el peso.
- durante la operación anterior, es muy importante mantener siempre las manos por la parte interior de las empuñaduras o del chasis.
- descansar a intervalos regulares.
- no levantar el cochecito por el reposapiés.

3.6 Subiendo/Bajando escaleras

Bajando: posicione el cochecito recto con las ruedas delanteras mirando hacia el borde del primer peldaño. Empuje las empuñaduras hacia abajo hasta poner las ruedas traseras al borde del peldaño. El ayudante deberá posicionarse frente el cochecito para estabilizar y bajar el cochecito agarrando el armazón delantero. Ahora pueden ir bajando peldaño a peldaño, hasta el final de la escalera siempre controlando el peso.



Subiendo: posicione el cochecito con las ruedas traseras pegadas al borde del primer peldaño, empuje de las empuñaduras hacia abajo y suba al siguiente escalón. El ayudante deberá posicionarse frente el cochecito y, como en el caso anterior, estabilizar y subir el cochecito agarrando el chasis delantero, hasta llegar al final de la escalera.



4. EL OCUPANTE

4.1 Normas para introducir al ocupante.

Asegurar el freno de estacionamiento. Para una fácil colocación del niño en el cochecito, sitúe el reposapiés lo más apartado posible del asiento y ciérrelo. Si es posible, apoye el respaldo en una pared o a un objeto inmóvil (como alternativa, otra persona puede sujetar el cochecito). Coloque al niño cuidadosamente, asegurando todos los accesorios de sujeción. Gradúe el reposapiés a una posición cómoda.

4.2 Normas para sacar al ocupante

Asegurar el freno de estacionamiento. Para sacar al niño del cochecito, sitúe el reposapiés lo más apartado posible del asiento y ciérrelo. Si es posible, apoye el respaldo en una pared o a un objeto inmóvil (como alternativa, otra persona puede sujetar el cochecito). Saque al niño cuidadosamente, asegurándose previamente de que todos los accesorios de sujeción han sido desbloqueados.

5. CUIDADO Y CONSERVACION

El cochecito Ben 4X Country no necesita ningún cuidado especial. Una revisión regular de las fijaciones y partes móviles es suficiente. Puede usar lubricante para que estas partes sigan funcionando correcta y fácilmente.

Tanto las ruedas, como las partes de plástico y metal, pueden ser lavadas con agua muy caliente y un detergente suave.

La tapicería es extraíble y lavable (máx. 40°).

6. DATOS TECNICOS


	B4XM / B4XWM	B4X / B4XW	B4XX / B4XWX
Altura respaldo [mm]	530	630	710
Profundidad de asiento [mm]	250	280	360
Ancho asiento [mm]	300	340	370
Altura asiento-reposapiés [mm]	200-340	200-340	220-380
Ángulo inclinación respaldo	0° - 180°	0° - 180°	0° - 130°
Ángulo asiento	19°	19°	19°
Largo total [mm]	990	990	1070
Ancho total [mm]	610	610	650
Altura total /con empuñadura [mm]	1010	1010	1060
Freno	(con el pie.)	(con el pie.)	(con el pie.)
Peso (kg)	14,5	16,0	17,0
Carga máxima (kg)	35	35	50
Largo total plegado [mm]	900	900	930
Ancho total plegado [mm]	610	610	650
Altura total plegado [mm]	500	500	530

7. ACCESORIOS OPCIONALES

1. Capota

Levante la tapicería de la parte superior trasera del respaldo. Encontrará dos tubos metálicos. Colocar las piezas de plástico negras con los correspondientes tornillos en los tubos metálicos. Una vez colocados, insertar la capota en las piezas de plástico.

Para sacar la capota, ayúdese de las lengüetas de plástico que encontrará en la misma.


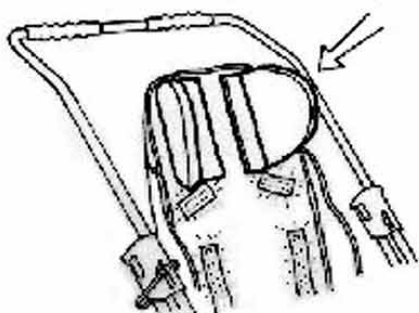


2. Reposa cabezas

Sentar al niño en el cochecito y buscar la altura apropiada para el reposa cabezas. Retirar al ocupante. Hacer unos pequeños agujeros en las bandas de piel artificial que se encuentran en la base del respaldo. Colocar los tornillos a través de los agujeros y asegurar el reposa cabezas al respaldo con las tuercas.


3. Soportes de tronco

Sentar al ocupante en el cochecito y buscar la altura deseada para los soportes de tronco (los soportes de tronco deben ir a la altura de la axila). Retirar al ocupante. Hacer unos pequeños agujeros en las bandas de piel que se encuentran en la base del respaldo. Poner los tornillos a través de los agujeros y asegurar el soporte de tronco en el respaldo con las tuercas.

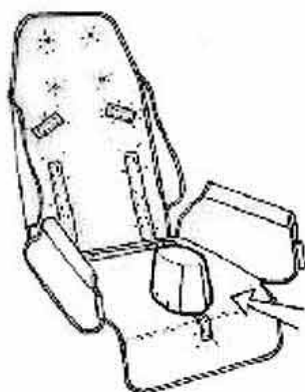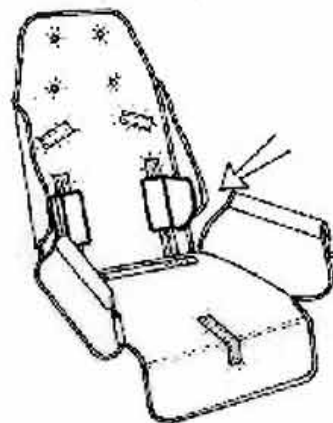

4. Taco abductor



Una vez el niño esté sentado en el cochecito, localizar el punto exacto donde es necesario poner el taco abductor. Retirar al niño del cochecito. Hacer un pequeño agujero en la banda de piel coincidiendo con el agujero de la base metálica. Coloque el abductor en el asiento (la parte estrecha debe mirar hacia el respaldo) y asegurarlo con el tornillo y la tuerca correspondientes.

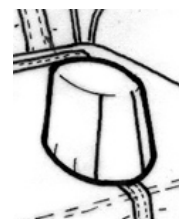

5. Peto

Hacer un pequeño corte en las bandas de piel superiores y pasar las tiras de la parte superior del peto por los agujeros hechos en la tapicería y por los agujeros que encontrará en el respaldo del cochecito. Pasar las tiras inferiores alrededor del respaldo. Fijé el peto en la parte trasera de silla ayudándose de los clips que encontrará en el respaldo.

Desabroche el peto y coloque al ocupante en la silla. Ajustar las tiras del peto con los pasadores.

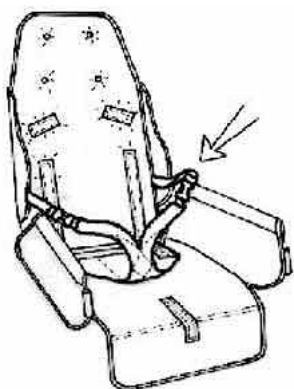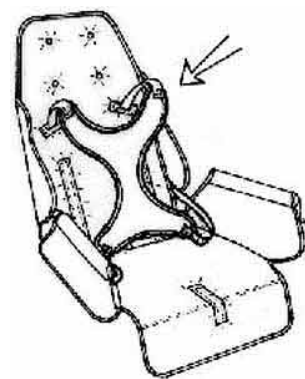

6. Pantalón abductor

Coloque el pantalón en la base del asiento. Haga un pequeño corte en la banda de piel que encontrará en la misma base y pegue la parte adhesiva de las tiras a través del agujero de la tapicería. Fije ahora las bandas superiores del pantalón con los pasadores que encontrará en el respaldo de la silla.


Ajustar las tiras del pantalón con los pasadores traseros.

7. Cinturón de 2 puntos

Fijar las tiras inferiores del cinturón a los clips inferiores de la parte trasera del respaldo.

Desabroche el pasador del cinturón y sienta al usuario en la silla. Ajuste el cinturón a la medida deseada ayudándose de los pasadores traseros.

Recuerde que el ocupante siempre debe sentirse cómodo con el uso del cinturón.

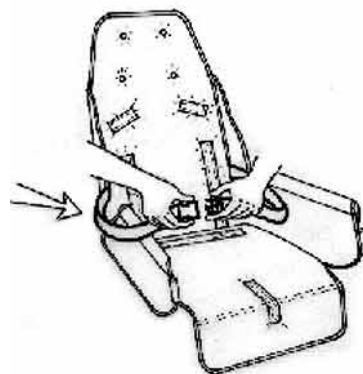

8. Cinturón de 4 puntos

Fijar las tiras inferiores del cinturón a los clips inferiores de la parte trasera del respaldo. Cortar las bandas de piel artificial. Pasar las tiras superiores del cinturón a través de los agujeros hechos y fijarlos en la parte superior trasera del respaldo con los pasadores que allí encontrará.

Afloje todos los tres pasadores del cinturón y sienta al usuario en la silla. Ajuste el cinturón a la medida deseada ayudándose de los pasadores traseros y volviendo a apretar los tres pasadores.

Recuerde que el ocupante siempre debe sentirse cómodo con el uso del cinturón.

14. Otros accesorios

