

Manual de usuario



Posicionamiento seguro en la carretera

El cinturón Si Po es un sistema de retención adicional para uso en vehículos.

Ofrece un posicionamiento seguro para niños y adultos con discapacidad.

Instrucciones de montaje

1. Abra las dos tiras posteriores del respaldo presionando los tres puntos al mismo tiempo en las dos hebillas.
2. Pase las dos tiras posteriores del respaldo a través del hueco entre la zona de asiento y el respaldo del automóvil.
3. Cierre ambas hebillas en la parte posterior del asiento del automóvil. ¡Asegúrese de que las hebillas se bloqueen correctamente! Apriete las correas para que la base del respaldo del cinturón se apoye firmemente contra el respaldo.
4. Abra las hebillas del arnés del hombro en el cinturón pélvico y póngalos al lado.
5. Abra la hebilla en ambos lados del cinturón pélvico.
6. Coloque al usuario correctamente y coloque de la parte acolchada sobre la pelvis. Cierre la hebilla en ambos lados. ¡Asegúrese de que las hebillas se bloqueen correctamente!
7. Coloque el arnés de hombro sobre los hombros del ocupante y fíjela al cinturón de la pelvis. ¡Asegúrese de que las hebillas se bloqueen correctamente!
8. Apriete la correa T de la pelvis y el arnés de hombro para que el usuario esté bien colocado.
9. Coloque el cinturón de seguridad del vehículo al usuario.



t-rv GmbH | Gewerbering 47 | D-76287 Rheinstetten

Tel.: 0049 7242 - 2579 60 | Fax: 0049 7242 - 2579 610

kundenservice@t-rv.de | www.t-rv.de | www.myprogeo.de |




Instrucciones de seguridad

- ¡La hebilla se cierra correctamente cuando se oye un "click"!
- ¡El cinturón Si Po debe utilizarse siempre junto con el cinturón de seguridad del vehículo!
- Para abrir la hebilla tiene que presionar tres puntos al mismo tiempo.

Características y beneficios:

- Si desea utilizar el sistema en otro vehículo, sólo tiene que abrir las dos tiras posteriores del respaldo y quitar el cinturón (no es necesario quitar las otras piezas).
- No se requieren herramientas para el montaje.
- Puede cambiar la posición del arnés del hombro. Si el arnés del hombro está colocado demasiado alto, usted puede cambiar la posición en la base del respaldo del cinturón.
- Para variar la altura del arnés de hombro, debe abrir las dos hebillas que lo conectan con el cinturón pélvico. Una vez liberado, este queda sujeto a la base del respaldo a través de un velcro que no está visible, ya que está dentro de una de las distintas aberturas laterales que hay en la base. Ponga la mano dentro y afloje el velcro. Pase un lado del cinturón a través del hueco y vuélvalo a colocar a la altura que desee, volviendo a presionar el velcro. Regule la altura de los dos cinturones para que sujete bien al usuario.

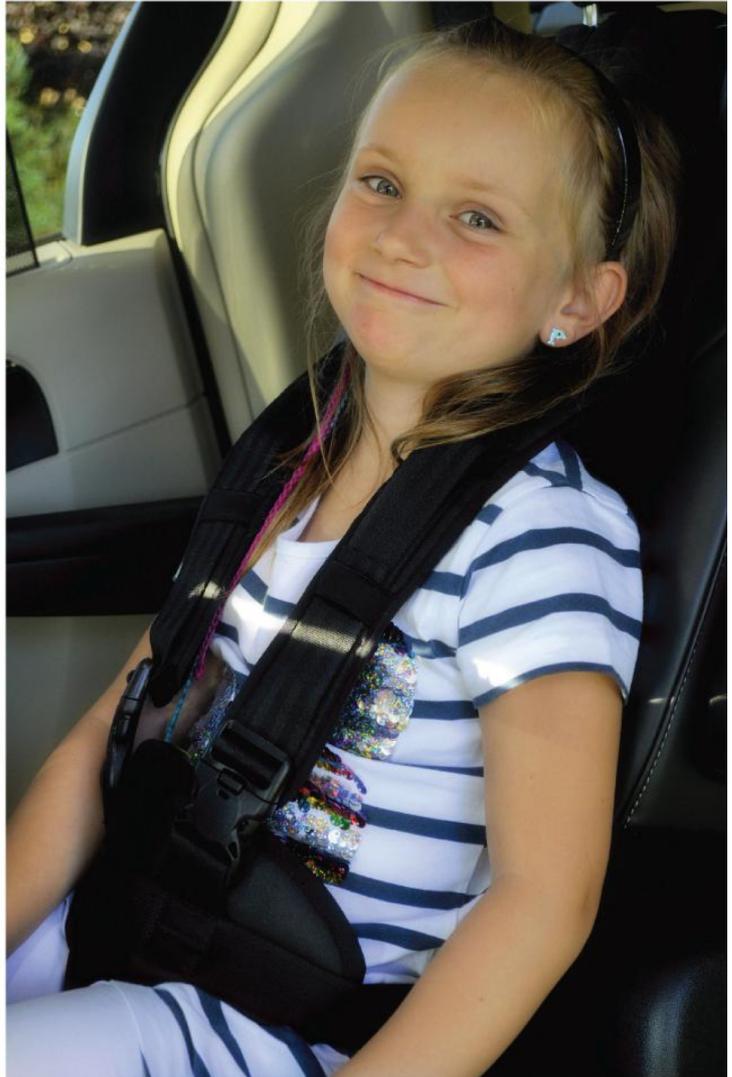

Lavar a mano (frío o caliente,
máximo 40 °, recomendado 30 °)

SiPo ya está pre-montado y es fácil de instalar.

Está disponible en 2 tamaños:

- Talla 1: usuarios hasta 130 cm. y menos de 30 kg.
- Talla 2: usuarios a partir de 130 cm. y más de 30 kg.



The best products around the wheelchair