

# MADITA

la silla terapéutica móvil que crece progresivamente





### **Estimada cliente, estimado cliente:**

Con la presente deseo agradecerle la confianza depositada en nosotros y la adquisición de nuestro producto.

Deseamos pedirle que antes de la primera puesta en servicio del producto lea atentamente las Instrucciones de uso y las respete. Tenga en cuenta, por favor, que los avisos y las imágenes de estas instrucciones de uso pueden ser diferentes a su producto.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.

### **¡Información importante!**

Asegúrese de que esas Instrucciones de uso permanecen con el producto.

### **Su equipo de Schuchmann**

## Contenido

<b>1. Preparación de la silla terapéutica para su uso .....</b>	<b>5</b>
1.1 Entrega .....	5
1.2 Medidas de seguridad antes del uso .....	5
1.3 Eliminación segura .....	5
1.3.1 Embalaje .....	5
1.3.2 Producto .....	5
1.4 Lugar de colocación de las Instrucciones de uso .....	5
<b>2. Descripción del producto .....</b>	<b>6</b>
2.1 Información sobre el material .....	6
2.2 Manejo / Transporte .....	6
2.3 Campos de aplicación, uso correcto .....	6
2.4 Uso incorrecto / Advertencias .....	7
2.5 Equipamiento del modelo básico .....	7
2.6 Lista de accesorios .....	8
2.7 Vista general del producto .....	8
<b>3. Ajustes .....</b>	<b>9</b>
3.1 Altura del asiento .....	9
3.2 Ángulo del asiento .....	10
3.3 Fondo del asiento .....	10
3.4 Inclinación del respaldo .....	10
3.5 Altura del respaldo .....	11
3.6 Reposabrazos .....	11
3.7 Banco reposapiés .....	12
3.8 Reposapiés .....	13
3.8.1 Posicionamiento de los reposapiés .....	14
3.9 Reposapiés con órtesis de pie .....	15
3.10 Ruedas de marcha .....	15
<b>4. Accesorios .....</b>	<b>16</b>
4.1 Reposacabezas .....	16
4.2 Respaldo extraíble .....	16
4.3 Placas torácicas .....	17
4.4 Placas torácicas replegables .....	17
4.5 Freno de bloqueo .....	17
4.6 Guía para muslos .....	18
4.7 Guía para las piernas abduccible .....	18
4.8 Guía de pelvis regulable .....	19
4.9 Mesa terapéutica .....	19
4.10 Cuña abductora para rodillas .....	20
4.11 Prolongación de la distancia entre ruedas .....	20

<b>5. Mantenimiento y limpieza</b> .....	<b>21</b>
5.1 Limpieza .....	21
5.2 Mantenimiento .....	21
5.3 Repuestos.....	21
5.4 Vida útil y reutilización .....	21
<b>6. Datos técnicos</b> .....	<b>22</b>
<b>7. Garantía</b> .....	<b>22</b>
<b>8. Identificación</b> .....	<b>23</b>
8.1 Declaración CE de conformidad .....	23
8.2 Número de serie / Fecha de fabricación .....	24
8.3 Versión del producto .....	24
8.4 Edición del documento .....	24
8.5 Nombre y dirección del fabricante, distribuidor especializado.....	24

## **1. Preparación de la silla terapéutica para su uso**

### **1.1 Entrega**

Cuando reciba el producto compruebe su integridad, su corrección y revise que no presente daños ocasionados por el transporte.

### **Revise la mercancía en presencia de la persona que la entregó**

Si hubiese daños ocasionados por el transporte inicie una evaluación de la situación (determinación del fallo) en presencia de la persona que la entregó. Envíe una reclamación por escrito a su comercio especializado correspondiente.

### **1.2 Medidas de seguridad antes del uso**

El uso correcto de la silla terapéutica precisa una instrucción precisa y cuidadosa del acompañante. Deseamos pedirle que antes de la primera puesta en servicio de la silla terapéutica lea atentamente las Instrucciones de uso y las respete.

Las partes almohadilladas, sobre todo los reposabrazos, pueden recalentarse por la acción directa del sol. Cubra esas partes o proteja el equipo de la acción directa del sol.

### **1.3 Eliminación segura**

Para cuidar y proteger el medio ambiente, para evitar contaminación y para reutilizar la materia prima (reciclaje) observe las indicaciones de eliminación de los puntos 1.3.1 y 1.3.2.

#### **1.3.1 Embalaje**

El embalaje del producto debería ser guardado para un posterior transporte necesario. Si tiene que reenviarnos el producto para reparación o por motivos de garantía, utilice, dentro de lo posible, el cartón original, para que el producto esté óptimamente embalado.

Deseche los materiales de embalaje en un punto de reciclaje, separados por categorías. No deje los materiales de embalaje sin supervisión, pues son posibles fuentes de peligro.

#### **1.3.2 Producto**

Deseche la materia prima usada en el producto en un punto de reciclaje, separada por categorías. (véase la información sobre el material en 2.1)

### **1.4 Lugar de colocación de las Instrucciones de uso**

Guarde las Instrucciones de uso cuidadosamente y asegúrese de que permanecen con el producto para su posible utilización posterior.

## 2. Descripción del producto

### 2.1 Información sobre el material

Tanto el chasis como los elementos en particular están fabricados en acero y aluminio, exentos de corrosión y revestidos al polvo. Las fundas son 100 % poliéster difícilmente inflamable (conforme a EN 1021-1+2).

### 2.2 Manejo / Transporte

La silla terapéutica no está prevista para ser transportada, dado que está equipada con ruedas. Si por algún obstáculo no pudiese evitar tener que transportarlo, asegúrese de que todas las piezas móviles están apretadas. Colóquese a continuación al lado de la silla terapéutica y agárrela desde delante, y detrás por debajo de la unidad de asiento y llévela hasta el destino deseado.

Para transportar la silla terapéutica ponga todos los elementos ajustables en la medida más pequeña (altura del asiento más baja, banco reposapiés retraído, etc.)



**¡Antes del transporte apriete todas las piezas móviles!**



**¡El niño no debe encontrarse en la silla terapéutica durante el transporte!**

### 2.3 Campos de aplicación, uso correcto

La silla terapéutica MADITA ha sido diseñada para niños y jóvenes, que no pueden sentarse o estar de pie por sí mismos, pero que debido a una posición del torso limitada no tienen que estar continuamente sentados en un asiento rígido.

MADITA es una silla terapéutica versátil que crece progresivamente para el empleo en casa, en la guardería o en el colegio y puede ser empleada en todos los rangos de edad, desde niños pequeños a jóvenes. Las medidas de asiento con ajuste individual y las placas de apoyo permiten una posición sentada estable y erguida.

## 2.4 Uso incorrecto / Advertencias



### ¡ATENCIÓN!

- Preste atención a que la silla terapéutica solamente sea utilizada por un niño o joven.
- Utilice la silla terapéutica solamente sobre un lugar llano y firme.
- No utilice la silla terapéutica para transportar personas.
- Para garantizar una elevación segura al transportar la silla terapéutica, colóquese en el lateral, al lado de la silla y agárrela desde delante y desde detrás en el asiento. Todas las piezas móviles deben ser apretadas.
- No deje nunca al menor sin supervisión sentado en la silla terapéutica.
- El uso correcto de la silla terapéutica precisa una instrucción precisa y cuidadosa del acompañante.
- La carga máx. (véase punto 6) no se debe superar.
- No utilice la silla terapéutica con piezas defectuosas, desgastadas o inexistentes.
- Por motivos de protección antiincendios la silla terapéutica no se debe colocar cerca de llama viva o de otras fuentes de calor potentes tales como radiadores eléctricos o de gas.
- Utilice únicamente accesorios y repuestos de la empresa Schuchmann, pues sino pondrá en peligro la seguridad del menor.
- Utilice la silla terapéutica únicamente cuando todos los componentes estén bien colocados y regulados.
- Debe prestar atención a que al ajustar y reajustar nunca haya extremidades del usuario o del operario en el área de ajuste, para minimizar el riesgo de lesiones.
- Los usuarios con discapacidad visual o lectora tienen que encomendar que les lean las instrucciones de uso, para poder manipular la silla terapéutica con seguridad.

## 2.5 Equipamiento del modelo básico

- incl. reposabrazos, banco reposapiés, manillar, asiento almohadillado estándar con funda
- Altura de asiento ajustable con ayuda de pistón de gas (250N en el ta. 0 + 1, 350N en el ta. 2)
- 4 ruedas de marcha (75 mm), dos de ellas con freno de bloqueo
- Opciones de ajuste: inclinación de asiento (mediante pistón de gas 500N), inclinación del respaldo, fondo y anchura del asiento, reposabrazos regulables en inclinación, altura y anchura, respaldo regulable en altura

## 2.6 Lista de accesorios

- Reposacabezas
- respaldo extraíble
- placas torácicas (también replegables)
- guía para muslos
- Guía de pelvis regulable
- mesa terapéutica
- cuña abductora para rodillas
- prolongación de la distancia entre ruedas
- kit de montaje para cinturón para la zona del asiento
- kit de montaje para cinturón para la zona del respaldo
- recubrimiento para incontinencia
- dispositivos auxiliares de fijación
- Freno de bloqueo

## 2.7 Vista general del producto

La siguiente imagen le mostrará la designación de las piezas más importantes, así como los términos que encontrará al leer este manual de instrucciones.






### 3. Ajustes

Los ajustes y reajustes en el producto o en los accesorios solamente pueden ser realizados por personas que hayan recibido una instrucción correspondiente por un asesor de productos sanitarios. Debe prestar atención a que al ajustar y reajustar nunca haya extremidades del usuario o del operario en el área de ajuste, para minimizar el riesgo de lesiones.

#### 3.1 Altura del asiento

La altura del asiento se ajusta mediante un pistón de gas. Para regular la altura del asiento hacia arriba, se acciona el pedal (A) en el chasis. Presionando ligeramente se desliza la unidad de asiento hacia arriba. La bajada se logra ejerciendo presión desde arriba sobre el asiento y accionando al mismo tiempo el pedal. El pistón de gas está destinado únicamente a facilitar el ajuste de la altura.

El pedal (B) se puede asegurar para que no se active accidentalmente con el pasador de fijación por tracción (que se encuentra en la parte interior del pedal). Gire para ello el pasador de fijación por tracción hasta que encaje. Ayude, si fuese necesario, para que engarce moviendo el pedal. El anclaje se elimina extrayendo el pasador y girándolo un cuarto de vuelta.

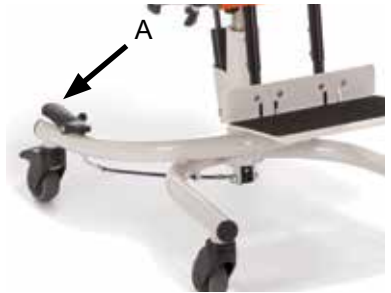

**¡Preste atención a que durante el ajuste/reajuste de la altura del asiento no haya ninguna parte del cuerpo (pies) en la zona del mecanismo de ajuste/reajuste (entre el suelo y el reposapiés de la silla terapéutica) para evitar lesiones!**

### 3.2 Ángulo del asiento

La palanca para el ajuste de la inclinación del asiento está equipada con un seguro infantil. Para regular la inclinación de la unidad de asiento, se acciona la palanca manual (A) detrás bajo el alojamiento del asiento rígido deslizando éste en horizontal hasta que engarce. Hecho esto, la unidad de asiento se podrá ajustar en la posición activa o pasiva.



### 3.3 Fondo del asiento

Para ajustar el fondo del asiento, afloje los dos tornillos de mariposa (B) bajo la unidad de asiento. Luego se puede desplazar sin fases el asiento hacia delante o hacia detrás.



¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo todas las uniones roscadas!

### 3.4 Inclinación del respaldo


Después de soltar la palanca de fijación (C) en el lateral derecho de la unidad de asiento puede regular la inclinación del respaldo.



**Preste atención a que durante el ajuste/reajuste de la inclinación del respaldo ni hay ninguna parte del cuerpo en la zona del mecanismo de ajuste/reajuste, para evitar lesiones.**

### 3.5 Altura del respaldo

Suelte el tornillo de cabeza cilíndrica (A) allen (M8) en el dorso y ajuste la altura deseada del respaldo.

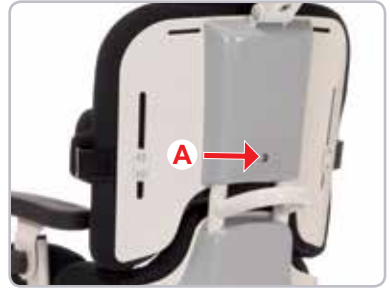


### 3.6 Reposabrazos

Los reposabrazos se pueden regular en altura y anchura.

El ajuste de la inclinación se efectúa tras soltar el mango de estrella (B). Soltando el mango de estrella (C) se puede regular la altura.



El ajuste de la anchura se realiza tras soltar los dos tornillos prisioneros (D), que están en la parte inferior de la unidad de asiento.

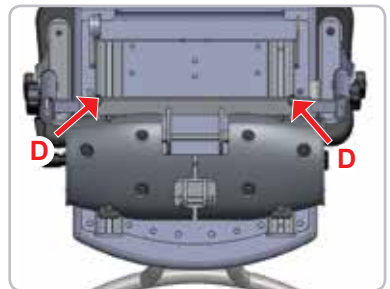

¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo todas las uniones roscadas!

### 3.7 Banco reposapiés

El modelo básico de la silla terapéutica MADITA ya incluye un banco reposapiés (A). Ese banco tiene una superficie antideslizante (B) y dispone de 8 ranuras (C) para sujetar con cinturones como p. ej. manguitos o fijaciones para pies.



Para ajustar el ángulo de la rodilla suelte, por favor, las palancas de fijación (D) debajo del asiento, coloque el banco reposapiés en la posición deseada y vuelva a apretar las palancas de fijación (D).

Para facilitar el ascenso se puede replegar el banco reposapiés (E).

Para un ajuste de altura sin fases, suelte, por favor, los cuatro tornillos prisioneros (F), ponga el banco reposapiés en la posición deseada y vuelva a apretar los tornillos prisioneros (F).

Cuando regule la altura preste atención a que no se superen las marcas (G) en las orejas del alojamiento del reposapiés, para poder garantizar una sujeción segura con los tornillos prisioneros (F).

Para una ubicación óptima de los pies, también se puede reajustar el ángulo del pie. Para ello, pliegue en primer lugar el banco hacia arriba y gire después los tornillos allen (H) insertándolos o extrayéndolos. Aguante las tuercas (I) tras cada ajuste de la inclinación del reposapiés.

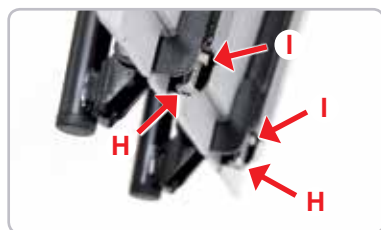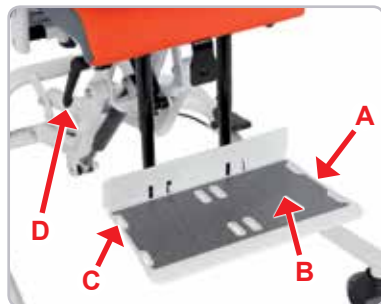

**¡Aguante las tuercas (I) tras cada ajuste de la inclinación del reposapiés!**



**¡Apretete de nuevo la palanca de fijación y los tornillos prisioneros tras cada ajuste!**

### 3.8 Reposapiés



Opcionalmente, MADITA también se puede equipar con dos reposapiés (A). Los reposapiés tienen una superficie antideslizante (B) y disponen de 4 hendiduras (C) para sujetar con cinturones como p. ej. manguitos o fijaciones para pies.

Para ajustar el ángulo de la rodilla suelte, por favor, la palanca de fijación (D) debajo del asiento a ambos lados, coloque los reposapiés en la posición deseada y vuelva a apretar la palanca de fijación (D).

Para facilitar, p. ej. el ascenso se pueden replegar los reposapiés (E).

Para un ajuste de altura sin fases, suelte, por favor, los dos tornillos prisioneros (F), de cada reposapiés, ponga los reposapiés en la posición deseada y vuelva a apretar los tornillos prisioneros (F).

Cuando regule la altura preste atención a que no se superen las marcas (G) en las orejas del alojamiento de los reposapiés, para poder garantizar una sujeción segura con los tornillos prisioneros (F).

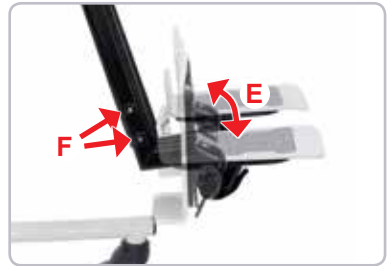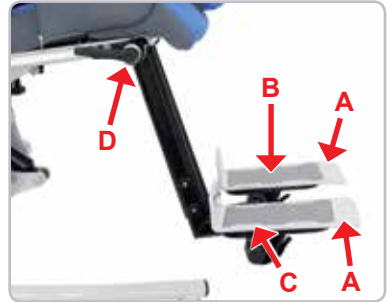


**¡Apriete de nuevo la palanca de fijación y los tornillos prisioneros tras cada ajuste!**

### 3.8.1 Posicionamiento de los reposapiés

Para una ubicación óptima de los pies se pueden reajustar los reposapiés de forma mutuamente independiente en anchura, inclinación y profundidad.


#### Ángulo de los pies

El ángulo de los pies (A) de cada reposapiés se puede regular de (-)15° a 5°. Gire hacia dentro o hacia afuera, para ello, los tornillos prisioneros (B) debajo de los reposapiés, y regule el ángulo de pie deseado.

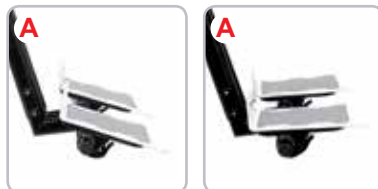

#### Anchura

Para reajustar la anchura (C) suelte, por favor, los tornillos alomados (D) por debajo de los reposapiés, coloque los reposapiés en la posición deseada y vuelva a apretar los tornillos alomados (D).

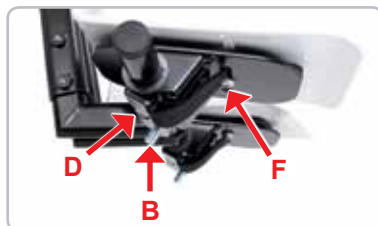

#### Inclinación / profundidad

Para reajustar la inclinación y la profundidad (E) suelte, por favor, los tornillos alomados (F) por debajo de los reposapiés, coloque los reposapiés en la posición deseada y vuelva a apretar los tornillos alomados (F).

Además, también puede realizar con el mismo método un reajuste adicional de la anchura.



#### Aseguramiento contra repliegue

Los reposapiés pueden asegurarse contra repliegue. Para ello solo tiene que soltar el cierre de velcro (G) por debajo de los reposapiés, poner los reposapiés en la posición deseada y volver a cerrar el velcro (G).




¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo todos los racores!

### 3.9 Reposapiés con órtesis de pie

Opcionalmente, los reposapiés se pueden equipar con órtesis para pie (A). También aquí, al igual que en el modelo normal, puede regularse el ángulo de la rodilla, replegar las órtesis y regular la altura (véase punto 3.8).

Para una ubicación óptima de los pies se pueden reajustar los reposapiés con órtesis de forma mutuamente independiente en anchura, inclinación y profundidad (véase punto 3.8.1).

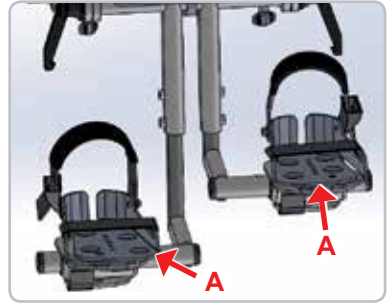

**¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo todos los racores!**

### 3.10 Ruedas de marcha

La silla terapéutica debe ser asegurada, por principio, para que no se mueva por sí misma frenando las 2 ruedas de marcha traseras. Presione para ello con la punta del pie los frenos (B).



**El freno impide únicamente el desplazamiento involuntario en superficies lisas.**

## 4. Accesorios

### 4.1 Reposacabezas

El reposacabezas se puede regular en altura, fondo e inclinación. Suelte para ello los dos tornillos allen de cabeza cilíndrica (A) y ponga el reposacabezas en la posición deseada.



### 4.2 Respaldo extraíble

El respaldo extraíble se puede operar en el dorso de la silla terapéutica. Suelte para ello la empuñadura giratoria (B), presione la palanca de enclavamiento (C) y retire después el respaldo.



La función del respaldo extraíble se puede incorporar en el plan de terapia y se puede usar en plazos cortos, pues el respaldo, junto con el reposacabezas, se montan con rapidez, para que el niño tenga un apoyo y reposo cuando está cansado.




¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo todas las uniones roscadas!



### 4.3 Placas torácicas

Las placas torácicas se pueden regular individualmente en altura y anchura. Suelte para ello los dos tornillos alomados allen (A) y ponga las placas torácicas en la posición deseada.

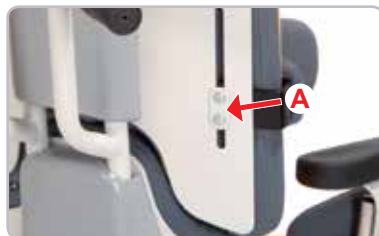

### 4.4 Placas torácicas replegables

Las placas torácicas replegables se puede plegar hacia el lateral para introducirlas con facilidad.


Pulse, para ello, el botón rojo (B) en el lateral de la placa torácica, por encima de la articulación y oscile la placa hacia el lateral, para apartarla.



¡Cuando repliegue preste atención a que la placa torácica engarce!

### 4.5 Freno de bloqueo

El freno de bloqueo lo puede manejar el propio usuario. Si se baja la palanca (C) que está montada en el sistema de asiento se suelta el freno. Cuando se sube la palanca (C) el freno engarza.


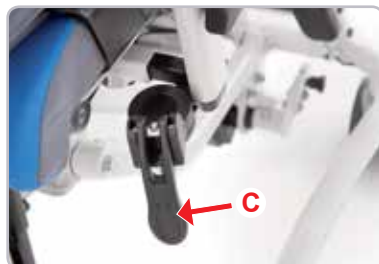


#### 4.6 Guía para muslos

Las almohadillas de la guía para muslos se pueden regular individualmente en anchura y profundidad.

Para ajustar la anchura suelte los dos tornillos de mariposa (A) debajo de la superficie de asiento y ubique las almohadillas de las guías en la posición deseada.

El ajuste de profundidad, excepto en la versión estándar para la talla 0 con guía de pelvis ajustable, se puede realizar con cada guía de muslo. Para ajustar la profundidad, abra las cremalleras (B), suelte los 3 tornillos alomados allen (C) con hexágono interior y ubique la almohadilla en la posición deseada.

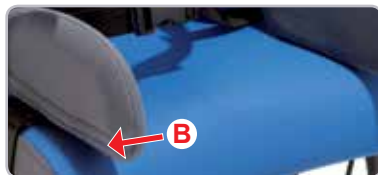
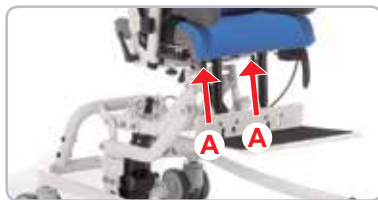


**¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo las uniones roscadas!**

#### 4.7 Guía para las piernas abduccible

La guía para las piernas abduccible permite la abducción, medicinalmente necesaria, de los muslos y la compensación de la diferencia del fondo del asiento.

Para ajustar la guía para las piernas afloje las tuercas (D) debajo de la superficie de asiento y ubique las guías en la posición deseada. Así puede configurar con facilidad el ángulo de abducción (1), la anchura del muslo (2) y también la compensación de la longitud de las piernas o la diferencia del fondo del asiento (3) con los agujeros longitudinales mientras el niño está sentado en la silla terapéutica.

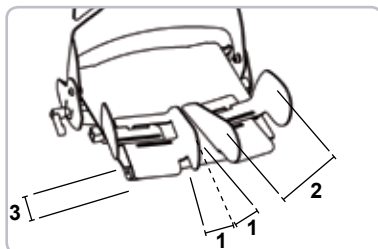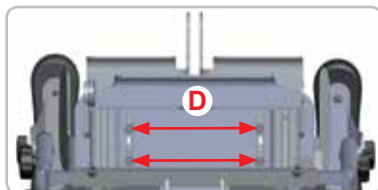



#### 4.8 Guía de pelvis regulable

La guía de pelvis regulable se puede ajustar en anchura, ofreciendo un alto grado de seguridad para el niño y posicionando su pelvis.

Suelte en primer lugar el tornillo de cabeza cilíndrica en el dorso de la silla terapéutica en el borde inferior de la cubierta. Presione después la almohadilla ligeramente hacia delante y afloje también el tornillo hexagonal (C).

Ponga ahora al niño en la silla y ubique la guía de pelvis regulable en la posición deseada. Apriete en primer lugar el tornillo de cabeza cilíndrica (B) y baje al niño con el tornillo apretado.


Ahora solo tiene que apretar el tornillo hexagonal (A) y después puede sentar al niño de nuevo.

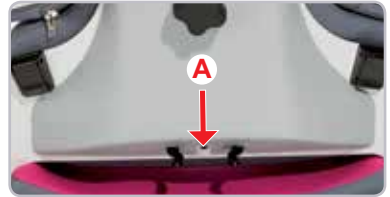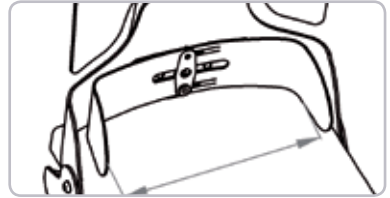

**¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo las uniones roscadas!**

#### 4.9 Mesa terapéutica

La mesa terapéutica se puede regular en altura y fondo. La altura se ajusta regulando los reposabrazos (véase el punto 3.6). Para el ajuste de profundidad suelte el tornillo de mariposa (C) y coloque la mesa terapéutica en la posición deseada. Para plegar la mesa terapéutica hacia el lateral, p. ej. para subir y bajar al niño, suelte los tornillos de mariposa (C+D), oscile la mesa hacia arriba, apartándola y póngala al lado de la silla terapéutica.

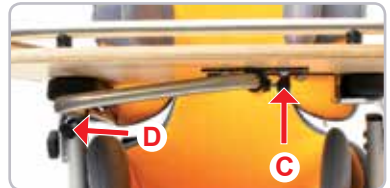

#### **4.10 Cuña abductora para rodillas**

La cuña abductora para rodillas se monta con un eje insertable delante, en la placa del asiento. Presione el cabezal en el eje y la cuña se puede retirar o colocar con facilidad. Al colocar la cuña abductora tiene que oír claramente como engarza con un "clic".

#### **4.11 Prolongación de la distancia entre ruedas**

¡La prolongación de la distancia entre ruedas no se puede ajustar! Está destinada únicamente a la estabilidad, especialmente en el caso de asientos rígidos de gran tamaño e inclinaciones de asiento extremadamente pronunciadas hacia atrás.



**¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo las uniones roscadas!**

## **5. Mantenimiento y limpieza**

### **5.1 Limpieza**

Limpiar todos los elementos del bastidor con una esponja o un paño húmedo. Las fundas se pueden extraer y lavar en la lavadora a 40°, sin centrifugar. No secar las fundas en la secadora, ni lavarlas con detergente agresivo o un producto similar. Observe al respecto nuestras instrucciones generales de limpieza e higiene. Éstas se encuentran en [www.schuchmann-reha.de/MADITA](http://www.schuchmann-reha.de/MADITA).

### **5.2 Mantenimiento**

Lleve a cabo un examen visual diario y controle con regularidad que la silla terapéutica no presenta fisuras, roturas, que no faltan piezas ni funciona incorrectamente. En caso de defecto o mal funcionamiento póngase directamente en contacto con el comercio donde ha adquirido el producto (véase 8.5).

### **5.3 Repuestos**

Para un pedido de repuestos póngase en contacto con el distribuidor que ha entregado la silla terapéutica (véase 8.5) indicándole el número de serie.

Los repuestos y accesorios necesarios solamente pueden ser montados por personal formado.


### **5.4 Vida útil y reutilización**

La vida útil esperada de nuestro producto, dependiendo de la intensidad de su uso y del número de usos es de hasta "8" años, si se utiliza de acuerdo con las instrucciones aquí indicadas. El producto se puede seguir utilizando más allá de ese periodo si está en perfecto estado de seguridad. La vida útil no se refiere a las piezas de desgaste tales como p. ej. las fundas, las ruedas, las pilas,.....

El mantenimiento y la evaluación del estado y, si procede, de su reutilización es competencia del comercio especializado.

La silla terapéutica se puede reutilizar. Antes de entregársela a otra persona lleve a cabo las tareas de limpieza y desinfección mencionadas en el capítulo 5. La documentación adjunta como p. ej. estas Instrucciones de uso forman parte del producto y tienen que ser entregadas al nuevo dueño. Para la reutilización no se ha previsto ningún desmontaje previo. En caso de almacenamiento se recomienda poner el producto en las dimensiones más reducidas, para ahorrar espacio.

## 6. Datos técnicos

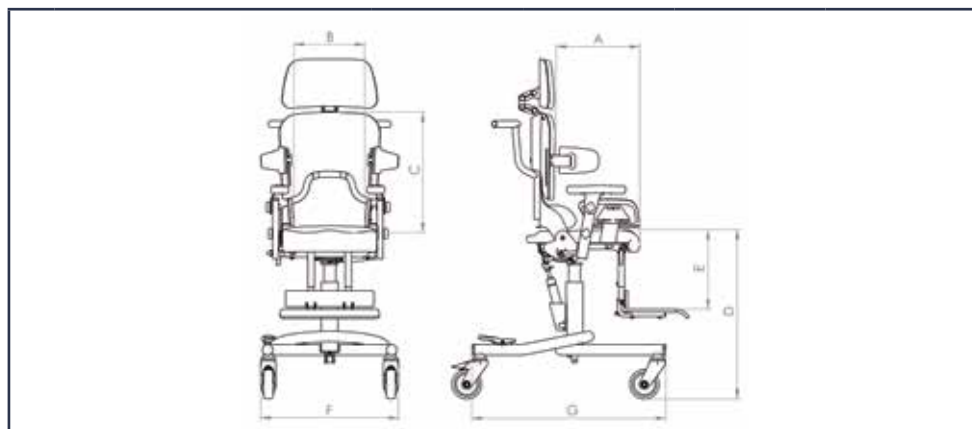

### Medidas - modelo básico

		MADITA Ta. 0	MADITA Ta. 1	MADITA Ta. 1 b	MADITA Ta. 2
A	Fondo del asiento	15 - 25 cm	21 - 30 cm	26 - 36 cm	30 - 42 cm
B	Anchura del asiento	16 - 26 cm	20 - 30 cm	20 - 30 cm	28 - 38 cm
C	Altura del respaldo con respaldo corto	35 - 43 cm	35 - 43 cm	42 - 52 cm	42 - 52 cm
C	Altura del respaldo con respaldo largo	42 - 52 cm	42 - 52 cm	53 - 63 cm	53 - 63 cm
D	Altura del asiento	46 - 58 cm	46 - 58 cm	46 - 58 cm	46 - 58 cm
D	Altura del asiento con bastidor bajo	35 - 40 cm	35 - 40 cm	-	-
E	Longitud de la pantorrilla	17 - 24 cm	22 - 32 cm	27 - 38 cm	30 - 48 cm
F	Anchura total	45 cm	45 cm	53 cm	53 cm
G	Bastidor largo	66 cm	66 cm	77 cm	77 cm
	Ángulo del asiento	(-)5° - 37°	(-)5° - 37°	(-)5° - 37°	(-)5° - 37°
	Inclinación del respaldo	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°
	Carga máx.	30 kg	30 kg	45 kg	50 kg
	Peso	16 kg	17 kg	18 kg	19 kg



## 7. Garantía

Todos los productos disponen de la garantía legal de dos años. La garantía comienza en el momento de la entrega o cesión de la mercancía. Si dentro de ese plazo ocurre un fallo de material o de fabricación demostrado en la mercancía que hemos entregado, revisaremos el daños reclamado tras un reenvío a nosotros con los portes pagados y, si procede, según escojamos lo repararemos o enviaremos un producto nuevo.



## 8.2 Número de serie / Fecha de fabricación

Los números de serie, la fecha de fabricación y otros datos están en la placa de identificación, que está en todos nuestros productos (A).

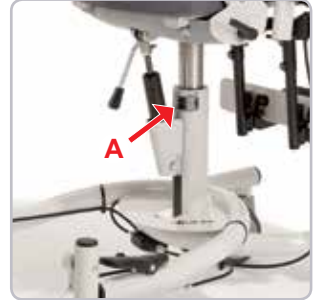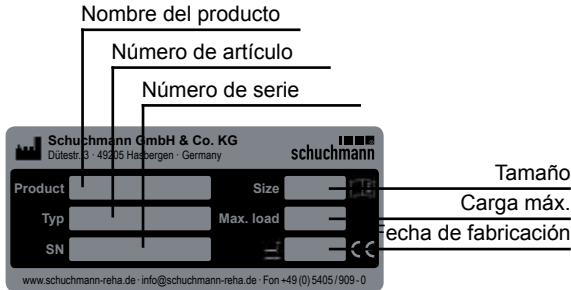

## 8.3 Versión del producto

La silla terapéutica MADITA Maxi está disponible en cuatro tamaños y se puede completar con variados accesorios (véase el punto 4).

## 8.4 Edición del documento

Instrucciones de uso MADITA - Versión A; edición 06.2018

## 8.5 Nombre y dirección del fabricante, distribuidor especializado

Este producto ha sido fabricado por:



### Schuchmann GmbH & Co. KG

Dütestraße 3 · 49205 Hasbergen

Tel. +49 (0)5405/909-0 · Fax +49 (0)5405/909-109

info@schuchmann-reha.de · www.schuchmann-reha.de

Este producto ha sido entregado por el siguiente distribuidor especializado:

