

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre cualquier aspecto del cojín Axiom AS o Axiom ASP, no dude en comunicarse con nosotros por:


Teléfono:
715-254-0991

Escribiendo a:
Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
U.S.A

O vía email:
sales@kimobility.com

AXIOM | AS

AXIOM | ASP

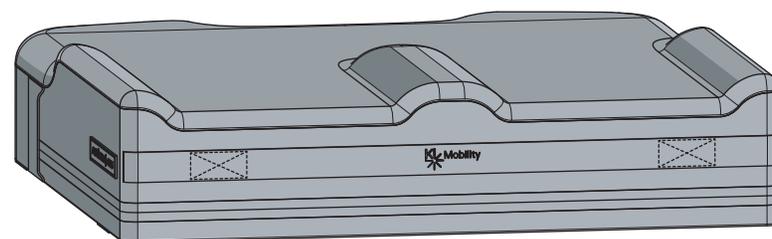


Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, Wisconsin 54481
715-254-0991
www.kimobility.com

MONTAJE & AJUSTE


GUÍA

AXIOM AS | AXIOM ASP INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE


1 Retire la funda.

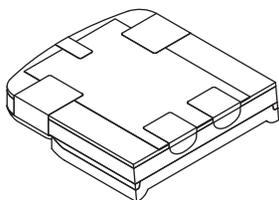


2 Suelte el velcro que sujeta las inserciones de líquido isquiático de la base del cojín y observe dónde estaban ubicadas. Vuelva a colocarlas en la parte delantera del cojín, lo que le permitirá sacar el extremo de la inserción para sacarlo del depósito. Apriete el líquido hacia la parte trasera de la inserción y sáquela del extremo del depósito.

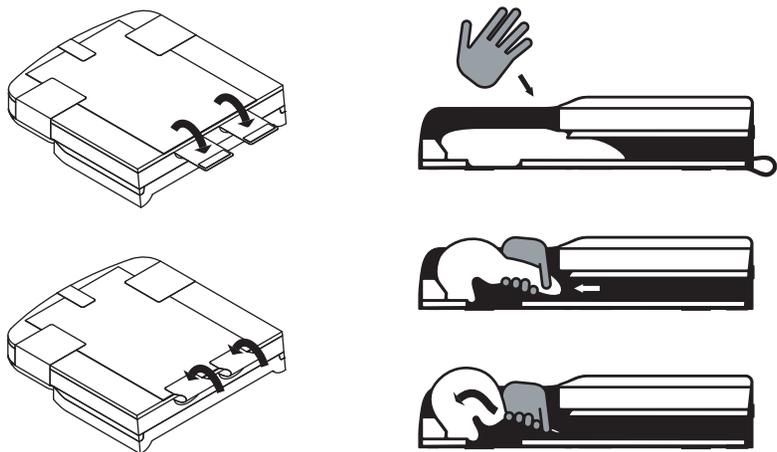


3 Vuelva a montar el cojín, volviendo a colocar el velcro de la base en su posición original.

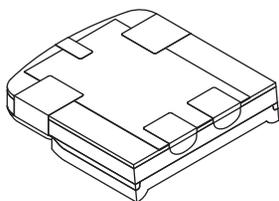

4 Coloque el cojín en la silla del usuario, situándolo adecuadamente, y asegurándose de que la pelvis se colocará sobre el área líquida del cojín.

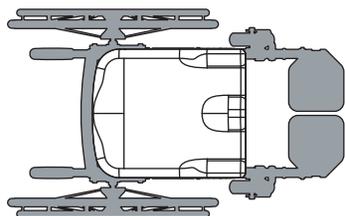


5 Dejando el frente abierto, transfiera o permita que el usuario se transfiera al cojín. Evite presionar el centro del área de fluido con las manos durante la transferencia.

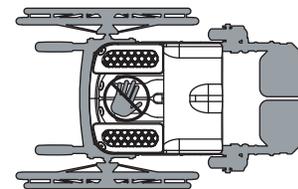

6 Permita o ayude al usuario a ajustarse a la postura deseada sobre el cojín.


7 El líquido responderá lentamente a la presión sobre las inserciones, forzando al líquido a fluir desde la inserción isquiática hacia los depósitos. Esto puede tomar de 3 a 7 minutos. La mayoría de los usuarios pueden informarle cuando han dejado de sumergirse o "hundirse". También puede verificar la inmersión asegurándose de que las inserciones trocántéricas estén cargadas y, por lo tanto, deformadas.

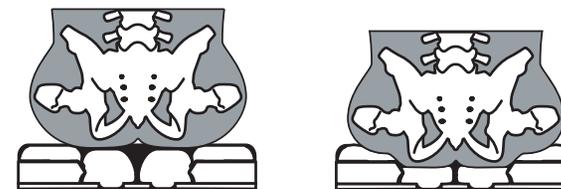


8 Mientras el usuario aún está sentado en la postura adecuada, inserte las cuñas hasta que note resistencia.




9 Empuje las cuñas hasta que el siguiente corte en la cuña se alinee con la parte delantera de la base de espuma.

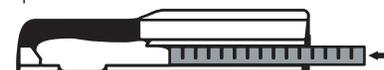

10 Retire la parte sobresalga de de cada cuña.

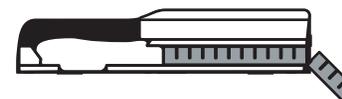

11 Con las cuñas colocadas, cierre la cremallera del cojín.

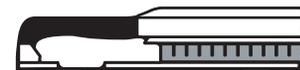

NOTA: Las posturas asimétricas, como una oblicuidad pélvica, pueden hacer que las cuñas izquierda y derecha tengan una longitud diferente.

- Si es necesario, puede ajustar el cojín para reducir aún más la carga isquiática, tirando las cuñas 1 sección hacia adelante permitiendo que fluya más líquido hacia el depósito
- Alternativamente, puede forzar el fluido hacia atrás insertando uno o más cuñas de depósito que sean una sección más larga.