



TRAK



MANUAL DE USUARIO

PROVEEDOR: ESTE MANUAL DEBE DARSE AL USUARIO DE ESTA BASE DE MOVILIDAD

USUARIO: LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTA BASE DE MOVILIDAD Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS

El producto entregado puede variar del descrito y representado en este manual.

Ha hecho una gran elección para su hijo al elegir una silla Leggero. Creemos que cada niño debe ser capaz de funcionar lo mejor que pueda. Agradecemos preguntas y comentarios sobre nuestros productos y servicios. Póngase en contacto con nosotros o con un proveedor autorizado utilizando la información a continuación.

Leggero
174 D Shepherd Trail
Bozeman, MT 59718
Toll Free: 1-844-503-KIDS
www.leggero.us

Proveedor Leggero Autorizado:

Nombre del proveedor	
Dirección	
Teléfono	
Email	
Website	

Representante Europeo autorizado:

EC REP	MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany	
---	---	--

Índice de contenidos

Sección 1: Introducción y características		Page
1.1	Introducción	4
1.2	Usuario de Trak	4
1.3	Asistente del usuario de Trak	4
1.4	Términos de garantía	4
1.5	Servicio y reparaciones	4
1.6	Características	5
1.7	Componentes del asiento y posicionamiento	6
1.8	Ajustabilidad y especificaciones	7
Sección 2: Advertencias		8
Sección 3: Desempacando su silla Trak		11
Sección 4: Operación y Ajuste		12
4.1	Frenos de ruedas	12
4.2	Ajuste del ángulo del manillar	13
4.3	Ajuste del ángulo de rodilla	13
4.4	Ajuste del ángulo de cadera	13
4.5	Ajuste de inclinación	14
4.6	Plegado	14
4.7	Ajuste de altura del reposapiés	15
4.8	Ajuste del ángulo del reposapiés	16
4.9	Ajuste de altura del respaldo	16
4.10	Ajuste de profundidad del asiento	17
4.11	Ajuste y extracción del reposabrazos	17
4.12	Uso de la bandeja de posicionamiento	18
4.13	Cerraduras Giratorias de ruedas	18
4.14	Instalación de extensión de asiento	19
4.15	Usando la Trak como asiento en un vehículo	20
4.16	Uso del cojín	21
4.17	Ajuste de poste IV	22
4.18	Instalación y extracción del soporte de O2	22
4.19	Bandeja de equipo	23
4.20	Soporte LTV para LTV950	23
Sección 5: Garantía limitada		24
Sección 6: Mantenimiento y registro de mantenimiento		25

Sección 1: Introducción, advertencias y características

1.1 Introducción

Gracias por elegir la silla Trak. Este manual explica cómo operar, ajustar y mantener su silla Trak. El producto descrito está sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

Lamentamos no poder ofrecer esta información de usuario en un formato apropiado para personas con discapacidad visual. Las personas con discapacidad visual deben comunicarse con un proveedor autorizado de Leggero para obtener información e instrucciones en forma de comunicación verbal y capacitación práctica si es necesario.

1.2 Usuario de Trak

Las sillas de rehabilitación y los sistemas de posicionamiento pediátrico son apropiados para niños que están limitados a una posición sentada y requieren movilidad y asistencia de posicionamiento. Las personas que necesitan dicha asistencia pueden tener una amplia variedad de diagnósticos que limitan su capacidad de lograr movilidad sin dicho sistema. Para obtener la clasificación de ocupación máxima y especificaciones adicionales, consulte la sección 1.7 de este manual.

1.3 Asistente del usuario de Trak

Los asistentes que operan la silla deben ser visual, mental y físicamente capaces de operar la silla de manera segura bajo cualquier circunstancia. Los asistentes deben leer y seguir todas las instrucciones proporcionadas en este manual.

1.4 Términos de garantía


La garantía se aplica solo cuando el producto se usa de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y para los fines previstos y las condiciones especificadas del producto. Consulte la sección 5 para obtener información completa sobre la garantía.

1.5 Servicio y reparaciones


El servicio y la reparación de la silla Trak solo deben ser realizados por proveedores autorizados de Leggero. Si surge algún problema, comuníquese con el proveedor que suministró la silla. Los proveedores autorizados solo reemplazan e instalan piezas de repuesto originales de Leggero.



1.6 Características

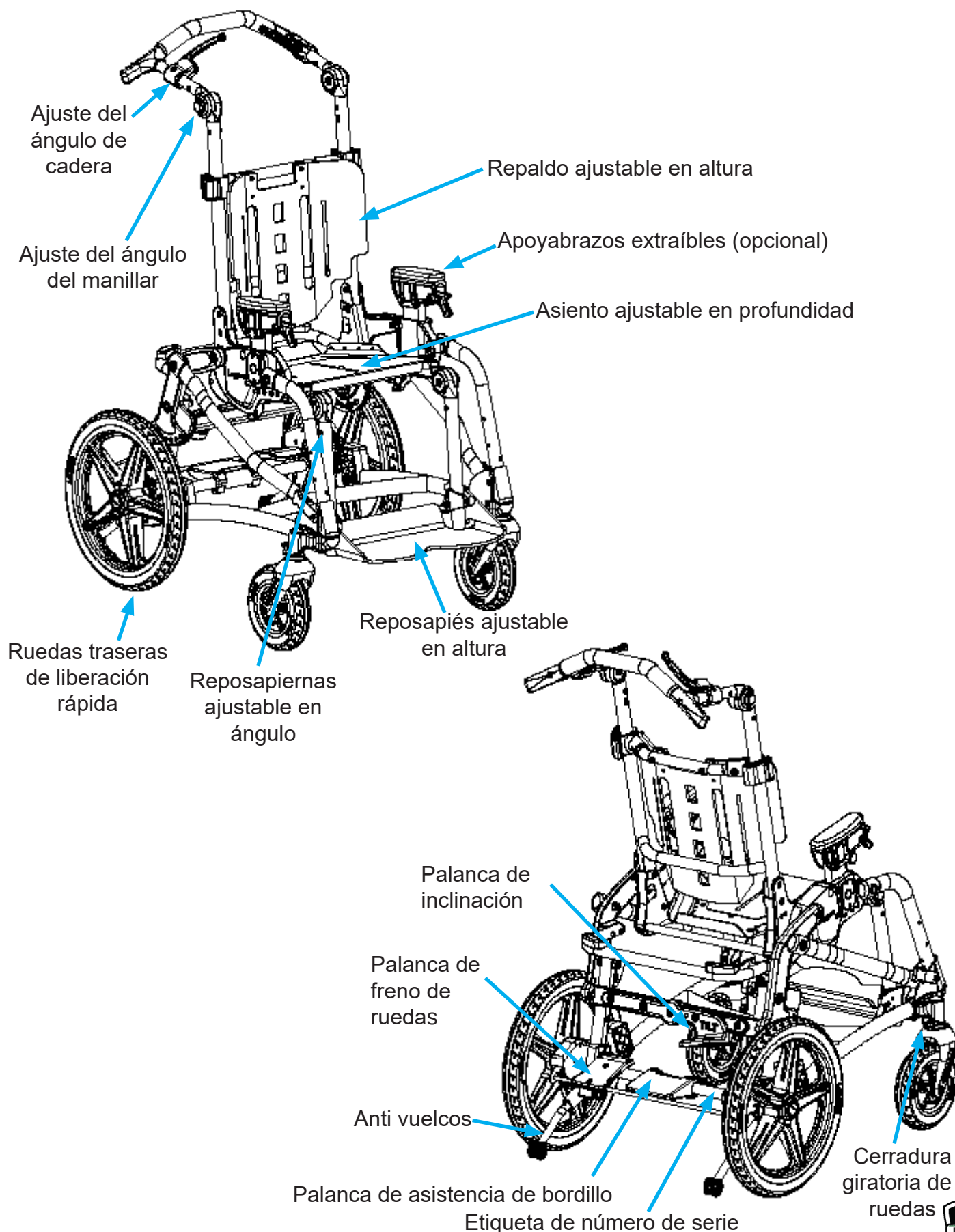


1.7 Componentes de asiento y posicionamiento

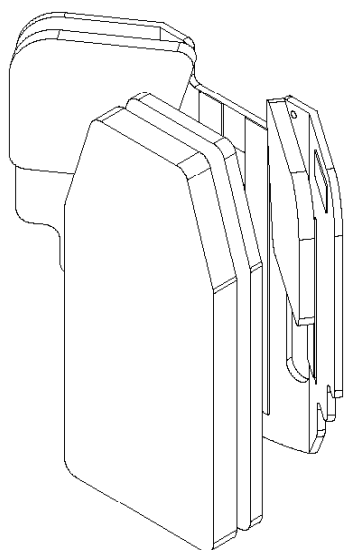


Cojín del respaldo

Consulte la Sección 4.16 para obtener información detallada

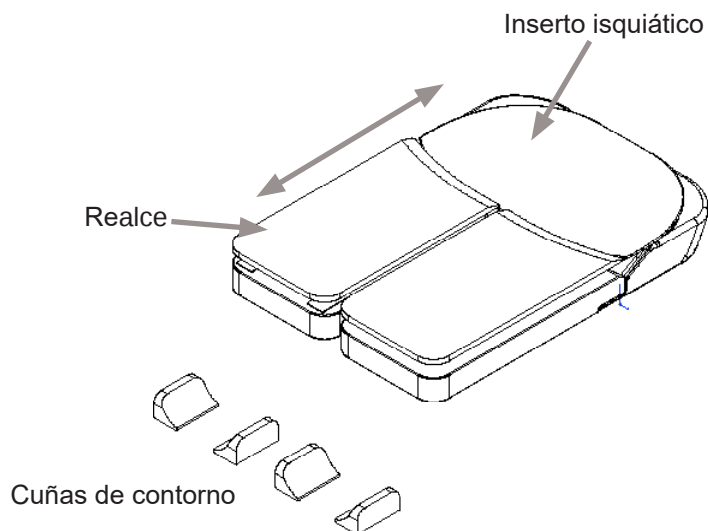


Cojín del asiento


Consulte la Sección 4.16 para obtener información detallada

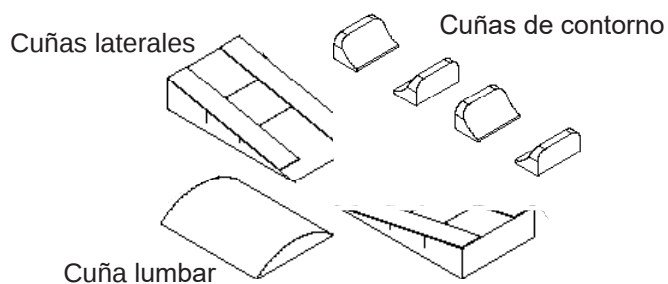

Kit de cuñas de posicionamiento extra

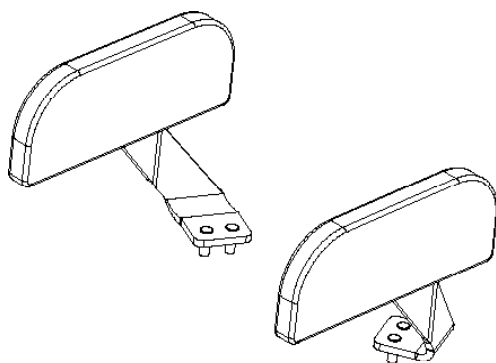

Apoyos pélvicos laterales

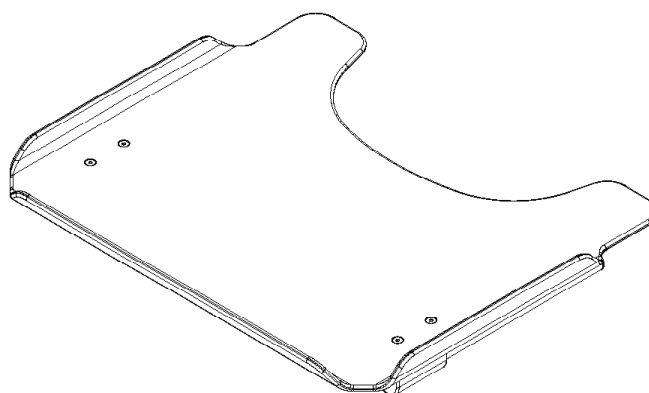

Bandeja de posicionamiento

1.8 Ajustabilidad y especificaciones

Especificaciones y rango de ajuste

	Trak 12	Trak 14
Límite de peso	80 lb / 36 kg	80 lb / 36 kg
Profundidad del asiento	6.5-15 in / 17-38 cm	6.5-15 in / 17-38 cm
Ancho del asiento	6-12 in / 15-30 cm	8-14 in / 20-36 cm
Altura de la espalda	12-19 in / 30-48 cm	13-19 in / 33-48 cm
Asiento a reposapiés	4-17 in / 10-43 cm	4-17 in / 10-43 cm
Rango de inclinación	45°	45°
Posiciones de ángulo de cadera	90°, 105°, 120°	90°, 105°, 120°
Máxima pendiente segura	5°	5°
Ancho promedio	22.5 in / 57 cm	24.5 in / 62 cm
Altura del mango de empuje	40-50 in / 101-127 cm	40-50 in / 101-127 cm
Longitud total	35 in / 89 cm	35 in / 89 cm
Diámetro de la rueda	7 in / 18 cm	7 in / 18 cm
Diámetro de la rueda trasera	16 in / 41 cm	16 in / 41 cm
Peso del silla	29 lb / 13 kg	29 lb / 13 kg
Plegada sin ruedas traseras	35 x 17 x 22.5 in 89 x 43 x 57 cm	35 x 17 x 24.5 in 89 x 43 x 62 cm
Plegada con ruedas traseras	36 x 21 x 22.5 in 92 x 51 x 57 cm	36 x 21 x 24.5 in 92 x 51 x 62 cm

Sección 2: Advertencias

Lea este manual completamente antes de usar

Todos los cuidadores y/o asistentes deben leer este manual del usuario antes de operar la silla Trak. Familiarícese con el manejo y las funciones del producto antes de su uso real. Si hay alguna información en este manual que no comprende, comuníquese con su proveedor autorizado de Leggero para obtener ayuda.

Si no sigue las instrucciones o no cumple con las advertencias contenidas en este manual, podría sufrir lesiones personales y/o daños a la silla Trak, lo que podría anular la garantía.

Símbolos utilizados en las etiquetas de advertencia del producto y en el manual del usuario



¡ADVERTENCIA!

La palabra “ADVERTENCIA” o este símbolo indican prácticas que no son seguras o peligrosas y que podrían ocasionar lesiones graves al ocupante y/o cuidador.



¡ADVERTENCIA! LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Elija la silla adecuada y las opciones de seguridad

En la industria de la movilidad, hay varias opciones disponibles para satisfacer las necesidades de los niños. Asegúrese de que su elección (y la de su proveedor) de silla y otras opciones tenga en cuenta la comodidad, la posición, las limitaciones físicas y los riesgos de su hijo que pueden encontrarse durante el uso diario.

Advertencias: el incumplimiento de estas advertencias podría provocar lesiones graves o la muerte

¡ADVERTENCIA! Todos los cuidadores y/o asistentes deben leer este manual del usuario antes de operar la silla Trak. Familiarícese con el manejo y las funciones del producto antes de su uso real. Si hay alguna información en este manual que no comprende, comuníquese con su proveedor autorizado de Leggero para obtener ayuda.

¡ADVERTENCIA! El uso y/o manejo no convencional del producto puede ser peligroso. La silla de paseo no es adecuada para correr, patinar o actividades similares. Las ruedas delanteras giratorias pueden tambalearse a mayor velocidad y pueden causar una parada repentina y volcarse de la silla. Use la silla de paseo solo a una velocidad de caminata normal. Bajo ninguna circunstancia debe soltar el manillar mientras empuja. Nunca se aleje de la silla.

¡ADVERTENCIA! La configuración inicial de esta silla de paseo debe ser realizada por un técnico calificado.

¡ADVERTENCIA! Los procedimientos que no sean los descritos en este manual deben ser realizados por un técnico calificado.

¡ADVERTENCIA! El peso que lleva la silla Trak no debe exceder el límite de peso total (peso máximo del ocupante más el peso de los accesorios y / o artículos transportados).

¡ADVERTENCIA! Los ajustes realizados en la silla pueden afectar la estabilidad y aumentar el riesgo de vuelco. Los ajustes deben ser realizados por su proveedor Leggero autorizado.

¡ADVERTENCIA! Evite mojar la silla o guardarla en ambientes húmedos. El exceso de humedad puede causar óxido o corrosión, lo que puede provocar la falla del componente. Si la silla está expuesta a la humedad, séquela bien.

¡ADVERTENCIA! No deje la silla o al niño al sol o cerca de otras fuentes de calor, ya que las superficies de la silla pueden alcanzar temperaturas capaces de quemar al niño. No deje la silla o al niño afuera en temperaturas frías porque el contacto con una silla a temperaturas bajo cero podría provocar lesiones. La exposición a temperaturas extremadamente altas o bajas pueden dañar la silla.

¡ADVERTENCIA! La silla solo debe usarse en terreno sólido y nivelado. No intente empujar la silla hacia arriba o hacia obstáculos. Siempre retire al niño de la silla cuando levante la silla para pasar por obstáculos.

¡ADVERTENCIA! No use la silla en pendientes de más de 5 grados. No deje la silla estacionada en un desnivel o una pendiente. Preste especial atención cuando esté en pendientes e inclinaciones para evitar que el niño se caiga de la silla, la silla se vuelque o la silla se ruede.

¡ADVERTENCIA! Antes de abandonar la silla y antes de entrar y salir de ella, active siempre los frenos de las ruedas. No use los frenos de las ruedas para detener la silla mientras se mueve.

¡ADVERTENCIA! Nunca deje a su hijo desatendido en la silla, incluso si está atado y los frenos de las ruedas están enganchadas.

¡ADVERTENCIA! Si el ocupante de la silla busca objetos al frente, a los lados o detrás de la silla, asegúrese de que no se inclinen demasiado. El cambio del centro de gravedad puede hacer que la silla se vuelque.

¡ADVERTENCIA! Si está equipado con neumáticos, la presión de los neumáticos influye en el manejo de la silla. Los neumáticos correctamente inflados mejoran considerablemente su maniobrabilidad. La presión de aire de los neumáticos delanteros y traseros debe ser de al menos 35 PSI / 240 kPa.

¡ADVERTENCIA! Tenga en cuenta que con ciertos ajustes del reposapiés, el reposapiés puede chocar con las ruedas delanteras.

¡ADVERTENCIA! No se pare sobre el reposapiés cuando lo transfiera dentro o fuera de la silla.

¡ADVERTENCIA! Mientras la silla esté ocupada, nunca intente ajustar el ángulo de la cadera y el ángulo de inclinación simultáneamente. El ajuste del ángulo de la cadera mientras se inclina la silla podría provocar que la silla se mueva en un estado parcialmente plegado, lo que podría lesionar al ocupante.

¡ADVERTENCIA! Al plegar la silla, tenga en cuenta que existe el riesgo de lesiones si los dedos se aplastan o quedan atrapados. Consulte la sección 4.6 de este manual para obtener más información.

¡ADVERTENCIA! La silla solo está diseñada para transportar a un niño a la vez. No cargue más de un niño a la vez.

¡ADVERTENCIA! Solo levante la silla por partes que estén firmemente unidas. Preferentemente del marco lateral deben levantar la silla siempre que sea posible. Si está plegado, sostenga la silla por los tubos del marco lateral inferior. Siempre use dos personas para levantar para evitar lesiones y daños a la silla.

¡ADVERTENCIA! Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. Deseche todo el material de empaque plástico inmediatamente después de desempacar.

¡ADVERTENCIA! Si su silla no está equipada con la opción de tránsito, no la use como asiento en un vehículo motorizado. Transfiera al niño de la silla a un asiento aprobado para vehículos motorizados. Si su silla está equipada con la opción de transporte, consulte la sección 4.15 de este manual.

¡ADVERTENCIA! La silla debe ser inspeccionada y mantenida según la tabla en la Sección 6: Mantenimiento. Los problemas detectados deben repararse antes de reanudar el uso de la silla.

¡ADVERTENCIA! Muchos de los sujetadores utilizados para construir la silla Trak consisten en un perno con una tuerca que contiene un anillo de bloqueo de nylon. Estas conexiones deben mantenerse y asegurarse con los sujetadores del equipo original y ajustarse adecuadamente. Para un ajuste adecuado de los puntos de pivote, consulte a su proveedor de servicio autorizado.



Sección 3: Desempacando su silla Trak

1. Retire la silla del embalaje.
2. Deseche todos los materiales de embalaje de plástico.
3. Instale las ruedas delanteras, consulte la Figura 1.
4. Instale las ruedas traseras, consulte la Figura 2.
5. Verifique el ajuste adecuado de los ejes de liberación rápida tirando de la rueda hacia afuera. La rueda debe mantenerse en su lugar.
6. Enganche los frenos de las ruedas, consulte la sección 4.1 de este manual.
7. Instale antivuelco, consulte la Figura 3.
8. Despliegue el marco y el respaldo del asiento, consulte la Sección 4.6 de este manual.
9. Si la silla está equipada con neumáticos, verifique la presión de los neumáticos. La presión de los neumáticos debe ser de 35 PSI / 240 kPa.

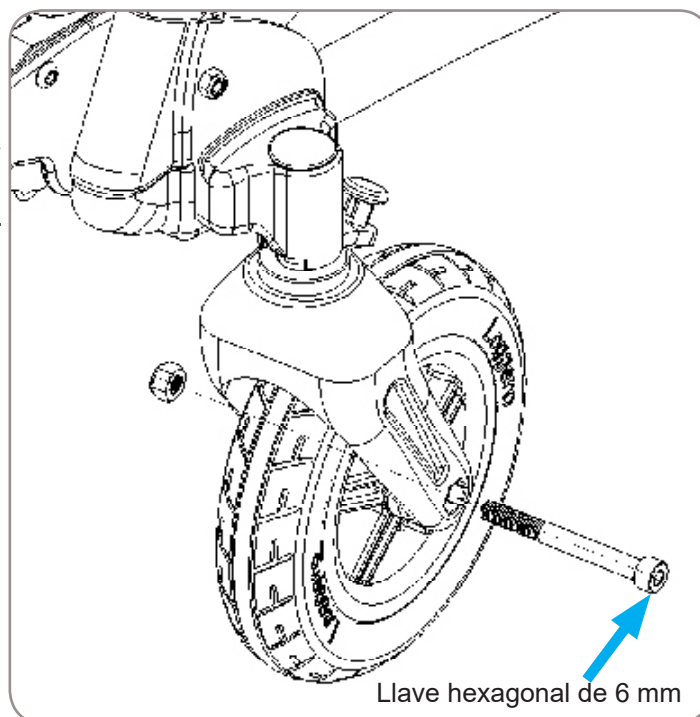


Figura 1

¡ADVERTENCIA! Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. Deseche todo el material de empaque plástico inmediatamente después de desempacar.

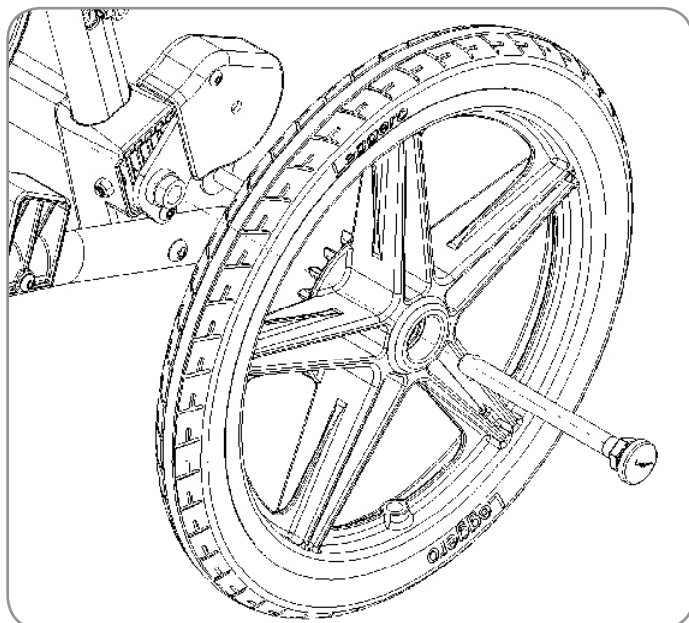


Figura 2


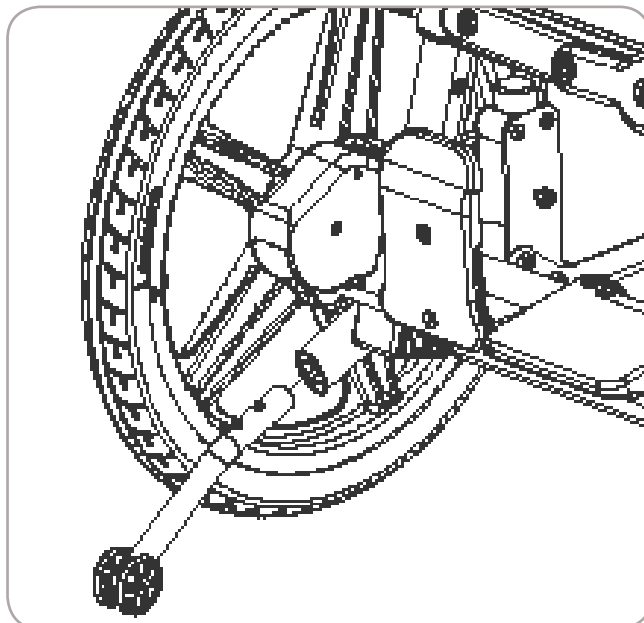



Figura 3

Sección 4: Operación y Ajuste


Herramientas necesarias:

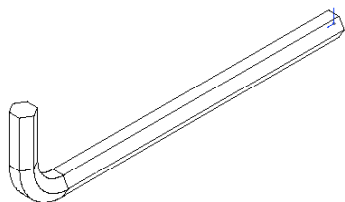

Llave hexagonal de 4 mm

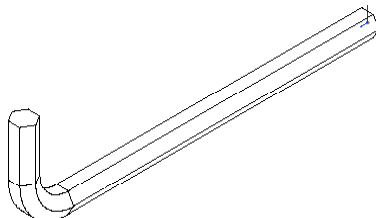

Llave hexagonal de 5 mm

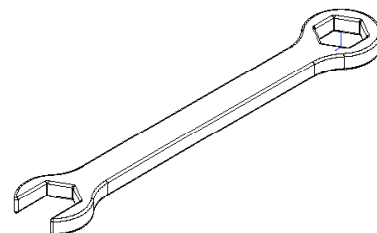

Llave de 10 mm

4.1 Operación de frenado de las ruedas

1. Para activar el freno de la rueda, presione el pedal rojo. Referencia Figura 4.
2. Verifique que los frenos de las ruedas estén activados a cada lado moviendo ligeramente la silla de adelante hacia atrás.
3. Para desactivar el freno de la rueda, empuje hacia adelante en la parte superior del pedal rojo. Figura 5.

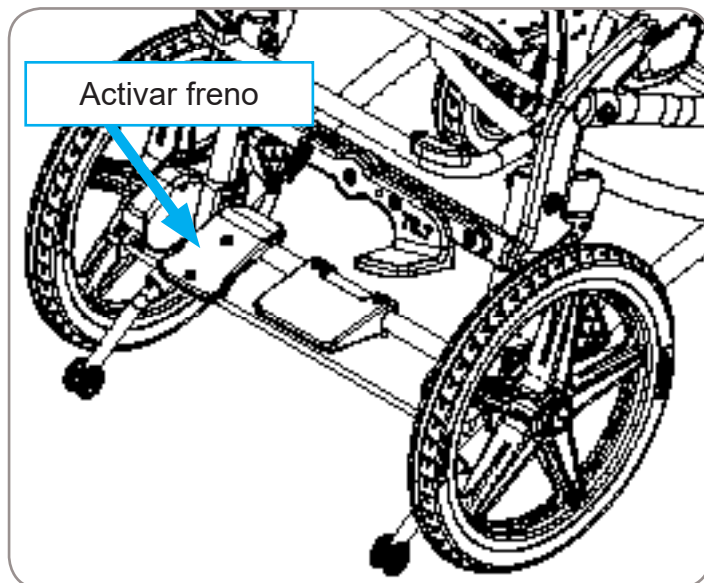


Figura 4

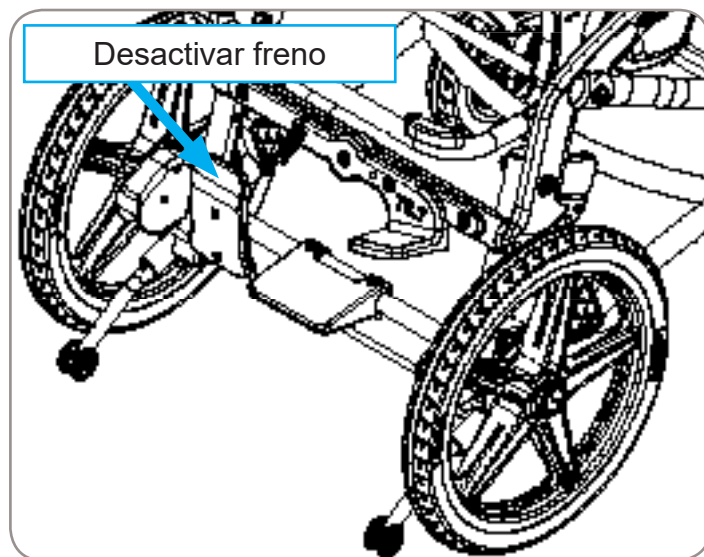


Figura 5

4.2 Ajuste del ángulo del manillar

1. Mantenga presionados los botones en el exterior de cada barra de ajuste, consulte la Figura 6.
2. Ajuste el manillar al ángulo deseado.
3. Suelte los botones.

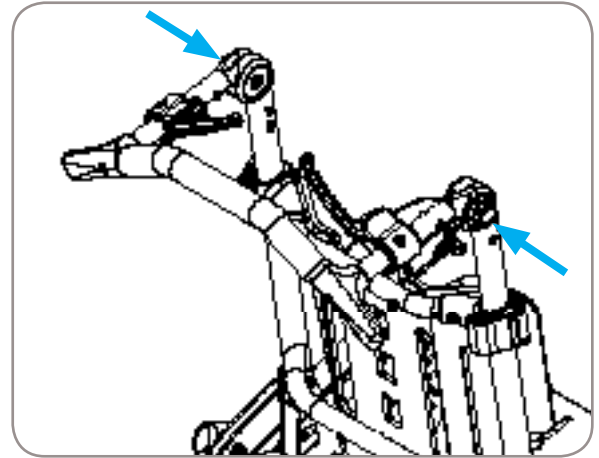


Figura 6

4.3 Ajuste del ángulo de rodilla

1. Mantenga presionados los botones en el exterior de cada barra de ajuste, consulte la Figura 7.
2. Ajuste las rodillas al ángulo deseado.
3. Suelte los botones.

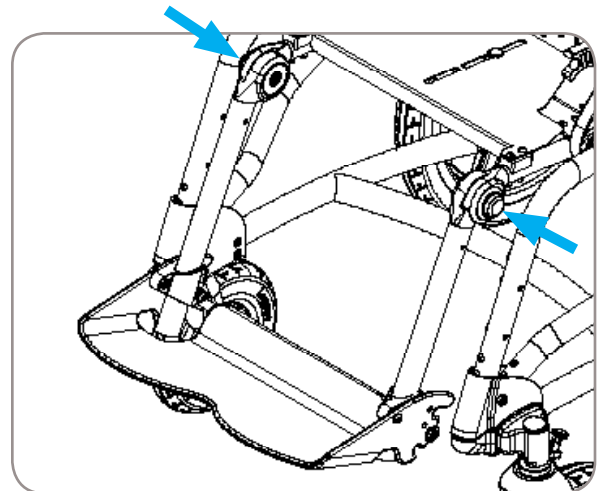


Figura 7

4.4 Ajuste del ángulo de cadera

1. Coloque el freno de las ruedas.
2. Tire hacia atrás de las palancas izquierda y derecha, consulte la Figura 8.
3. Ajuste el ángulo de la cadera a la posición deseada y suelte las palancas de mano.
4. Asegúrese de que la posición del ángulo de la cadera esté correctamente enganchada. Pruebe aplicando fuerza hacia arriba y hacia abajo en el manillar.

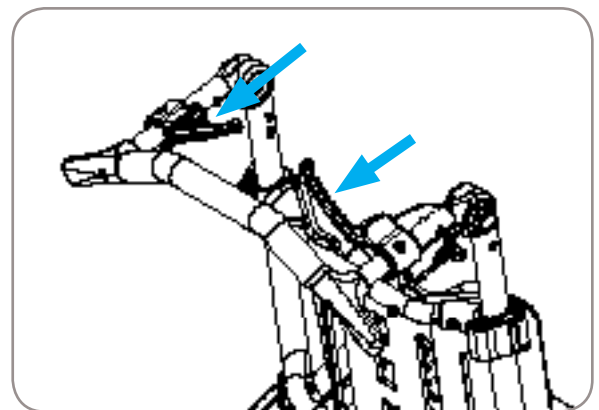


Figura 8

¡ADVERTENCIA! Mientras la silla esté ocupada, nunca intente ajustar el ángulo de la cadera y el ángulo de inclinación simultáneamente. El ajuste del ángulo de la cadera mientras se inclina la silla podría provocar que la silla se mueva en un estado parcialmente plegado, lo que podría lesionar al ocupante.

4.5 Ajuste de inclinación

1. Coloque el freno de las ruedas.
2. Coloque ambas manos en el manillar.
3. Usando su pie, empuje hacia abajo la palanca del pie de ajuste de inclinación.
4. Ajuste el ángulo de inclinación del asiento a la posición deseada.
5. Suelte la palanca del pie.
6. Antes de soltar el manillar, empuje hacia arriba y hacia abajo para asegurarse de que el marco del asiento esté firmemente bloqueado en su posición.

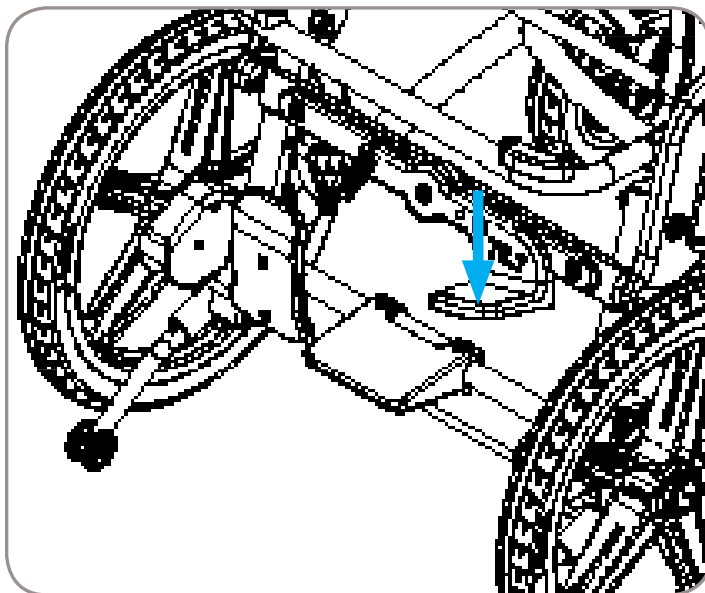


Figura 9

¡ADVERTENCIA! Mientras la silla esté ocupada, nunca intente ajustar el ángulo de la cadera y el ángulo de inclinación simultáneamente. El ajuste del ángulo de la cadera mientras se inclina la silla podría provocar que la silla se mueva en un estado parcialmente plegado, lo que podría lesionar al ocupante.

4.6 Plegado y desplegado

1. Coloque el freno de las ruedas.
2. Tire hacia atrás de los mecanismos de ajuste del ángulo de cadera **1** y sosténgalo.
3. Use el pie para empujar hacia abajo la palanca del pie de ajuste de inclinación **2**.
4. Empuje el manillar hacia adelante **3** hasta que la silla se pliegue.
5. Para desplegarlo, agarre el manillar y jale el respaldo hacia atrás hasta que el marco del asiento encaje en su posición.
6. Enganche el conjunto de la espalda en la posición más vertical del ángulo de la cadera.
7. Ajuste a la posición de inclinación deseada.
8. Ajuste a la posición deseada del ángulo de la cadera.

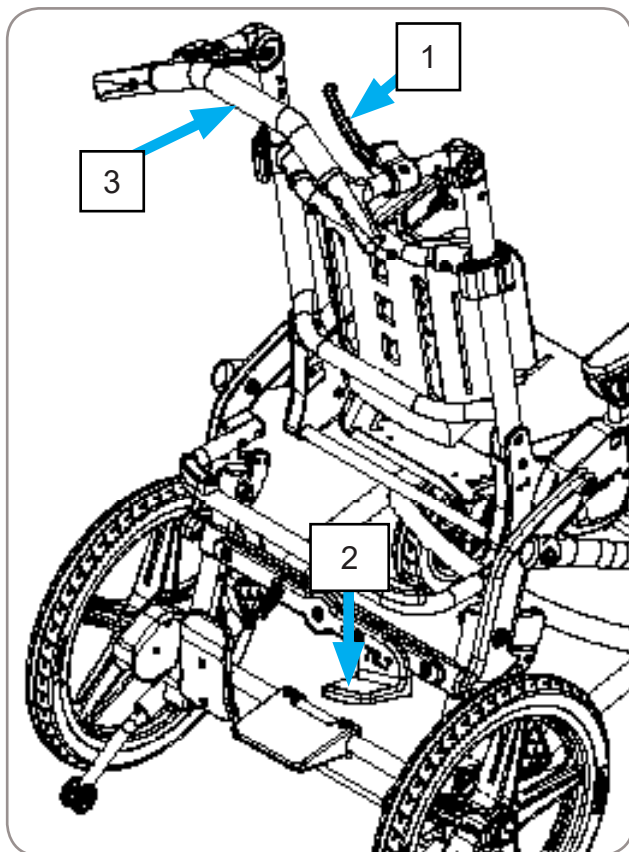


Figura 10

4.6 Plegado y desplegado - Continuación

¡ADVERTENCIA! Al plegar o desplegar, mantenga los brazos, manos y pies alejados de los componentes móviles para evitar lesiones. Figura de referencia 11, Las flechas indican posibles puntos de pellizco.



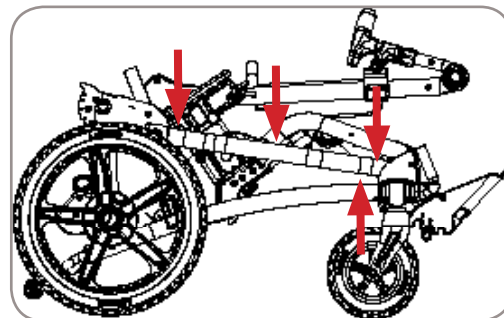



Figura 11

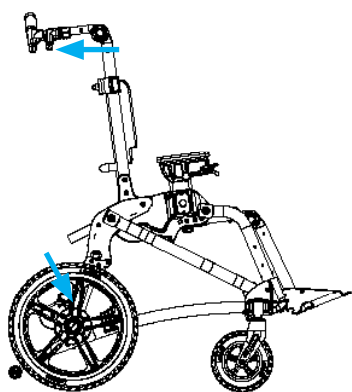


Tire de las palancas manuales de ángulo de cadera

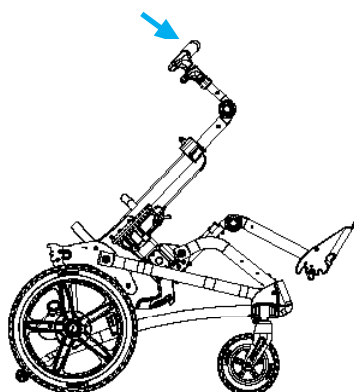

Empujar hacia adelante

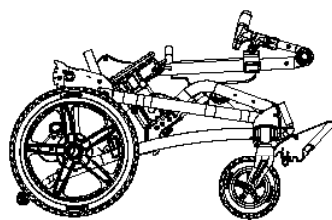

Trak en posición plegada

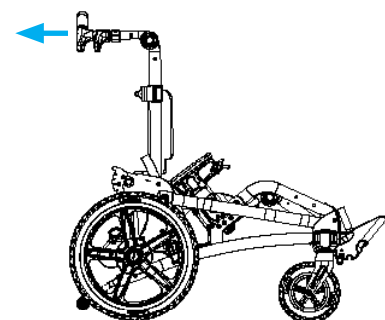

Despliegue

4.7 Ajuste de altura del reposapiés

Reposapiés ajustable en ángulo (opcional):

1. Afloje los pernos en el interior de las abrazaderas con una llave hexagonal de 4 mm, 2 pernos por lado. Referencia Figura 13.
2. Ajuste el reposapiés a la altura deseada.
3. Apriete los pernos.

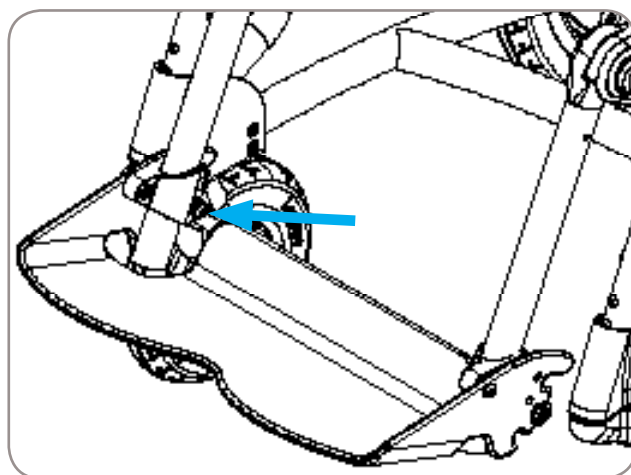


Figura 13

Ajuste de altura del reposapiés estándar:

1. Afloje los pernos / tuercas en las abrazaderas con una llave hexagonal de 4 mm y una llave de 10 mm, 2 pernos / tuercas por lado. Referencia Figura 14.
2. Ajuste el reposapiés a la altura deseada.
3. Apriete los pernos / tuercas.

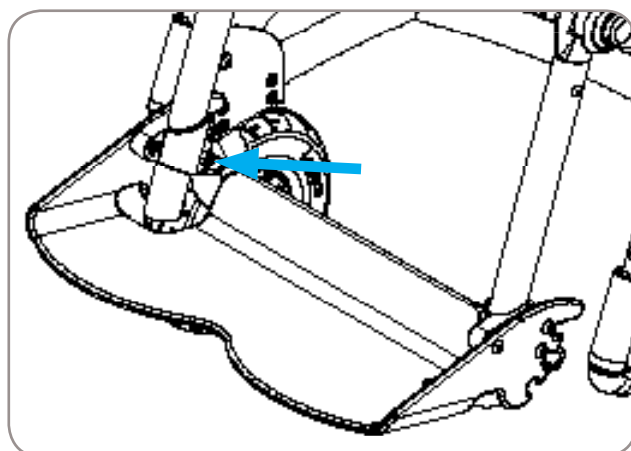


Figura 14

4.8 Ajuste del ángulo del reposapiés

Reposapiés ajustable en ángulo solamente (opcional)

1. Tome el centro de la barra de ajuste y tire hacia atrás, consulte la Figura 15.
2. Gire el reposapiés a la posición deseada.
3. Suelte la barra de ajuste.
4. Verifique que la barra de ajuste esté completamente enganchada en la ranura de la plantilla levantando y empujando hacia abajo la parte delantera de la plantilla.

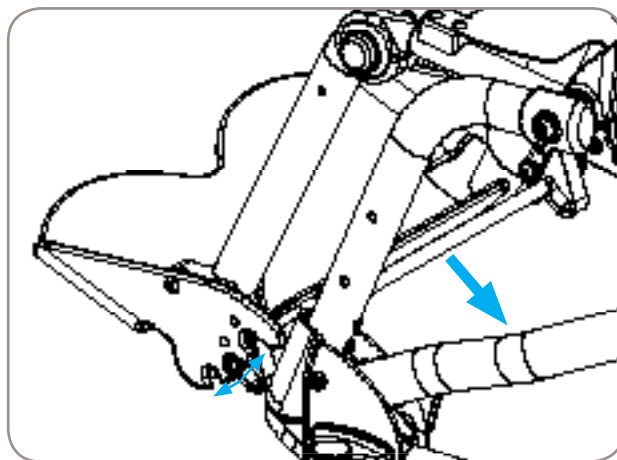


Figura 15

4.9 Ajuste de altura del respaldo

1. Tire de las palancas de ajuste de altura hacia afuera, consulte la Figura 16.
2. Ajuste la altura del respaldo a la posición deseada.
3. Empuje las palancas de ajuste de altura hacia adentro hasta que encajen en la posición de bloqueo.


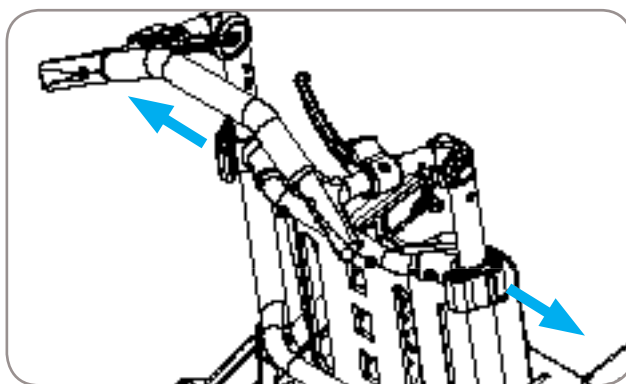


Figura 16



Desbloqueado

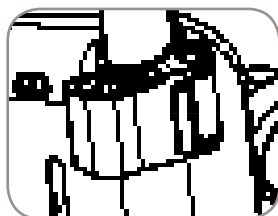

Bloqueado

Para ajustar la altura de la espalda a más de 17", será necesario ajustar la posición de la placa del paquete.

1. Retirar el cojín del respaldo.
2. Retire los pernos que sujetan la placa posterior al tubo transversal con una llave hexagonal de 4 mm y una llave de 10 mm. Referencia Figura 17.
3. Vuelva a instalar la placa con los pernos a través de los orificios inferiores de la placa posterior. Referencia Figura 18.
4. Vuelva a instalar el cojín del respaldo.

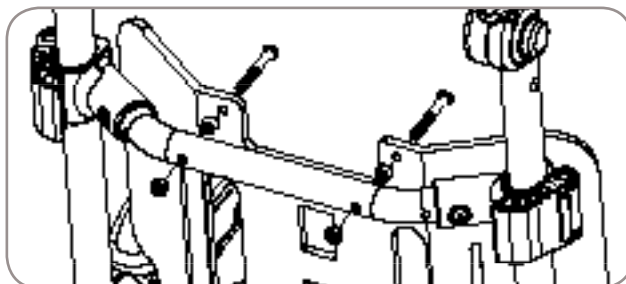


Figura 17


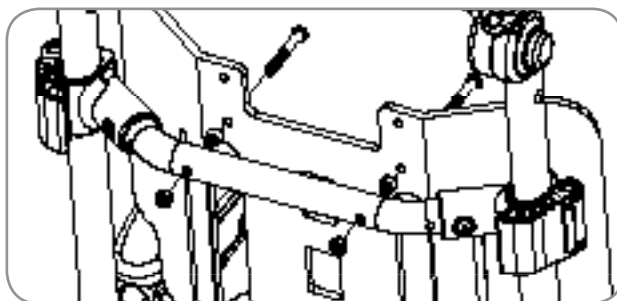


Figura 18

4.10 Ajuste de profundidad de asiento

1. Afloje las correas del cojín del asiento.
2. Afloje la perilla debajo del centro de la placa del asiento.
3. Ajuste el conjunto del asiento delantero a la profundidad deseada.
4. Apriete la perilla.
5. Apriete las correas del cojín del asiento.

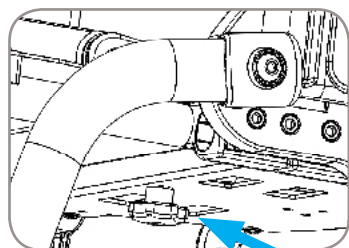

Perilla

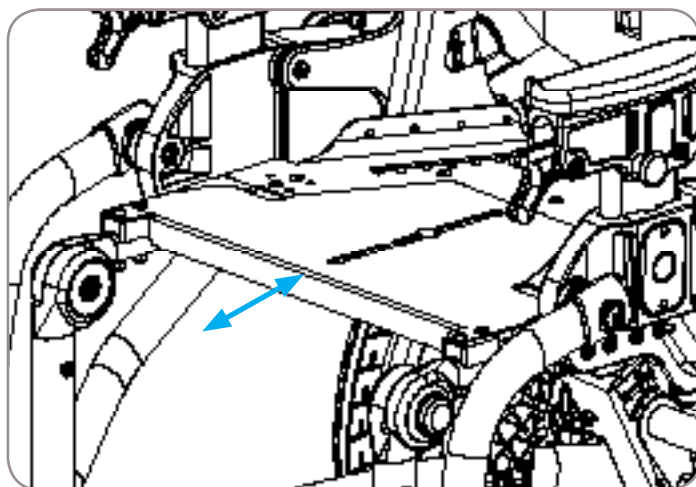


Figura 19

4.11 Ajuste y extracción del reposabrazos

1. Para ajustar la altura, presione el botón **1** y ajuste el reposabrazos hacia arriba o hacia abajo. Suelte el botón para bloquearlo en su lugar.
2. Para quitar el reposabrazos, presione el botón **1** y extraiga el conjunto del reposabrazos hacia arriba del receptor.
3. Para volver a instalar, empuje el reposabrazos hacia adentro hasta que encaje en su lugar. Ajuste hacia abajo si es necesario.
4. Para ajustar el ángulo, tire del émbolo **2** hacia afuera y gire la parte delantera del reposabrazos hacia abajo. Suelte el émbolo y asegúrese de que encaje en su posición.

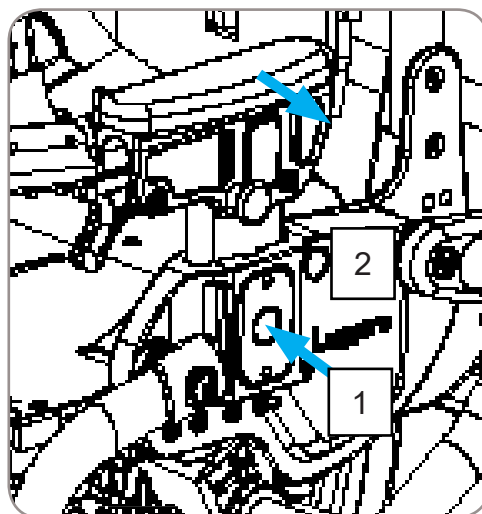


Figura 20

4.12 Uso de la bandeja de posicionamiento

1. Ajuste los reposabrazos / receptores de bandeja al ángulo deseado.
2. Gire las levas de la bandeja izquierda y derecha hacia abajo. Referencia Figura 21.
3. Deslice la bandeja en los receptores y ajústela a la profundidad deseada.
4. Gire las levas de la bandeja izquierda y derecha hacia arriba para bloquearla en su lugar. Referencia Figura 22.

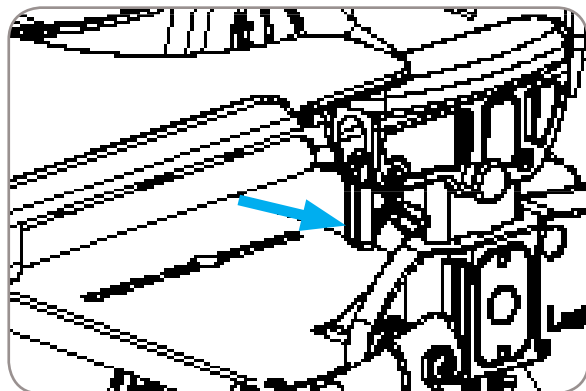


Figura 21

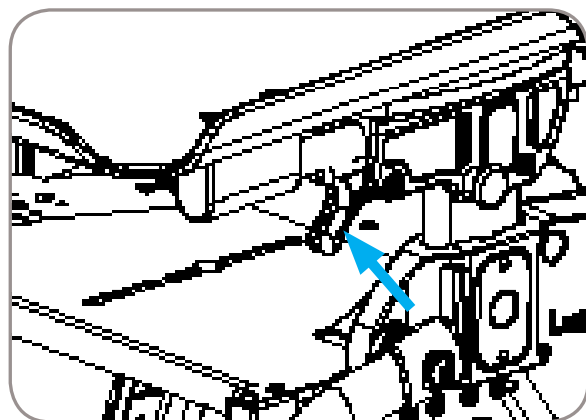


Figura 22

4.13 Cerraduras giratorias de ruedas

1. Alinee cada rueda paralela al lado de la silla.
2. Tire del émbolo hacia arriba y gire 90°
3. Suelte el émbolo. Verifique que el bloqueo giratorio esté activado aplicando una ligera fuerza de torsión a la horquilla giratoria.
4. Para desbloquear, tire del émbolo hacia arriba, gire 90° y suéltelo.

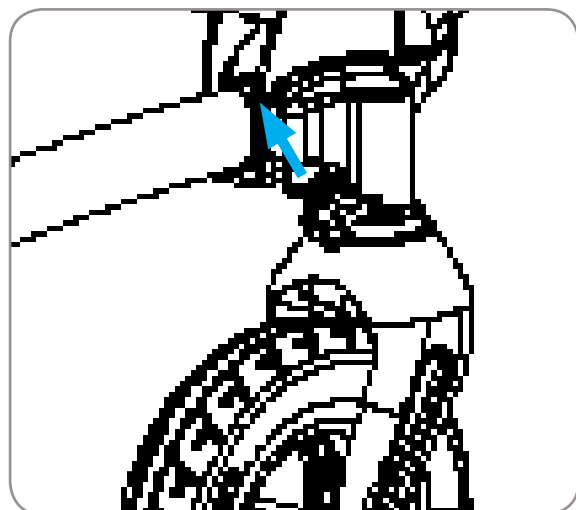


Figura 23



Desbloqueado



Bloqueado

4.14 Instalación de extensión de asiento

Si su silla Trak se configuró originalmente con una profundidad de asiento de 8 pulgadas o menos, necesitará instalar la extensión de profundidad del asiento y los tubos de asiento más largos suministrados con la silla para aumentar la profundidad del asiento más allá de 9 pulgadas.

1. Retire el cojín del asiento.
2. Instale el cojín del asiento y apriete las correas.
3. Retire el conjunto de la placa del asiento delantero.
4. Instale la extensión del asiento **1** con 4 pernos de cabeza hueca **2**. Se requiere una llave hexagonal de 5 mm. Referencia Figura 24.
5. Retire los tubos cortos **3** del asiento del conjunto del asiento delantero. Se requiere una llave hexagonal de 4 mm y una llave de 10 mm. Referencia Figura 25.
6. Instale los tubos de asiento largos **4** con las mismas piezas. Referencia Figura 26.
7. Instale el conjunto de la placa del asiento delantero y ajústelo a la profundidad deseada del asiento. Instale el perno de carro y apriete la perilla.
8. Instale el cojín del asiento y apriete las correas.

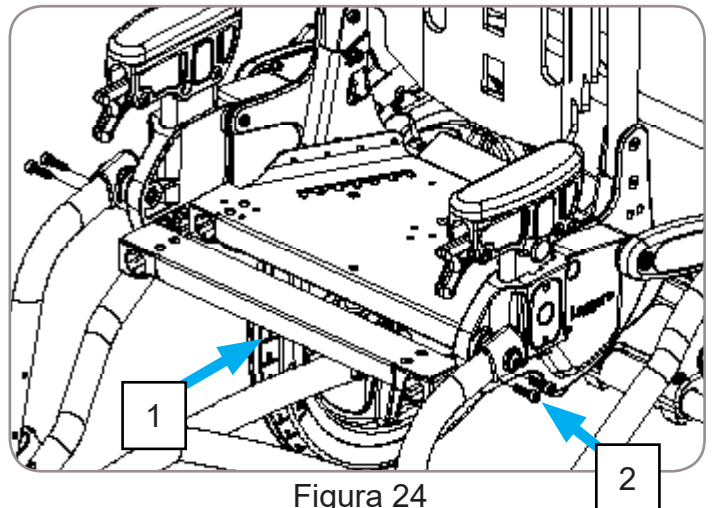


Figura 24

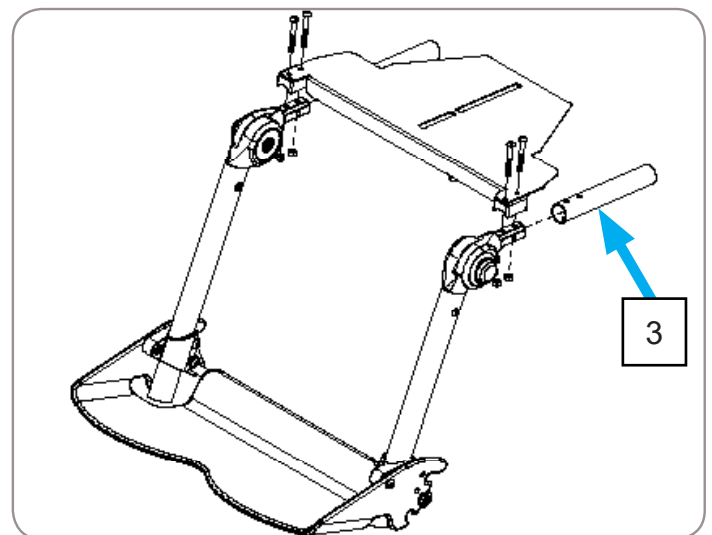


Figura 25

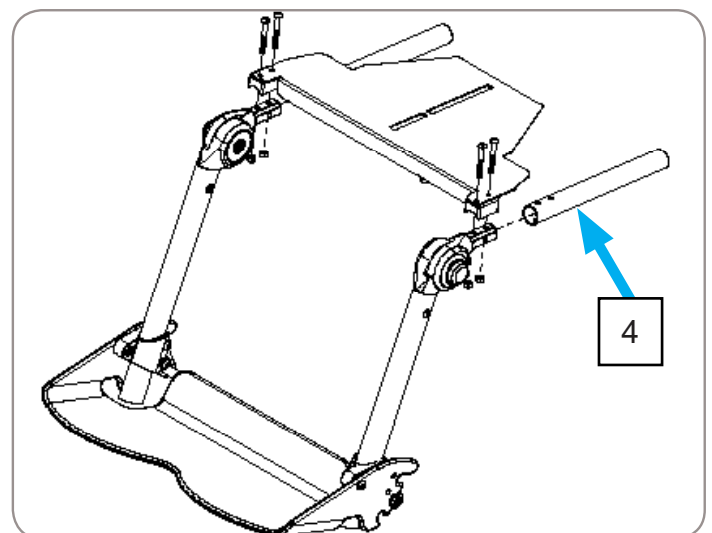


Figura 26

4.15 USO DE LA SILLA TRAK COMO ASIENTO EN UN VEHÍCULO

La silla Trak está aprobada para transportar niños en vehículos cuando está equipada con la función de tránsito OPCIONAL y se usa de acuerdo con estas instrucciones. La silla debe estar asegurada en una posición orientada hacia adelante con un sistema de sujeción y sujeción de la silla de ruedas (WTORS) que cumpla con los requisitos de SAE J2249. Práctica recomendada: sistemas de sujeción y sujeción de la silla de ruedas para su uso en vehículos de motor.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Esta silla cumple y se ha probado dinámicamente de acuerdo con ANSI / RESNA WC / Vol. 1 - Sección 19.5.3.

Comuníquese con Leggero o con su proveedor autorizado de Leggero si tiene alguna pregunta sobre el uso de la silla para sentarse en un vehículo. La información de contacto se puede encontrar en la página 2 de este manual.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES:

- La silla Trak se debe usar como se indica en estas instrucciones y en las instrucciones proporcionadas por el fabricante de los amarres montados en el vehículo.
- El ocupante de la silla debe ser transferido al asiento del vehículo y usar el sistema de retención del vehículo siempre que sea posible.
- La silla Trak puede acomodar hasta 80 lb. No exceda el peso de este ocupante.
- La silla Trak debe colocarse en una posición orientada hacia adelante cuando se usa como asiento en un vehículo motorizado. Use un sistema de amarre aprobado de 4 puntos tipo correa para la silla. Use un cinturón aprobado de 3 puntos para ocupantes de más de 50 lb / 23 kg. Para los ocupantes de menos de 50 lb / 23 kg, se requiere un arnés de tránsito de 5 puntos.
- Para conocer las ubicaciones de amarre de tránsito aprobadas y la ubicación del pasador de fijación del cinturón / arnés, consulte las Figuras 27 y 28.
- Las restricciones no deben mantenerse alejadas del cuerpo del niño por los componentes o accesorios de la silla.
- Las correas del cinturón y del arnés deben ajustarse hasta que estén ajustadas y no tengan holgura. Si puede pellizcar las correas del arnés o las correas del cinturón entre sus dedos, entonces el arnés está demasiado flojo.
- Solo restricciones de cinturón que cumplan con las disposiciones de ANSI / RESNA WC / Vol. 1 - Las Secciones 19 4.9.2-4.9.5 y 5.2 que se han probado dinámicamente de acuerdo con los Anexos A y 5.3 de la misma, deben usarse en la silla para usarse como restricción en un vehículo automotor.

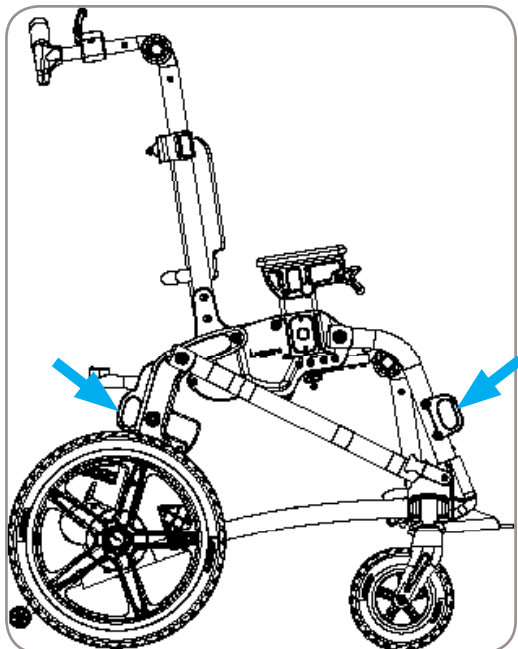


Figura 27

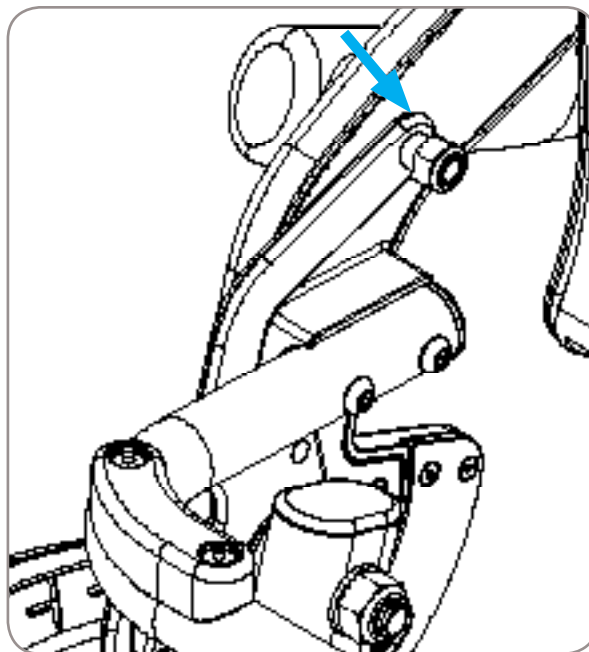


Figura 28

¡ADVERTENCIA! Si su silla no está equipada con la opción de tránsito, no la use como asiento en un vehículo motorizado. Transfiera al niño de la silla a un asiento aprobado para vehículos motorizados..

4.16 Uso del cojín del asiento

1. Los insertos isquiáticos¹ están disponibles en diferentes tipos de espuma y densidades.
2. El lateral isquiático² es delantero ajustable a la espalda.
3. Las cuñas de aducción / abducción³ son ajustables en ancho, ángulo y posición de adelante hacia atrás.

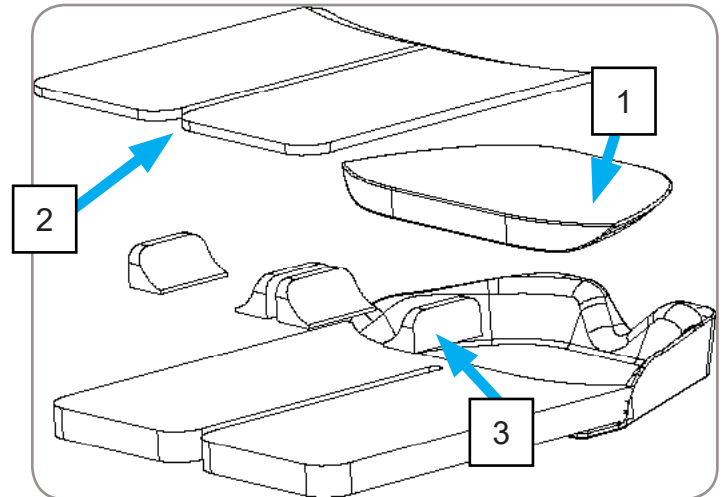


Figura 29

Uso del cojín del respaldo

1. El cojín del respaldo cuenta con almohadillas traseras de doble densidad y hombreras.
2. Se puede configurar con componentes opcionales como cuñas o soportes lumbares desde el kit de posicionamiento adicional. Configurar según las necesidades individuales del niño.

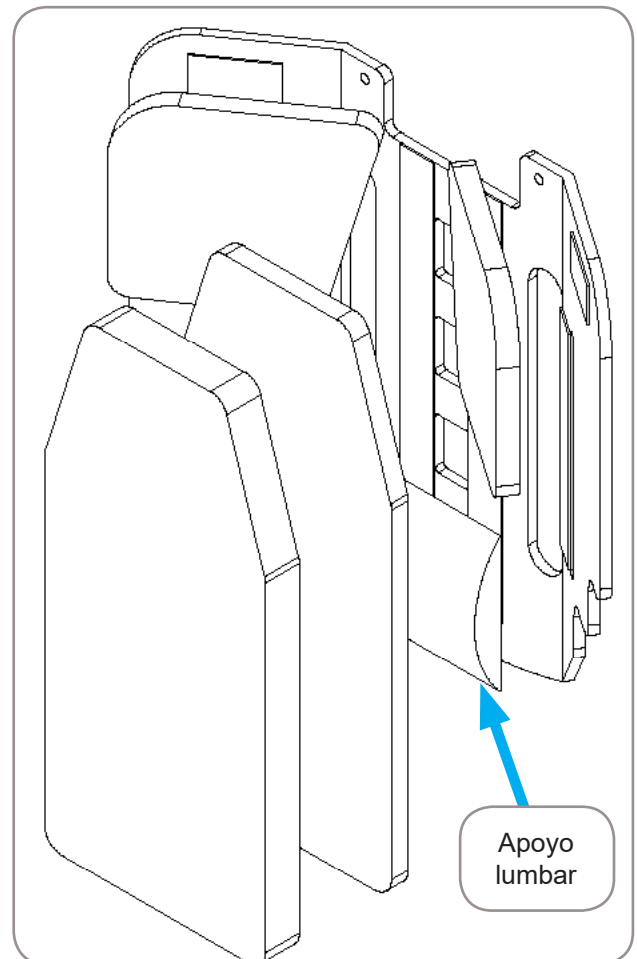


Figura 30

4.17 Ajuste de poste IV

1. Mantenga presionado el botón en el exterior del barral de ajuste, consulte la Figura 32.
2. Ajuste el poste IV al ángulo deseado.
3. Botón de liberación.

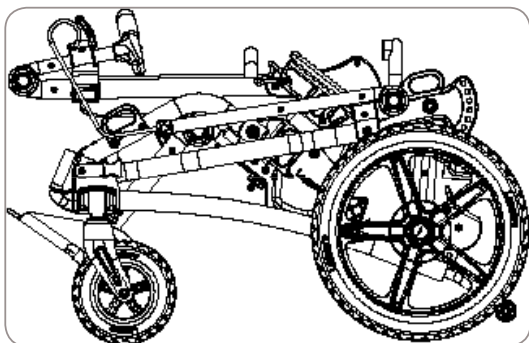


Figura 31

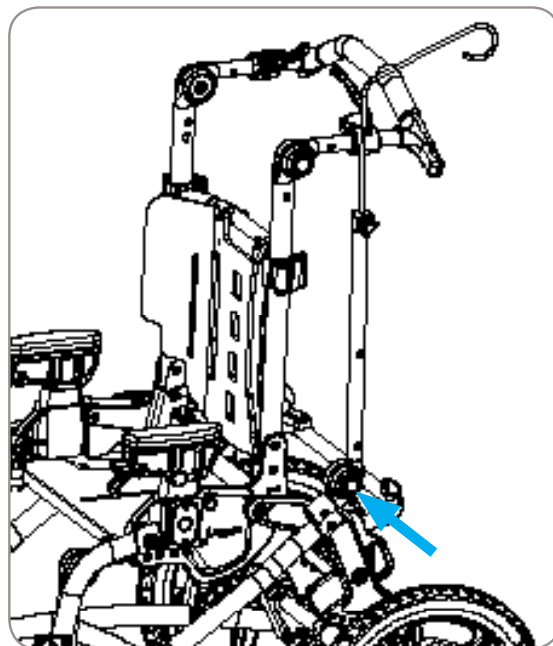


Figura 32

4.18 Instalación y extracción del soporte de O2

Instalación

1. Alinee las ranuras en el soporte de O2 con los patrones en el soporte. Referencia Figura 33.
2. Empuje hacia abajo el soporte de O2.
3. Apriete la manija [1] para asegurar. Referencia Figura 34.
4. Inserte el tubo de O2 en el soporte de O2.
5. Apriete la perilla [2]. Referencia Figura 34.

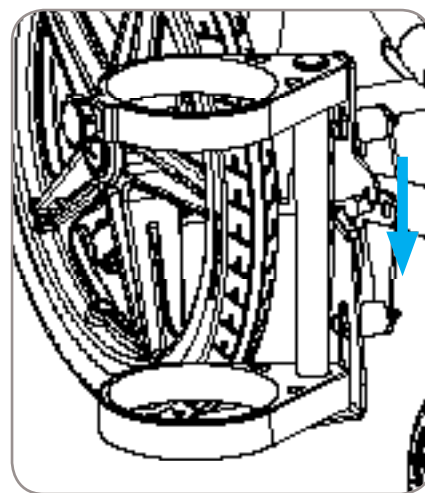


Figura 33

Extracción

1. Afloje la manija [1]
2. Afloje la perilla [2]
3. Retire la botella de O2.
4. Levante el soporte de O2 hacia arriba y hacia afuera para quitarlo.

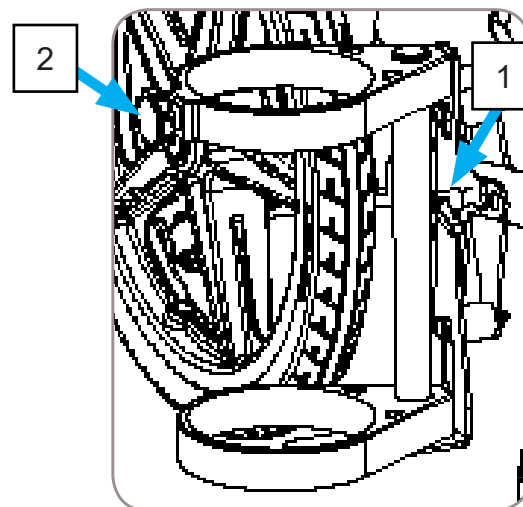


Figura 34

¡ADVERTENCIA! El soporte de O2 debe retirarse de la silla antes del uso en tránsito.

4.19 Bandeja de equipo

1. Ajuste el ángulo de inclinación del asiento a la posición más vertical.
2. Carga y descarga de la bandeja de los lados.
Figura de referencia 35.

¡ADVERTENCIA! Todos los artículos deben retirarse de la bandeja del equipo antes de su uso en tránsito.

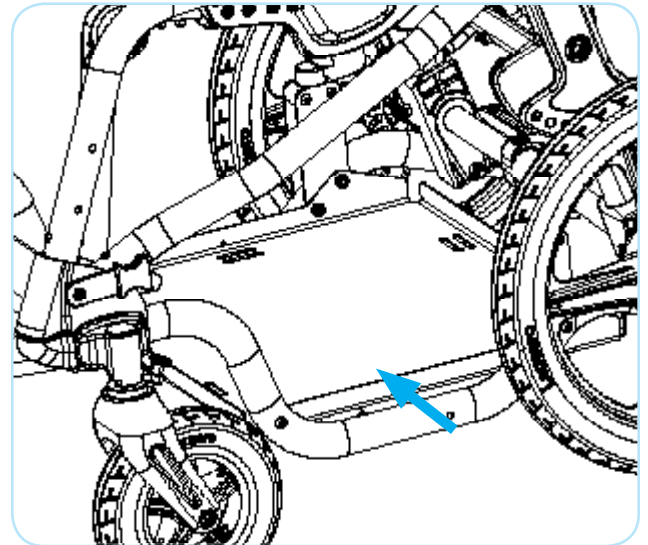


Figura 35

4.20 Soporte LTV para LTV-950

1. Ajuste el manillar hacia arriba para dejar espacio libre.
2. Deslice LTV950 hacia abajo en el soporte indicado para el equipo.

¡ADVERTENCIA! El soporte solo está diseñado para usarse con el ventilador Pulmonetic LTV-950.

¡ADVERTENCIA! El ventilador LTV-950 debe retirarse del soporte LTV antes del uso en tránsito.

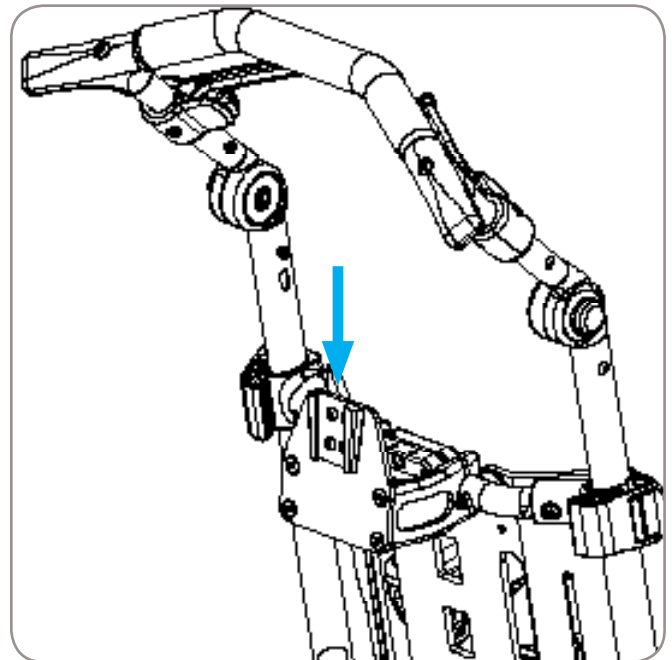


Figura 36

Sección 5: Garantía limitada

A. ESTA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO AL COMPRADOR ORIGINAL DE NUESTROS PRODUCTOS.

B. PARA TODA LA VIDA

Leggero LLC garantiza el marco y los ejes de liberación rápida de esta silla contra defectos en materiales y mano de obra para la vida del comprador original. La vida esperada de este marco es de cinco años.

C. POR UN (1) AÑO

Garantizamos todas las piezas y componentes del equipo original de esta silla contra defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de la fecha de compra del primer consumidor.

D. LIMITACIONES

1. Nosotros no garantizamos:
 - Neumáticos, tubos, tapicería, empuñaduras de empuje o brazaletes.
 - Daños resultantes de negligencia, mal uso o instalación o reparación inadecuada.
 - Daños resultantes del uso del tránsito.
 - Daño por exceder el límite de peso indicado en la etiqueta del número de serie.
2. Esta garantía es válida solo cuando el producto se usa de acuerdo con las condiciones especificadas y propósitos previstos, siguiendo todas las recomendaciones del fabricante. Es nulo lo contrario.
3. Esta garantía no se aplicará a los problemas derivados del desgaste normal, y dicha evaluación será únicamente determinado por Leggero LLC.
4. Esta garantía es nula si el producto se modifica sin el consentimiento expreso por escrito de Leggero, incluida, entre otras, la modificación mediante el uso de piezas o accesorios no autorizados; productos dañados por reparaciones hechas a cualquier componente sin el consentimiento específico de Leggero; o a un producto dañado por circunstancias fuera del control de Leggero, y dicha evaluación será determinada únicamente por Leggero.
5. Esta garantía es nula si se elimina o altera el número de serie original.
6. Esta garantía se aplica solo en los EE. UU. Consulte con su proveedor si se aplican garantías internacionales.

E. LO QUE HARÁ EL FABRICANTE

Nuestra única responsabilidad es reparar o reemplazar las partes cubiertas. Este es el remedio exclusivo para consecuencia sobre daños y perjuicios.

F. QUE DEBE HACER

1. Obtenga de nosotros, mientras esta garantía esté vigente, aprobación previa para la devolución o reparación de piezas cubiertas.
2. Devuelva el producto o partes, flete pre-pagado a Leggero LLC. Póngase en contacto con el servicio al cliente de Leggero en 1-844-503-KIDS para obtener una dirección de devolución y obtener un número de autorización de devolución (RA #).
3. Pagar el costo de la mano de obra para reparar, eliminar o instalar piezas.

G. AVISO AL CONSUMIDOR

1. Si lo permite la ley, esta garantía reemplaza a cualquier otra garantía, escrita u oral, expresa o implícita, incluida una garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.
2. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales. También puede tener otros derechos que varían en diferentes estados, territorios o provincias.



Sección 6: Mantenimiento

Consulte a su proveedor autorizado si tiene preguntas sobre el mantenimiento de su silla Dyno. El mantenimiento constante y minucioso extenderá la vida útil de su silla. Un mantenimiento inadecuado puede disminuir significativamente la vida útil de la silla. Cualquier parte dañada debe reemplazarse antes de reanudar el uso de la silla. La silla debe limpiarse regularmente y debe ser revisada por un distribuidor autorizado al menos una vez al año.

La garantía puede verse afectada si no se realiza el mantenimiento adecuado en los intervalos especificados. Consulte la tabla a continuación para conocer los procedimientos y la frecuencia de mantenimiento recomendados. Hay un registro de mantenimiento en la siguiente página de este manual que debe usarse para documentar las actividades de mantenimiento.

Tipo de mantenimiento	Semanal	Mensual
Verifique la presión de aire de los neumáticos (si corresponde)	✓	
Revise las ruedas y los neumáticos por desgaste o daños		✓
Verifique la función del frenado de las ruedas	✓	
Verifique la alineación adecuada de las ruedas		✓
Verifique que todos los sujetadores estén apretados		✓
Verifique que los ejes de liberación rápida funcionen correctamente	✓	
Verifique el mecanismo de bloqueo de inclinación para un acoplamiento adecuado	✓	
Verifique el mecanismo de bloqueo de reclinación para un acoplamiento adecuado	✓	
Revise todos los componentes estructurales por desgaste o daños		✓

Recomendamos que la silla se limpie regularmente:

- Limpie todos los componentes del marco y las piezas de plástico utilizando solo detergentes suaves.
- Las partes de la tela se pueden lavar. Si usa una lavadora, colóquelos en una bolsa de lino o en una funda de almohada. Secar al aire.
- En la mayoría de los casos, limpiar con un paño húmedo es suficiente.
- No use su silla en agua salada, ya que puede provocar daños graves.
- Evite que la arena u otras partículas dañen la rueda y los cojinetes de la horquilla.

Registro de mantenimiento

Fecha	Servicio Proveedor	Técnico	Descripción del Servicio

Fecha	Servicio Proveedor	Técnico	Descripción del Servicio





Leggero LLC
174 D Shepherd Trail
Bozeman, MT 59718
Toll Free: 1-844-503-KIDS
www.leggero.us